

NEC

Monitor für medizinische Zwecke

MD211G3

INSTALLATIONS- UND WARTUNGSHANDBUCH



Inhaltsverzeichnis

Warnung, Vorsicht	Deutsch-1
Vorgesehene Verwendung	Deutsch-2
Registrierungsinformationen	Deutsch-3
Einsatzempfehlungen	Deutsch-4
Inhalt der Verpackung	Deutsch-6
Kurzanleitung	Deutsch-7
Bedienelemente	Deutsch-12
Verwenden der Funktion BILDMODUS	Deutsch-16
Testfunktion für Monitor-Kurz-QA	Deutsch-16
Erweitertes OSD.....	Deutsch-17
Technische Daten.....	Deutsch-21
Merkmale und Funktionen.....	Deutsch-22
Fehlerbehebung	Deutsch-23
EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG	Deutsch-24
Selbstkalibrierung.....	Deutsch-25
Kopierte Kalibrierung.....	Deutsch-26
Gamma-Anpassung	Deutsch-27
DICOM Messung.....	Deutsch-28
KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS.....	Deutsch-28
Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch.....	Deutsch-30

Symbolinformationen

	Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Aus diesem Grund dürfen Sie keinesfalls Kontakt mit einer Komponente im Geräteinneren herstellen.
	Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege dieses Geräts hin. Lesen Sie die Informationen aufmerksam durch, um Probleme zu vermeiden.
	Markierung für Schutzerdungsklemme.
	Hauptschalter EIN.
	Hauptschalter AUS.
	Wechselstromeingang.

KENNZEICHEN FÜR UL-ZERTIFIZIERUNG, ANSI/AAMI ES60601-1:2005
cUL, CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:08



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL
HAZARD ONLY IN ACCORDANCE WITH ANSI/AAMI
ES60601-1:2005 AND CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:08

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. NEC ist eine eingetragene Marke der NEC Corporation. ErgoDesign ist eine eingetragene Marke der NEC Display Solutions Ltd. in Österreich, Benelux, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

DisplayPort und das Logo für die DisplayPort-Konformität sind Marken der Video Electronics Standards Association in den USA und anderen Ländern.





WARNUNG



SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, DA ES ANDERNFALLS ZU FEUER ODER STROMSCHLÄGEN KOMMEN KANN. VERWENDEN SIE DEN NETZSTECKER DIESES GERÄTS KEINESFALLS MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL ODER EINER STECKDOSENLEISTE, WENN DIE STECKERSTIFTE NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT, DA SICH IM INNEREN KOMPONENTEN BEFINDEN, DIE UNTER HOCHSPANNUNG STEHEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.



VORSICHT





ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN. ERST NACH DEM TRENNEN DES GERÄTS VOM STROMNETZ IST SICHERGESTELLT, DASS AN KEINER GERÄTEKOMPONENTE SPANNUNG ANLIEGT. ENTFERNEN SIE KEINESFALLS DIE GEHÄUSEABDECKUNG (GEHÄUSERÜCKSEITE). IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN KOMPONENTEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKERN DURCHFÜHREN.

Wichtige Informationen zum Netzkabel

ACHTUNG: Bitte verwenden Sie das mit diesem Monitor gelieferte Netzkabel gemäß der folgenden Tabelle. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der Monitor ohne Netzkabel geliefert wurde. In allen anderen Fällen ist ein für die Netzspannung geeignetes

und zugelassenes Netzkabel zu verwenden, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

Wenn Sie diesen Monitor in Nordamerika einsetzen, verwenden Sie bitte ein Netzkabel der Spezifikation North America Hospital Grade.

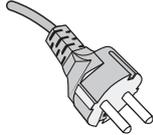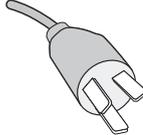Steckertyp	Nordamerika	Europäisch (Kontinent)	Großbritannien	Chinesisch	Japanisch
Steckerform	 <i>(grüner Punkt und Kabelfahne)</i>				
Land	USA/Kanada	EU (außer GB)	Großbritannien	China	Japan
Spannung	120	230	230	220	100

HINWEIS: Für dieses Produkt werden Kundendienstleistungen nur in dem Land angeboten, in dem Sie es gekauft haben.

Vorgesehene Verwendung

Der Graustufenmonitor MD211G3 ist für die Anzeige digitaler Bilder zur Diagnose durch ausgebildete Ärzte vorgesehen. Um eine der Spezifikation entsprechende Leistung zu erzielen, betreiben Sie den Monitor nur mit von NEC geprüften Grafikkarten.

Der monitor MD211G3 darf nicht für Lebenserhaltungssysteme verwendet werden.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz bei der digitalen Mammographie geeignet.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an nach IEC 60601-1 zertifizierten Geräten bestimmt.

Kontraindikationen: Keine bekannt.

Sicherheitsvorkehrungen

Das Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an nach IEC 60950 zertifizierten Geräten außerhalb des Patientenbereichs und nach IEC 60601-1 zertifizierten Geräten innerhalb des Patientenbereichs vorgesehen.

- Geräte, die an digitale Schnittstellen angeschlossen werden, müssen den jeweiligen IEC-Normen (z. B. IEC 60950 für datenverarbeitende Geräte und IEC 60601-1 für medizinische elektrische Geräte) entsprechen.
- Dieses Gerät entspricht der Norm IEC 60601-1-2. Um Störungen anderer Geräte zu minimieren, ist ein Mindestabstand von 0,5 m von anderen potentiellen Quellen elektromagnetischer Strahlung, z. B. Mobiltelefonen, einzuhalten.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um Stromschläge zu vermeiden. Erst nach dem Trennen des Geräts vom Stromnetz ist gewährleistet, dass an keiner Gerätekomponente Spannung anliegt. Entfernen Sie keinesfalls die Gehäuseabdeckungen (Vorder- und Rückseite). Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten. Lassen Sie Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen. Die Wechselstromsteckdose muss frei zugänglich sein.

Dieses Gerät verfügt über temperaturabhängige Ventilatoren für interne Kühlung. Die Verwendung dieses Geräts in Operationsälen wird nicht empfohlen, wenn das regelmäßige Reinigen der Kühllufteinlassöffnung von Staub und Partikeln durch den Benutzer nicht gewährleistet werden kann (maximales Intervall: sechs Monate).

Dieses Gerät ist mit einem integrierten Frontsensor und einem Umgebungslichtsensor ausgestattet, die die Anforderungen gemäß IEC 62563-1 für Messgeräte mit einer Kalibrierung, die auf ein Labor mit Primärstandards zurückgeführt werden kann, erfüllen. Daher können diese Sensoren mithilfe von externen Luminanz- und Illuminanzmessgeräten als Referenz recalibriert werden, die entsprechend den länderspezifischen gesetzlichen Regelungen für messtechnische Kontrollen kalibriert wurden. Wenn der integrierte Frontsensor und der Umgebungslichtsensor ordnungsgemäß recalibriert werden, können diese für die Qualitätssicherung von anderen Standorten gemäß der Norm IEC 62563-1 verwendet werden. NEC Display Solutions empfiehlt, den integrierten Frontsensor und den Umgebungslichtsensor in Intervallen von zwei (2) Jahren zu überprüfen.

Kunden in Nordamerika

Das Gerät ist nur dann ausreichend geerdet, wenn es an eine entsprechende Steckdose mit der Kennzeichnung „Hospital Only“ oder „Hospital Grade“ angeschlossen ist. Der Signaleingang muss richtig angeschlossen sein, und im Behandlungsbereich darf kein ungenutzter Signaleingang für Patienten zugänglich sein, nachdem der LCD-Monitor in ein medizinisches System integriert wurde.

Gemäß bundesrechtlichen Gesetzen darf das vorliegende Gerät ausschließlich durch oder auf Geheiß von zugelassenen Ärzten verkauft werden.

Für europäische Kunden

Dieser Monitor darf nur von autorisiertem und speziell ausgebildetem Personal ausgepackt, installiert und kalibriert werden. Jede Installation durch nicht autorisierte Personen geschieht auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Fehlfunktion des Geräts.

Medizinische Bildgebung

Der MD211G3 eignet sich für die Darstellung medizinischer Bilder der Größe 1536 x 2048 (Hochformat) oder 2048 x 1536 (Querformat).

Registrierungsinformationen

Erklärung

Erklärung des Herstellers	
Konformitätserklärung	NEC Display Solutions Europe GmbH erklärt hiermit, dass das aufgeführte Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates einschließlich der Abänderungen durch die Richtlinie 2007/47/EG des Rates sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Rates (RoHS) und den anwendbaren Klauseln der folgenden Standards entspricht:
Geräteklassifizierung: Klasse I, nicht messende Funktion	 <ul style="list-style-type: none">- EN 60601-1- EN 60601-1-2- EN 61000-3-2- EN 61000-3-3- EN 50581:2012
Anwendbare Regeln: Annex IX, Regeln 1.4 (Abschnitt 1) und 1.1 (Abschnitt 3)	
Produktname: MD211G3 21,3-Zoll-Graustufen-LCD-Monitor zur Bilddiagnose	
Modellnummer: MD211G3	
UMDNS-Code: 16603	NEC Display Solutions Europe GmbH Landshuter Allee 12-14, 80637 München, Deutschland

Maschinenlärminformations-Verordnung - Verordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (LärmVibrationsArbSchVEinfV). Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Konformitätserklärung - Canadian Department of Communications

DOC: Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Richtlinien zu funktstörenden Geräten.
C-UL: Trägt die Kennzeichnung C-UL und erfüllt die kanadischen Sicherheitsrichtlinien nach CAN/CSA C22.2 Nr. 601-1:08.

FCC-Hinweis

- Verwenden Sie die angebrachten bzw. angegebenen Kabel mit dem Graustufenmonitor MD211G3, um Störungen des Rundfunk- bzw. Fernsehempfangs zu vermeiden.
 - Verwenden Sie das mitgelieferte oder ein gleichwertiges Netzkabel, damit die FCC-Konformität gewährleistet ist.
 - Verwenden Sie das mitgelieferte abgeschirmte DVI-D- oder DisplayPort-Videosignalkabel.
Die Verwendung anderer Kabel und Adapter kann zu Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs führen.
- Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese Grenzen gewährleisten bei der Installation in Wohngebieten einen ausreichenden Schutz vor Störungen. Dieses Gerät kann Energie im HF-Bereich erzeugen, verwenden und abstrahlen. Wird es nicht nach Maßgabe der Bedienungsanleitung installiert, kann es zu Störungen der Kommunikation im HF-Bereich kommen. Es ist jedoch nicht garantiert, dass unter keinen Bedingungen Störungen auftreten. Treten bei Verwendung dieses Geräts Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs auf (dies ist durch Aus- und Einschalten des Geräts festzustellen), empfehlen wir eine Behebung der Störung durch die folgenden Maßnahmen:
 - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie anderswo auf.
 - Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Gerät und dem Empfänger.
 - Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
 - Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, oder fragen Sie einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Rat.Der Benutzer sollte sich gegebenenfalls mit seinem Händler oder einem erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker in Verbindung setzen, um weitere Möglichkeiten zu erfragen. Nützliche Hinweise enthält auch die folgende Broschüre der Federal Communications Commission: „How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems“. Diese Broschüre können Sie unter der Bestellnr. 004-000-00345-4 vom U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, anfordern.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Beim Betrieb müssen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein. (1) Das Gerät darf keine unerwünschten Störungen abgeben. (2) Das Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen können, auch wenn diese Funktionsstörungen verursachen.

Verantwortlich in den USA:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresse:	500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143, USA
Tel.- Nr.:	(630) 467-3000

Produkttyp: Display Monitor
Geräteklassifizierung: Peripheriegerät der Klasse B
Modell: MD211G3



Wir erklären hiermit, dass das oben angegebene Gerät den technischen Standards der FCC-Richtlinien entspricht.

Klassifizierung

Typ des Stromschlagschutzes: KLASSE 1
Grad des Stromschlagschutzes: Kein verwendetes Teil
Grad des Schutzes vor Wassereindringen nach IEC 529, aktuelle Fassung: IPX0
Vom Hersteller empfohlene Sterilisations- oder Desinfektionsmethode: Keine Angabe
Grad der Sicherheit bei Anwendung bei Vorhandensein einer ENTFLAMMBAREN MISCHUNG AUS ANÄSTHETIKUM UND LUFT oder SAUERSTOFF ODER DISTICKSTOFFOXID: Kein AP- oder APG-Schutz
Betriebsmodus: Dauerbetrieb

Einsatzempfehlungen

Sicherheitsvorkehrungen und Pflege



BEACHTEN SIE ZUR ERZIELUNG OPTIMALER
LEISTUNG DIE FOLGENDEN HINWEISE ZUM EINRICHTEN
UND NUTZEN DES LCD-MONITORS:



WARNUNG: Nehmen Sie an diesem Gerät keine Modifikationen ohne Genehmigung durch den Hersteller vor.

WARNUNG: Um dieses Produkt von der Netzstromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

WARNUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Netzstromversorgung mit Schutzerdung angeschlossen werden

WARNUNG: Das Gerät darf in keinster Weise modifiziert werden.

WARNUNG: Detaillierte Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erhalten Sie bei Ihrem örtlichen NEC-Vertreter.

- **ÖFFNEN SIE DEN MONITOR NICHT.** Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Das Öffnen oder Abnehmen der Abdeckungen kann zu gefährlichen Stromschlägen oder anderen Gefährdungen führen. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifizierten Wartungstechnikern durchführen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, und stellen Sie den Monitor in trockenen Räumen auf.
- Führen Sie keinesfalls Objekte in die Gehäuseschlitze ein, da spannungsführende Teile berührt werden können, was zu schmerzhaften oder gefährlichen Stromschlägen, zu Feuer oder zu Beschädigungen des Geräts führen kann.
- Legen Sie keine schweren Objekte auf das Netzkabel. Beschädigungen des Kabels können zu Stromschlägen oder Feuer führen.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf wackelige oder instabile Flächen, Wagen oder Tische, da der Monitor fallen und dabei schwer beschädigt werden könnte.
- Das Netzkabel muss in Ihrem Land zugelassen sein und den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. (In Europa muss Typ H05VV-F 3G 1 mm² verwendet werden).
- Verwenden Sie in Großbritannien für diesen Monitor ein gemäß BS zugelassenes Netzkabel mit angegossenem Stecker. Der Stecker muss mit einer schwarzen Sicherung (5 A) ausgestattet sein.
- Stellen Sie keine Objekte auf den Monitor, und setzen Sie den Monitor nicht außerhalb geschlossener Räume ein.
- Die Lampen dieses Produkts enthalten Quecksilber. Bitte halten Sie sich bei deren Entsorgung an die regionalen bzw. staatlichen Richtlinien.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in heißen, feuchten, staubigen oder öligen Bereichen.
- In diesem Monitor befinden sich temperaturabhängige Ventilatoren. Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Funktion und langen Lebensdauer dieses Produktes dürfen die Belüftungsschlitze am Monitor nicht verdeckt werden.
- Vibration kann die Hintergrundbeleuchtung beschädigen. Installieren Sie den Monitor nicht an Orten, an denen er anhaltender Vibration ausgesetzt ist.
- Berühren Sie die Flüssigkristalle nicht, wenn der Monitor oder das Glas zerbrochen ist.
- Um Beschädigungen am LCD-Monitor durch Umkippen aufgrund von Erdbeben oder anderen Erschütterungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Monitor an einem sicheren Standort aufgestellt wird, und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um ein Herunterfallen des Monitors zu vermeiden.
- Berühren Sie nicht gleichzeitig dieses Gerät und einen Patienten.

Unter den folgenden Bedingungen müssen Sie den Monitor sofort ausschalten, vom Stromnetz trennen, diesen an einem sicheren Ort abstellen und sich mit einem qualifizierten Wartungstechniker in Verbindung setzen. Wenn der Monitor unter diesen Bedingungen verwendet wird, kann es zu einem Sturz, Brand oder Stromschlag kommen:

- Der Monitorfuß weist Risse oder Beschädigungen auf.
- Der Monitor war Schwanken oder schweren Erschütterungen ausgesetzt.
- Bei dem Monitor wird ein ungewöhnlicher Geruch festgestellt.
- Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit wurde über dem Monitor verschüttet, oder Gegenstände sind in das Gehäuse gefallen.
- Der Monitor wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Der Monitor wurde fallen gelassen, oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Der Monitor arbeitet trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß.



VORSICHT

- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr, damit die entstehende Wärme abgeführt werden kann. Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab, und stellen Sie den Monitor nicht neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Monitor.
- Durch Ziehen des Netzkabelsteckers kann das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Der Monitor muss in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die leicht zugänglich ist.
- Transportieren Sie den Monitor vorsichtig. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf.
- Berühren Sie beim Transport, bei der Montage und Einrichtung nicht das LCD-Panel. Das Ausüben von Druck auf das LCD-Panel kann dauerhafte Beschädigungen hervorrufen.
- Um den Monitor zu tragen, halten Sie diesen am integrierten Handgriff und am unteren Rahmen fest.
- Halten Sie den Monitor zum Tragen nicht ausschließlich an dessen Fuß.
- Dieser Monitor verfügt über einen Frontsensor. Berühren Sie den Frontsensor nicht, wenn Sie den Monitor tragen. Belasten Sie den Frontsensor nicht.
- Dieses Gerät verfügt über temperaturabhängige Ventilatoren für interne Kühlung. Die Verwendung dieses Geräts in Operationssälen wird nicht empfohlen, wenn das regelmäßige Reinigen der Kühllufteinlassöffnung von Staub und Partikeln durch den Benutzer nicht gewährleistet werden kann (Intervall: max. sechs Monate).

Bildschatten: Bildschatten sind verbleibende oder sogenannte „Geisterbilder“ vom vorhergehenden Bild, die auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur, aber die Anzeige von Standbildern über eine längere Zeit sollte vermieden werden.

Sie können den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor so lange ausschalten, wie das vorherige Bild angezeigt wurde. Wurde auf dem Monitor beispielsweise eine Stunde lang ein Standbild angezeigt, und bleibt ein „Geisterbild“ sichtbar, sollte der Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet.

HINWEIS: NEC DISPLAY SOLUTIONS empfiehlt die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Wartung:

a. Vor der ersten Verwendung dieses Monitors für die diagnostische Bildgebung wird eine Erstkalibrierung gemäß DICOM Teil 14 stark empfohlen. Um eine gleichbleibende Bildqualität über die gesamte Lebensdauer des Monitors sicherzustellen, sollte das Gerät alle 12 Monate rekaliert werden.

b. Dieses Gerät ist mit einem integrierten Frontsensor und einem Umgebungslichtsensor ausgestattet, die die Anforderungen gemäß IEC 62563-1 für Messgeräte mit einer Kalibrierung, die auf ein Labor mit Primärstandards zurückgeführt werden kann, erfüllen. Daher können diese Sensoren mithilfe von externen Luminanz- und Illuminanzmessgeräten als Referenz rekaliert werden, die entsprechend den länderspezifischen gesetzlichen Regelungen für messtechnische Kontrollen kalibriert wurden. Wenn der integrierte Frontsensor und der Umgebungslichtsensor ordnungsgemäß rekaliert werden, können diese für die Qualitätssicherung von anderen Standorten gemäß der Norm IEC 62563-1 verwendet werden. NEC Display Solutions empfiehlt, den integrierten Frontsensor und den Umgebungslichtsensor mindestens alle 2 Jahre zu rekaliert werden.



DURCH RICHTIGE AUFSTELLUNG UND EINSTELLUNG DES MONITORS KÖNNEN ERMÜDUNGERSCHEINUNGEN VON AUGEN, SCHULTERN UND NACKEN VERMIEDEN WERDEN. BEACHTEN SIE BEI DER AUFSTELLUNG DES MONITORS FOLGENDES:



- Die optimale Monitorleistung wird erst nach ca. 30 Minuten Warmlaufzeit erzielt.
- Stellen Sie den Monitor so auf, dass sich die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe oder knapp darunter befindet. Ihre Augen sollten leicht nach unten gerichtet sein, wenn Sie auf die Bildschirmmitte blicken.
- Platzieren Sie den Monitor in einem Abstand von 40–70 cm von Ihren Augen. Der optimale Abstand beträgt 50 cm.
- Entspannen Sie Ihre Augen regelmäßig, indem Sie ein Objekt fokussieren, das sich in einer Entfernung von mindestens 6 m befindet. Blinzeln Sie häufig.
- Stellen Sie den Monitor in einem 90°-Winkel zu Fenstern und anderen Lichtquellen auf, um Blendung und Reflexionen zu verhindern. Neigen Sie den Monitor in einem Winkel, der Reflexionen der Deckenleuchten auf dem Bildschirm verhindert.
- Vermeiden Sie die längerfristige Darstellung gleichbleibender Muster auf dem Bildschirm, um Bildschatten zu vermeiden.
- Lassen Sie Ihre Augen regelmäßig untersuchen.



HINWEIS: Dieses Modell wird werkseitig voreingestellt, sodass das NEC-Logo nach Einschalten des Monitors kurz angezeigt wird. Diese Funktion kann im erweiterten OSD ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sollten Sie dieses helle Markenlogo als störend empfinden, können Sie es einfach ausschalten. Halten die Taste EXIT gedrückt, wenn das NEC-Logo angezeigt wird. Es erscheint das Menü BOOT LOGO. Sie können die BOOT LOGO-Einstellung ausschalten.

Reinigen des LCD-Bildschirms

- Wenn der LCD-Monitor verschmutzt ist, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des LCD-Bildschirms keine harten oder kratzenden Materialien.
- Üben Sie keinen Druck auf die LCD-Oberfläche aus.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger, da sie zur Beschädigung oder Verfärbung der LCD-Oberfläche führen können.

Reinigen des Gehäuses


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse zunächst mit einem mit neutralem Reinigungsmittel und Wasser angefeuchteten Tuch, und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

HINWEIS: Die Gehäuseoberfläche besteht aus verschiedenen Kunststoffen. Verwenden Sie zum Reinigen NICHT Benzol, Verdünner, alkalische oder alkoholhaltige Lösungsmittel, Glasreiniger, Wachs, Politur, Waschmittel oder Insektizide. Bringen Sie das Gehäuse nicht über längere Zeit mit Gummi oder Vinyl in Berührung. Diese Flüssigkeiten und Stoffe können dazu führen, dass die Farbe beeinträchtigt wird, reißt oder abblättert.

Inhalt der Verpackung

Der Karton* mit Ihrem neuen NEC-Monitor sollte folgende Komponenten enthalten:

- Monitor MD211G3 mit neig-, schwenk-, dreh- und höhenverstellbarem Fuß
- Netzkabel
- Videokabel (DVI-D-auf-DVI-D-Kabel)*¹
- DisplayPort-Kabel
- USB-Kabel
- Kurzübersicht
- CD-ROM x 2

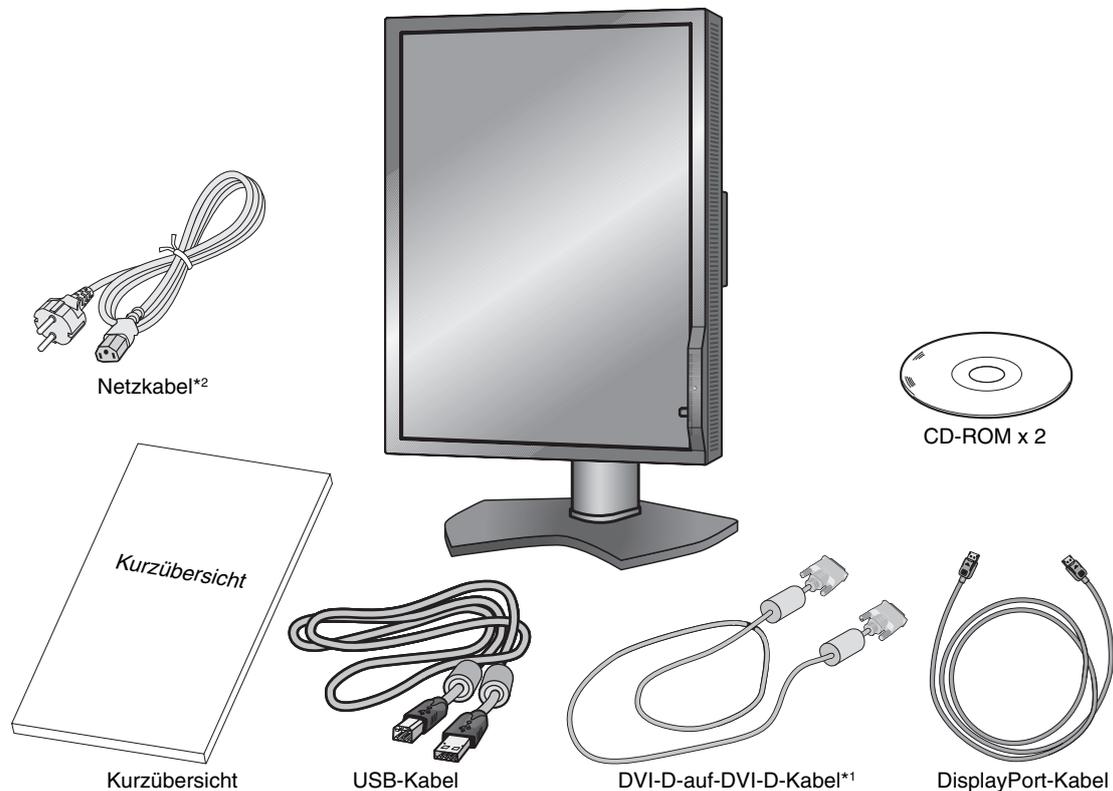

* Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für spätere Transporte des Monitors auf.

*¹ Dual-Link-DVI-Kabel.

*² Anzahl und Typ der im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel hängen davon ab, wohin der LCD-Monitor geliefert wird. Wenn mehr als ein Netzkabel enthalten ist, verwenden Sie bitte ein für die Netzspannung geeignetes und zugelassenes Netzkabel, das den Sicherheitsstandards des betreffenden Landes entspricht.

Kurzanleitung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den LCD-Monitor an Ihr System anzuschließen:

HINWEIS: Bitte denken Sie daran, vor der Installation die „Einsatzempfehlungen“ (Seite 4) zu lesen.
Für eine maximale Auflösung ist eine Grafikkarte erforderlich, die eine Auflösung von 1536 x 2048 (Hochformat) bzw. 2048 x 1536 Pixeln (Querformat) unterstützt.

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. **Für PCs mit digitalem DVI-Ausgang:** Verbinden Sie das DVI-Kabel mit dem Anschluss der Grafikkarte in Ihrem System (**Abbildung A.1**). Ziehen Sie alle Schrauben fest.
Für PC mit DisplayPort-Ausgang: Verbinden Sie das DisplayPort-Kabel mit dem Anschluss der Grafikkarte in Ihrem System (**Abbildung A.2**).



Abbildung A.1

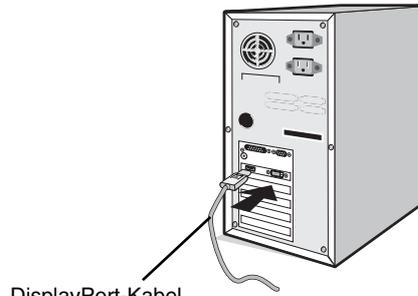


Abbildung A.2

- HINWEIS:** 1. Bitte verwenden Sie ein DisplayPort-Kabel mit dem DisplayPort-Logo.
2. Halten Sie beim Trennen des DisplayPort-Kabels die obere Taste gedrückt, um die Sperre zu lösen.
3. Die Höheneinstellung ist durch eine Taste gesperrt. Legen Sie Ihre Hand auf den Monitorfuß, und drücken Sie den Bildschirm in die niedrigste Position. Entriegeln Sie die Sperrtaste (**Abbildung B.1**).

HINWEIS: Seien Sie beim Entriegeln des Monitorfußes vorsichtig.

Fassen Sie den LCD-Bildschirm an beiden Seiten an, neigen Sie ihn in einem Winkel von 30 Grad, und heben Sie ihn in die höchste Position. Schieben Sie die Kabelabdeckung nach oben (**Abbildung B.2**).

HINWEIS: Die Kabelabdeckung kann nicht entfernt werden.

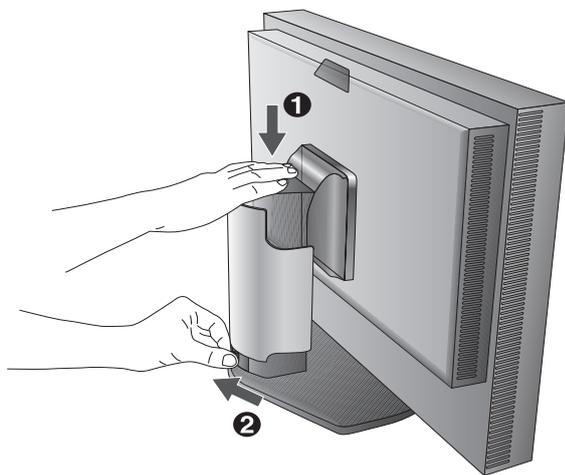


Abbildung B.1

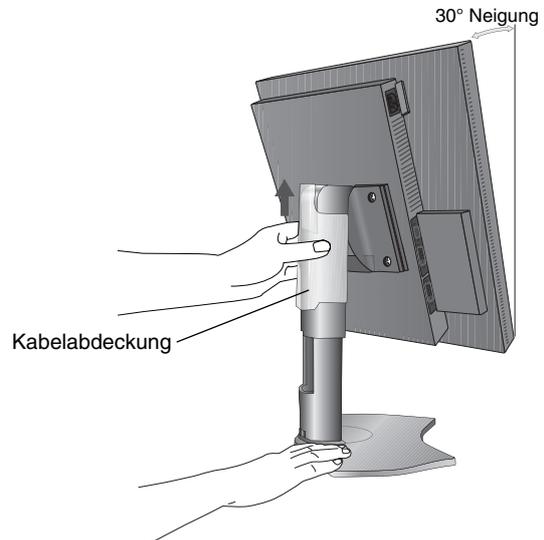


Abbildung B.2

4. Verbinden Sie alle Kabel mit den entsprechenden Anschlüssen (**Abbildung C.1**). Verbinden Sie den Anschluss des Typs B mit dem USB-Upstream-Anschluss auf der hinteren rechten Seite des Monitors und den Anschluss des Typs A mit dem Downstream-Port am Computer (**Abbildung C.1a**). Wenn Sie das Kabel eines USB-Geräts verwenden, müssen Sie es in einen der Downstream-Ports des Monitors einstecken.

HINWEIS: Eine fehlerhafte Kabelverbindung kann zu Betriebsstörungen, Beschädigungen von Komponenten des LCD-Moduls, einer verminderten Anzeigequalität und/oder einer Verkürzung der Lebensdauer dieses Moduls führen.

HINWEIS: Es können bis zu 5 nachgelagerte Monitore in Reihenschaltung angeschlossen werden.

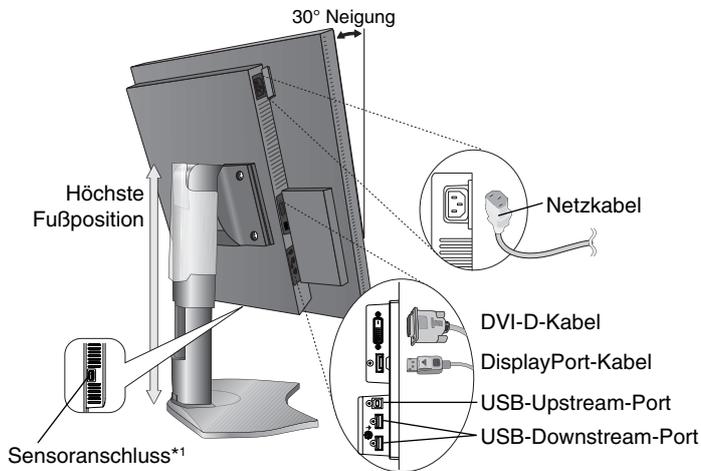


Abbildung C.1

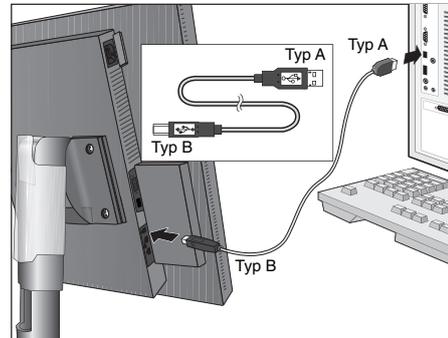


Abbildung C.1a

5. Verlegen Sie die Kabel durch die Kabelführung im Fuß, um diese ordentlich zu bündeln. Führen Sie die Kabel sicher und gleichmäßig in die Halterungen ein (**Abbildung C.2** und **Abbildung C.3**).
6. Nachdem Sie die Kabel installiert haben, vergewissern Sie sich, dass Sie den Bildschirm drehen, heben und senken können.

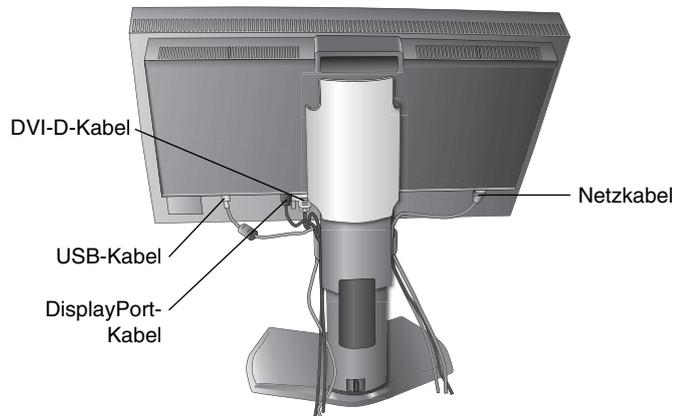


Abbildung C.2

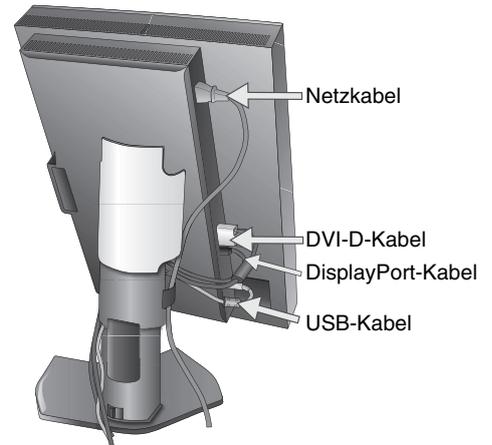


Abbildung C.3

*1 Schließen Sie den optionalen optischen USB-Sensor für die Selbstkalibrierung an diesen Anschluss an. (Siehe Seite 25)

7. Schieben Sie die Kabelabdeckung nach unten (**Abbildung D.1**).
 8. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels auf der Rückseite des Monitors und das andere Ende in die Steckdose ein.
- HINWEIS:** Beachten Sie zur Auswahl des richtigen Netzkabels den **Sicherheitshinweis** in dieser Bedienungsanleitung.



Abbildung D.1

9. Schalten Sie den Monitor mit dem Netzschalter auf der oberen (Hochformat) bzw. linken (Querformat) Seite ein (**Abbildung E.1**). Schalten Sie den Computer ein.

HINWEIS: Treten Probleme auf, beachten Sie das Kapitel **Fehlerbehebung** dieser Bedienungsanleitung.



Abbildung E.1

Heben und Senken des Bildschirms

Der Monitor kann im Hoch- und im Querformat gehoben und gesenkt werden. Fassen Sie den Monitor zu diesem Zweck auf beiden Seiten an und heben oder senken Sie ihn auf die gewünschte Höhe (**Abbildung RL.1**).

HINWEIS: Heben und senken Sie den Monitor vorsichtig.

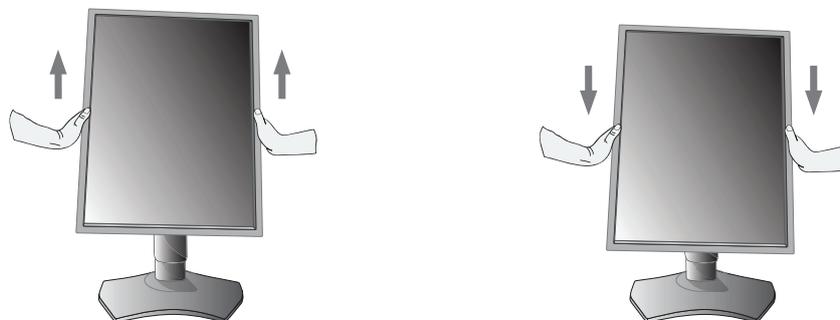


Abbildung RL.1

Bildschirmdrehung

Vor dem Drehen muss der Bildschirm in die höchste Position gehoben und geneigt werden, damit er nicht gegen den Tisch stößt und Sie sich nicht die Finger einklemmen. Ziehen Sie alle Kabel ab.

Fassen Sie den Monitor auf beiden Seiten an, und heben Sie ihn in die höchste Position (**Abbildung RL.1**).

Sie können den Bildschirm nun drehen, indem Sie den Monitor mit beiden Händen an den Seiten fassen und im Uhrzeigersinn aus dem Quer- in das Hochformat bzw. gegen den Uhrzeigersinn aus dem Hoch- in das Querformat drehen (**Abbildung R.1**).

Informationen dazu, wie Sie die Darstellung des OSD-Menüs zwischen Hoch- und Querformat umschalten, finden Sie im Abschnitt **Bedienelemente**.

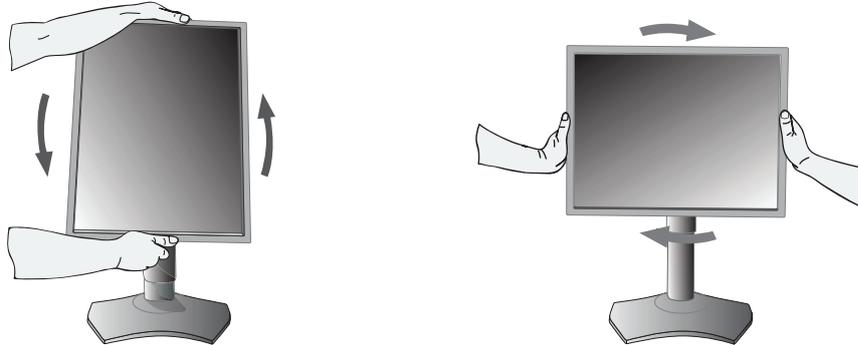


Abbildung R.1

Neigen

Fassen Sie den Monitor an beiden Seiten, und neigen Sie ihn nach Bedarf (**Abbildung TS.1**).



Abbildung TS.1

HINWEIS: Neigen Sie den Monitor vorsichtig.

Schwenken

Fassen Sie den Monitor an beiden Seiten, und schwenken Sie ihn nach Bedarf (**Abbildung TS.2**).



Abbildung TS.2

Installation auf einem Tragarm

Dieser LCD-Monitor kann mit einem Tragarm verwendet werden.

So bereiten Sie den Monitor für eine alternative Montage vor:

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Monitorhalterung.
- Die Sicherheitsvorschriften verlangen, dass der Monitor an einem Tragarm montiert wird, der das Gewicht des Monitors unterstützt. Auf Seite 21 finden Sie weitere Informationen. Entfernen Sie vor der Montage den Monitorfuß.

* Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Entfernen des Monitorfußes für die Montage

So bereiten Sie den Monitor für eine alternative Montage vor:

1. Ziehen Sie alle Kabel ab.
2. Fassen Sie den Monitor auf beiden Seiten, und heben Sie ihn in die höchste Position.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm um 90° gegen den Uhrzeigersinn in das Querformat gedreht ist (**Abbildung S.1**).
4. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass keine Belastung oder Druck auf den Frontsensor aufgebracht wird. Um dies zu vermeiden, legen Sie den Monitor mit der Display-Seite nach unten auf einen Tisch, wobei der Frontsensor über den Tischrand hinausragt (**Abbildung S.2**).
5. Schieben Sie die Kabelabdeckung nach oben.

HINWEIS: Die Kabelabdeckung kann nicht entfernt werden.

6. Legen Sie die Hand auf die Rückseite des Monitors, und heben Sie den Monitorfuß an.
7. Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der Monitor am Fuß befestigt ist. Entfernen Sie als erstes die beiden unteren Schrauben (**Abbildung S.2**).
8. Senken Sie den Fuß ab, und schieben Sie die Kabelabdeckung nach unten.
9. Entfernen Sie die 2 oberen Schrauben (**Abbildung S.3**).
Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den Fuß wieder zu befestigen.

HINWEIS: Entfernen Sie den Monitorfuß vorsichtig.

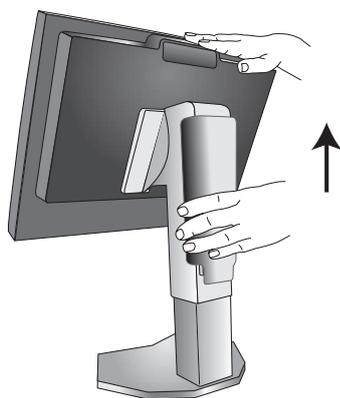


Abbildung S.1

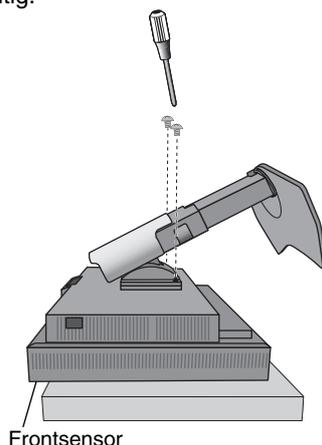


Abbildung S.2



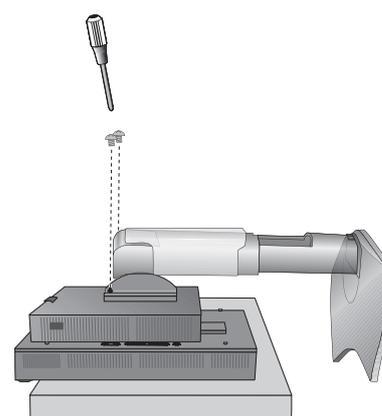


Abbildung S.3

Montage des Tragarms

1. Bringen Sie den Tragarm mit den 4 Schrauben am Monitor an, die Sie vom Fuß entfernt haben (**Abbildung F.1**).

- Vorsicht:**
- Der Monitor sollte nur auf einem zugelassenen Arm montiert werden, der beispielsweise mit einem TÜV GS-Zeichen versehen ist.
 - Verwenden Sie für die Montage die vom Monitorfuß entfernten Schrauben (4 Stück). Alternativ können Sie auch Schrauben der Größe M4 verwenden. Um Beschädigungen des Monitors zu vermeiden, dürfen diese nicht länger als die Dicke von Tragbügel und Unterlegscheibe + 10 mm sein. Das empfohlene Drehmoment beträgt 0,98 - 1,37 Nm.
 - Um die Luftzirkulation nicht zu behindern, halten Sie über und hinter dem Monitor ausreichend Abstand ein.

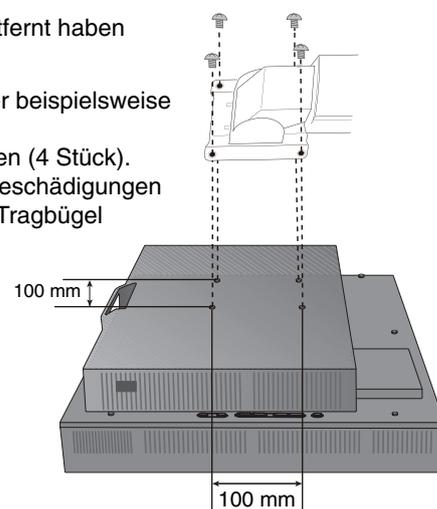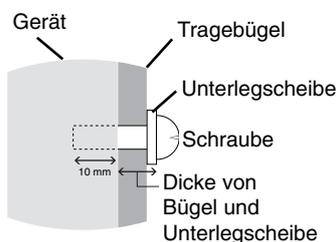

Gewicht des LCD-Monitors komplett: 7,5 kg

Abbildung F.1

Bedienelemente


Die OSD-Bedienelemente (On-Screen-Display) auf der Vorderseite des Monitors haben folgende Funktionen:

Um auf das OSD-Menü zuzugreifen, drücken Sie die Taste EXIT. Zum Wechseln des Signaleingangs drücken Sie die Taste SELECT.

Alle Tasten befinden sich auf der Rückseite des Monitors.

Die Tastenbeschreibung wird nach Drücken einer beliebigen Taste angezeigt, sofern das OSD-Steuerungsmenü nicht geöffnet ist.

HINWEIS: Zum Wechseln des Signaleingangs muss das OSD-Menü geschlossen werden.

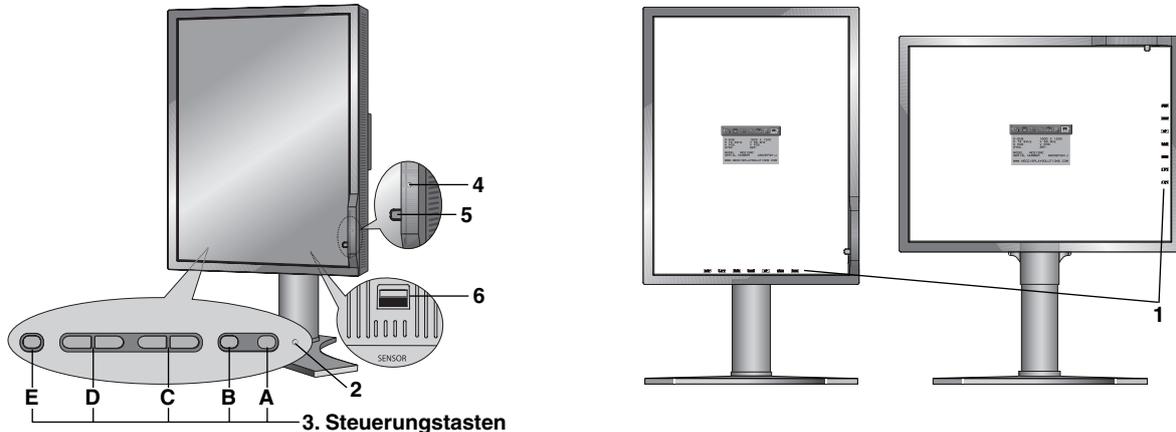

<p>1 TASTENBESCHREIBUNG</p>	<p>Die Tastenbeschreibung wird beim Zugriff auf das OSD-Steuerungsmenü automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Sie wird beim Drehen des OSD-Steuerungsmenüs ebenfalls gedreht. Verwenden Sie die Tasten gemäß den Hinweisen.</p> <p>HINWEIS: Die TASTENBESCHREIBUNG wird wie folgt dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> TASTENBESCHREIBUNG bei angezeigtem OSD-Menü. EXIT LEFT RIGHT DOWN UP SELECT RESET TASTENBESCHREIBUNG, wenn DIREKTZUGRIFF auf AUS eingestellt ist. EXIT MENU MENU MENU MENU INPUT QA TASTENBESCHREIBUNG, wenn DIREKTZUGRIFF auf EIN eingestellt ist. EXIT MENU MENU P.MODE P.MODE INPUT QA <p>Jede TASTENBESCHREIBUNG funktioniert wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> EXIT - Schließt ein OSD-Untermenü. Schließt das OSD-Steuerungsmenü. MENU - Zeigt das OSD-Menü an. P.MODE - Zeigt den BILDMODUS AN. SELECT - Wählt das Element aus. INPUT - Ändert die Eingangsquelle. RESET - Setzt das OSD auf die Werkseinstellungen zurück. QA - Zeigt das Testmuster für die Monitor-Kurz-QA an.
<p>2 LED</p>	<p>Zeigt an, dass der Strom eingeschaltet ist.</p>
<p>3 Steuerungstasten</p>	<p>A. Taste RESET HINWEIS: Drücken Sie außerhalb des OSD-Steuerungsmenüs die Taste RESET für mindestens 3 Sekunden, um das Testmuster für die Monitor-Kurz-QA (Graustufen) anzuzeigen und das Display zu überprüfen.</p> <p>B. Taste SELECT C. Taste AUF/AB D. Taste LINKS/RECHTS E. Taste EXIT</p>
<p>4 UMGEBUNGSLICHT-SENSOR</p>	<p>Ermittelt die Umgebungshelligkeit und bewirkt so eine automatische Anpassung verschiedener Monitoreinstellungen. Decken Sie diesen Sensor nicht ab (siehe Seite 17).</p>
<p>5 FRONTSSENSOR</p>	<p>Erkennt Änderungen der Luminanz des Monitors. Wird zur Stabilisierung der Luminanz sowie für eigenständige (Selbstkalibrierung, Gamma-Anpassung, DICOM-Messung) und netzwerkgesteuerte (Gamma-Anpassung, DICOM-Messung) Kalibrierungen und Konformitätstests eingesetzt.</p>
<p>6 SENSORANSCHLUSS</p>	<p>Für optionalen externen Sensor für die Selbstkalibrierung und das Kopieren der Kalibrierung.</p>

EINSTELLEN DER OSD-SPRACHE

- Legen Sie die OSD-Sprache vor Verwendung der OSD-Funktionen fest.
- Mithilfe der Bedientasten (LINKS/RECHTS, AUF/AB oder EXIT) können Sie auf das Menü SPRACHAUSWAHL zugreifen.
- Drücken Sie die Taste LINKS/RECHTS oder AUF/AB, um die gewünschte OSD-Sprache auszuwählen.
- Um das OSD-Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste EXIT.

HINWEIS: Das Einstellen der OSD-Sprache ist nur beim ersten Setup erforderlich. Die OSD-Sprache ändert sich nicht, solange sie nicht vom Benutzer umgestellt wird (**siehe Seite 14**).



Luminanz

LUMINANZ

Passt die allgemeine Luminanz für das normale und das Hintergrundbild an. Wenn die LUMINANZ angepasst wird, blinkt der numerische Wert.



Bildsteuerungen

LINKS/RECHTS

Steuert die horizontale Bildposition im Anzeigebereich des LCD.

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein digitales QXGA-Monochromsignal (1536 x 2048 oder 2048 x 1536) anliegt.

AUF/AB

Steuert die vertikale Bildposition im Anzeigebereich des LCD.

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein digitales QXGA-Monochromsignal (1536 x 2048 oder 2048 x 1536) anliegt.

EXPANSION

Legt die Zoom-Methode fest.

VOLL: Die Bilddarstellung wird unabhängig von der Auflösung auf die Vollbilddarstellung erweitert.

ASPEKT: Das Bild wird vergrößert, ohne das Seitenverhältnis zu ändern.

AUS: Die Bilddarstellung wird nicht erweitert.

INDIV.: Ausführliche Anweisungen finden Sie im erweiterten OSD-Menü.

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein digitales QXGA-Monochromsignal (1536 x 2048 oder 2048 x 1536) anliegt.



BILDMODUS

BILDMODUS

Wählen Sie den Bildmodus, der sich am besten für den angezeigten Inhalt eignet. Es stehen zwei Optionen für den BILDMODUS zur Auswahl. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweitertes OSD-Menü, Menüpunkt 1: BILDMODUS“ (Seite 17) und „Verwenden der Funktion BILDMODUS“ (Seite 15).



Werkzeuge

SCHÄRFE

Mit dieser Funktion wird die durchgehende Schärfe des Bildes auf digitalem Wege gewährleistet. Die Einstellung erfolgt stufenlos zu schärferen oder weicheren Konturen und kann für unterschiedliche Timings separat vorgenommen werden.

BILDROTATION

AUTO: Das angezeigte Bild dreht sich automatisch entsprechend der Ausrichtung des Monitors. BILDROTATION ist standardmäßig auf AUTO eingestellt.

QUERFORM.: Das dargestellte Bild wird nicht gedreht.

HOCHFORM.: Das angezeigte Bild ist gedreht.

EDID AUSWAHL

Bei der Kommunikation mit der Signalquelle (Computer) via EDID* wird das bevorzugte Signaltiming für den Monitor bereitgestellt.

AUTO: Das bevorzugte Timing hängt von der physischen Ausrichtung des Monitors ab. Querformat: 2048 x 1536 Pixel, Hochformat: 1536 x 2048 Pixel. Ein Sensor erkennt die Ausrichtung automatisch.

QUERFORM.: Hier wird das bevorzugte Timing für das Querformat festgelegt: 2048 x 1536 Pixel.

HOCHFORM.: Hier wird das bevorzugte Timing für das Hochformat festgelegt: 1536 x 2048 Pixel.

HINWEIS: Treten Probleme auf, beachten Sie den Abschnitt **Fehlerbehebung** dieser Bedienungsanleitung.

Wenn die EDID AUSWAHL geändert wurde, muss der angeschlossene Computer neu gestartet werden, um diese Änderung zu übernehmen.

* EDID: Der Monitor informiert das Betriebssystem auf dem Computer über seine Kennwerte, Funktionen und Videotimingmodi gemäß dem EDID-Standard (Extended Display Identification Data, erweiterte Bildschirmidentifizierungsdaten).

SIGNALPRIORITÄT

Hier wird die Signalpriorität bei mehreren Videosignalquellen festgelegt.

ERSTE: Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor nach einem anderen Videosignal von einer anderen Videoquelle. Wenn die andere Videoquelle ein Signal ausgibt, wechselt der Monitor automatisch zur neuen Videoquelle. Der Monitor sucht erst wieder nach anderen Videosignalen, wenn das aktuelle Videosignal nicht mehr verfügbar ist.

LETZTE: Zeigt der Monitor ein Signal der aktuellen Videoquelle an und wird eine neue sekundäre Videoquelle eingespeist, schaltet der Monitor automatisch auf die neue Signalquelle um. Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor nach einem anderen Videosignal von einer anderen Videoquelle. Wenn die andere Videoquelle ein Signal ausgibt, wechselt der Monitor automatisch zur neuen Videoquelle.

KEINE: Der Monitor sucht nur nach anderen Videoquellen, wenn er über die Netztaaste aus- und wieder eingeschaltet wurde.

SCHLAFMODUS

Der Intelligent Power Manager (IPM) im Betriebssystem des Computers sorgt dafür, dass der Monitor nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Benutzereingaben in den Energiesparmodus übergeht.

Der SCHLAFMODUS verfügt über drei Einstellungen.

AUS: Wenn das Eingangssignal ausbleibt, schaltet der Monitor nicht in den Energiesparmodus.

STANDARD: Wenn das Eingangssignal ausbleibt, schaltet der Monitor automatisch in den Energiesparmodus.

OPTION: Der Monitor schaltet automatisch in den Energiesparmodus, wenn die Umgebungshelligkeit unter den vom Benutzer vorgegebenen Wert fällt. Der gewünschte Wert kann mit der Einstellung für den SCHLAFMODUS in Menüpunkt 5 des erweiterten OSD-Menüs angepasst werden.

Im Energiesparmodus blinkt die LED auf der Rückseite des Monitors gelb. Drücken Sie im Energiesparmodus auf eine der Tasten (außer POWER und SELECT), um in den normalen Modus zurückzukehren.

Wenn die Umgebungshelligkeit wieder normale Werte erreicht, kehrt der Monitor automatisch in den normalen Modus zurück.

QA TEST

Ermöglicht eine schnelle tägliche Sichtprüfung der Bildqualität dieses Diagnosemonitors durch Drücken einer Taste am Monitor.



MENÜ Werkzeuge

SPRACHE

Die OSD-Steuerungsmenüs sind in neun Sprachen verfügbar.

OSD LINKS/RECHTS

Sie können festlegen, wo das OSD-Steuerungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die Position des OSD-Steuerungsmenüs kann nach links oder rechts verschoben werden.

OSD AUF/AB

Sie können festlegen, wo das OSD-Steuerungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die Position des OSD-Steuerungsmenüs kann nach oben oder unten verschoben werden.

OSD ANZEIGEDAUER

Das OSD-Steuerungsmenü wird ausgeblendet, wenn es nicht mehr verwendet wird. Sie können festlegen, nach welchem Zeitraum das OSD-Steuerungsmenü geschlossen wird, wenn der Benutzer keine Taste drückt. Die Voreinstellungen reichen von 10 – 120 Sekunden in 5-Sekunden-Abständen.

OSD ABSCHALTUNG

Diese Steuerung sperrt den Zugriff auf alle Funktionen der OSD-Steuerungen. Wenn Sie im Modus OSD ABSCHALTUNG auf die OSD-Steuerungen zugreifen, wird ein Bildschirm angezeigt, der auf die Sperre dieser Steuerungen hinweist.

Es gibt drei Arten der OSD ABSCHALTUNG:

OSD ABSCHALTUNG ohne Steuerung: Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu aktivieren, halten Sie die Tasten SELECT und RECHTS gleichzeitig gedrückt. Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu deaktivieren, halten Sie die Tasten SELECT und RECHTS gleichzeitig gedrückt, während Sie sich im OSD-Menü befinden. Im Modus OSD ABSCHALTUNG können keine Steuerungen angepasst werden.

OSD ABSCHALTUNG mit (nur) LUMINANZ-Steuerung: Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu aktivieren, halten Sie die Tasten SELECT, AB und LINKS gleichzeitig gedrückt. Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu deaktivieren, halten Sie die Tasten SELECT, AB und LINKS gleichzeitig gedrückt, während Sie sich im OSD-Menü befinden. In diesem OSD ABSCHALTUNG-Modus kann die LUMINANZ angepasst werden.

INDIV.: Informationen hierzu finden Sie im erweiterten OSD-Menü.

DIREKTZUGRIFF

Wenn diese Funktion auf EIN gestellt ist, zeigt die TASTENBESCHREIBUNG zwei Steuerungstasten für den BILDMODUS an. Unter Verwendung einer der Steuerungstasten für den BILDMODUS können Sie mit den Steuerungstasten LINKS und RECHTS rasch zwischen zwei vom Benutzer voreingestellten BILDMODI umschalten, ohne dass das OSD geöffnet werden muss.

WERKSEINSTELLUNGEN

Mit der Option WERKSEINSTELLUNGEN können Sie OSD-Einstellungen (LUMINANZ, BILDSTEUERUNG, BILDMODUS, SCHÄRFTE, SCHLAFMODUS, OSD LINKS/RECHTS, OSD AUF/AB, OSD ANZEIGEDAUER) auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Einzelne Einstellungen können durch Markieren der betreffenden Steuerung und anschließendes Drücken der Taste RESET zurückgesetzt werden.



Information

Stellt Informationen zur aktuellen Auflösung sowie technische Daten wie verwendetes Signaltiming, horizontale und vertikale Frequenz bereit. Gibt den Modellnamen und die Seriennummer des Monitors an.

OSD-Warnung

Die Menüs der OSD-Warnungen können über die Taste EXIT ausgeblendet werden.

KEIN SIGNAL: Diese Funktion gibt eine Warnung aus, wenn kein horizontales oder vertikales Sync-Signal verfügbar ist. Das Meldungsfenster **Kein Signal** wird nach dem Einschalten oder einem Wechsel des Eingangssignals angezeigt.

FREQUENZ ZU HOCH: Diese Funktion empfiehlt die optimale Auflösung und Bildwiederholrate. Nach dem Einschalten, nach einer Änderung des Eingangssignals oder wenn das Videosignal nicht das richtige Timing aufweist, wird das Meldungsfenster **Frequenz zu hoch** angezeigt.

LEBENSDAUER LAMPEN: Bei 1000/500/0 Stunden geschätzter verbleibender Lebensdauer der Lampen wird eine Warnung ausgegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn diese Warnung angezeigt wird.

LUMINESZENZ-WARNUNG: Diese Warnung zeigt an, dass der Monitor die vom Benutzer eingestellten Luminanzstufen nicht einhalten kann. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn diese Warnung angezeigt wird.

Wenn Sie detaillierte Informationen über die Bedienelemente wünschen, ziehen Sie das erweiterte OSD-Menü zurate.

Verwenden der Funktion BILDMODUS

Wählen Sie den Bildmodus, der sich am besten für den angezeigten Inhalt eignet.

Folgende Modi stehen zur Verfügung: USER1, 2.

- Jeder BILDMODUS enthält Einstellungen für LUMINANZ, GAMMA, SCHWARZ und AMBIENT LIGHT COMP. Sie können diese Einstellungen in Menüpunkt 1 des erweiterten OSD ändern.
- Wenn der BILDMODUS gesperrt ist, wird auf dem Bildschirm BILDMODUS IST GESPERRT angezeigt. Um den BILDMODUS zu entsperren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten SELECT und AUF. Sie können die Einstellungen für den BILDMODUS auch unter OSD ABSCHALTUNG in Menüpunkt 6 des erweiterten OSD entsperren.

Testfunktion für Monitor-Kurz-QA

Ermöglicht dem Monitor die Anzeige eines internen Testmusters, das AAPM TG18-QC ähnelt, ohne eine externe Signalquelle zu verwenden. Diese integrierte Methode ermöglicht eine schnelle Sichtprüfung sowie eine Überprüfung der Graustufen gemäß DICOM.

- Wenn der Monitor an eine Videosignalquelle (Computer) angeschlossen ist:

Vergewissern Sie sich, dass kein OSD-Menü angezeigt wird, und halten Sie anschließend die Taste RESET länger als 3 Sekunden gedrückt, oder drücken Sie die Taste RESET zweimal. Daraufhin wird zuerst das Testmuster auf dem Bildschirm angezeigt und anschließend die DICOM-MESSUNG-Routine gestartet, sofern GAMMA im BILDMODUS auf DICOM gestellt ist. Berücksichtigen Sie, dass der Monitor mindestens 30 Minuten warmlaufen muss, damit dieser Test gültige Ergebnisse erzielt. Das Testmuster verdeckt das Bild von der Signalquelle.

Nach Abschluss der Messungen mit dem Frontsensor wird das Ergebnis angezeigt.

Am Ergebnis für MAX. GSDF - FEHLER (in %) lässt sich rasch die Graustufenqualität im Vergleich mit der idealen DICOM-Kurve ablesen. Je nach dem in Ihrem Land gebräuchlichen QA-Standard können andere GSDF-Fehlergrenzwerte gelten. Vergleichen Sie das Testergebnis mit den lokal geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Sie können nun die Graustufen und die Gesamtqualität des Bildes sichtprüfen.

Um den Modus QA TEST zu verlassen, drücken Sie die Taste EXIT. Anschließend wird auf dem Monitor wieder das Bild der Videosignalquelle angezeigt.

- Wenn der Monitor nicht an eine Videosignalquelle angeschlossen ist:


Vergewissern Sie sich, dass nur die Meldung KEIN SIGNAL angezeigt wird, und halten Sie anschließend die Taste RESET länger als 3 Sekunden gedrückt. Daraufhin wird zuerst das Testmuster auf dem Bildschirm angezeigt und anschließend die DICOM-MESSUNG-Routine gestartet, sofern GAMMA im BILDMODUS auf DICOM gestellt ist. Berücksichtigen Sie, dass der Monitor mindestens 30 Minuten warmlaufen muss, damit dieser Test gültige Ergebnisse erzielt.

Nach Abschluss der Messungen mit dem Frontsensor wird das Ergebnis angezeigt.

Am Ergebnis für MAX. GSDF - FEHLER (in %) lässt sich rasch die Graustufenqualität im Vergleich mit der idealen DICOM-Kurve ablesen. Je nach dem in Ihrem Land gebräuchlichen QA-Standard können andere GSDF-Fehlergrenzwerte gelten. Vergleichen Sie das Testergebnis mit den lokal geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Sie können nun die Graustufen sichtprüfen und sie mit dem Messergebnis vergleichen.

Um den Modus QA TEST zu verlassen, drücken Sie die Taste EXIT.

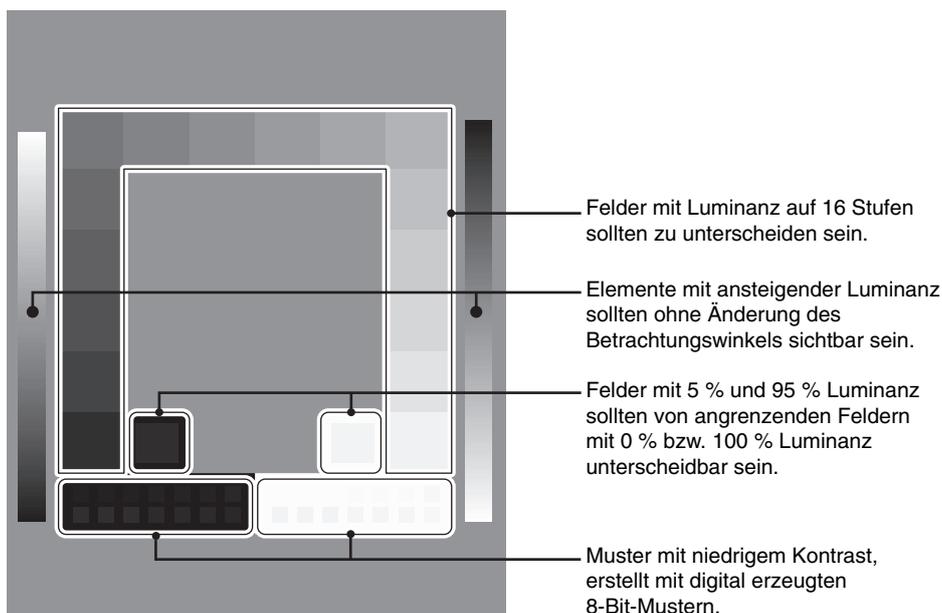

Erweitertes OSD

<Verwendung des erweiterten OSD>

- Wenn sowohl das OSD als auch die Tastenbeschreibung abgeschaltet sind, drücken Sie zweimal gleichzeitig die Tasten RESET und EXIT.
- Das erweiterte OSD wird angezeigt.
Dieses Menü ist größer als das normale OSD und ist in die Menüpunkte 1 bis 9 gegliedert.

<Verlassen des erweiterten OSD>

- Drücken Sie die Taste EXIT.

Um eine Einstellung vorzunehmen, markieren Sie den entsprechenden Menüpunkt und drücken SELECT.

Zur Auswahl eines anderen Menüpunkts drücken Sie EXIT und anschließend LINKS oder RECHTS, um den gewünschten Menüpunkt zu markieren.

Menüpunkt 1	PICTURE MODE (BILDMODUS)	Wählt einen von zwei möglichen Optionen für den BILDMODUS aus.
	LUMINANCE (LUMINANZ)	Passt die Bild- und Hintergrund-Luminanz des Bildschirms an. Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um die Einstellung anzupassen. Wenn die LUMINANZ auf eine neue Stufe eingestellt wird, blinkt der numerische Wert, bis die Luminanz den Zielwert erreicht.
	GAMMA	Wählt den gewünschten Gamma*-Korrekturwert für den Monitor aus. Die LUT wird anhand der werksseitigen Kalibrierungsdaten für jeden einzelnen Monitor berechnet. Es stehen sechs Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: KEINE KORREKTUR, DICOM, LINEARE ERFASSUNG, L Star, INDIV. und PROGRAMMIERBAR. KEINE KORREKTUR: Keine Gammakorrektur aktiv. DICOM: DICOM GSDF (Grayscale Standard Display Function). LINEARE ERFASSUNG: Die Luminanz wird logarithmisch entsprechend der linearen Helligkeitsunterschiede geändert. L Star: GAMMA-Einstellung für eciRGB_v2 und den Lab-Farbraum. INDIV.: Dies wird als der von Ihnen ausgewählte numerische Wert angezeigt. Der Gammawert kann auf einen Wert zwischen 1,0 und 3,0 (in Schritten von 0,1) festgelegt werden. PROGRAMMIERBAR: Die Gammakorrektur (Anzeigefunktion) kann mithilfe der QA-Software NEC GammaCompMD geändert werden. Wird für die DICOM-Kalibrierung gemäß DICOM Teil 14 verwendet. *Gamma: Der Gammawert bezeichnet die Verteilung der Luminanz im Intensitätsspektrum durch den Monitor; er ist das Verhältnis zwischen der Signal-Eingangsspannung und der resultierenden Intensität der Beleuchtung auf dem Monitor. Ein absolut lineares Gerät verfügt über einen Gammawert von 1,0. Mithilfe einer Gammakorrektur gemäß DICOM Teil 14 wird die Luminanz des Monitors angepasst, sodass Graustufen angezeigt werden, die dem menschlichen Auge linear erscheinen.
	CUSTOM VALUE (BENUTZERDEFINIERTER WERT)	Der BENUTZERDEFINIERTER WERT kann angepasst werden, wenn für GAMMA die Option INDIV. festgelegt wird. Der Gammawert kann auf einen Wert zwischen 1,0 und 3,0 (in Schritten von 0,1) festgelegt werden.
	BLACK (SCHWARZ)	Passt die Schwarzluminanz an. Wenn die ausgewählten Einstellungen zu niedrig sind, um angezeigt zu werden, blinkt die Anzeige im OSD.
	AMBIENT LIGHT COMP.	Korrigiert unter Berücksichtigung der Umgebungsbeleuchtung die Luminanz und den Gammawert, sodass diese den vom Benutzer eingestellten Werten entsprechen. AUS: Keine Kompensation der Umgebungsbeleuchtung. 1: Die Kompensation basiert auf den Auswirkungen des Umgebungslichts, das während der Kalibrierung gemessen wurde. 2: Die Kompensation basiert auf den Auswirkungen des Umgebungslichts, wobei das Umgebungslicht fortlaufend gemessen wird.
	Menüpunkt 2	Diese Funktion kann nicht angepasst werden.
Menüpunkt 3	DVI Long Cable (Langes DVI-Kabel) (nur DVI-Eingang)	Gleicht Bildverschlechterungen aus, die von der Benutzung eines langen DVI-Kabels herrühren. Es gibt 4 mögliche Einstellungen: „0“ entspricht dem geringsten Kompensationsgrad, „3“ dem höchsten. Die Standardeinstellung ist „1“.

*2 Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein digitales QXGA-Monochromsignal (1536 x 2048 oder 2048 x 1536) anliegt.

Menüpunkt 4	H.POSITION* ²	Steuert die horizontale Bildposition im Anzeigebereich des LCD. Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um die Einstellung anzupassen.
	V.POSITION* ²	Steuert die vertikale Bildposition im Anzeigebereich des LCD. Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um die Einstellung anzupassen.
	H.RESOLUTION (H.AUFLÖSUNG)* ²	Durch Erhöhen oder Verringern des Werts wird das Bild breiter bzw. schmaler. Drücken Sie die Taste RECHTS, um die Breite des angezeigten Bildes zu vergrößern. Drücken Sie die Taste LINKS, um die Breite des angezeigten Bildes zu reduzieren.
	V.RESOLUTION (V.AUFLÖSUNG)* ²	Durch Erhöhen oder Verringern des Werts wird das Bild höher bzw. flacher. Drücken Sie die Taste RECHTS, um die Höhe des angezeigten Bildes zu vergrößern. Drücken Sie die Taste LINKS, um die Höhe des angezeigten Bildes zu reduzieren.
	EXPANSION* ²	Legt die Zoom-Methode fest. VOLL: Das Bild wird unabhängig von der Auflösung auf die Vollbilddarstellung erweitert. ASPEKT: Das Bild wird vergrößert, ohne das Seitenverhältnis zu ändern. AUS: Das Bild wird nicht ausgedehnt. INDIV.: Wenn INDIV. als Expansionsmodus ausgewählt wird, können die Werte für H. ZOOM, V. ZOOM und ZOOM-POS angepasst werden.
	H. ZOOM (verfügbar nur im individuellen Expansionsmodus)	Das Bild wird 1- bis 3-mal in Schritten von 0,01 in horizontaler Richtung (H. EXPANSION) erweitert.
	V. ZOOM (verfügbar nur im individuellen Expansionsmodus)	Das Bild wird 1- bis 3-mal in Schritten von 0,01 in vertikaler Richtung (V. EXPANSION) erweitert.
	ZOOM-POS (verfügbar nur im individuellen Expansionsmodus)	Mit dieser Einstellung wird der Punkt festgelegt, von dem aus das Bild bei der Verwendung von H. ZOOM oder V. ZOOM als Expansionsmethode gedehnt wird. Die verfügbaren Optionen sind MITTE und OBEN LINKS. MITTE: Mit H. ZOOM wird das Bild vom Mittelpunkt aus zu den Seiten des Bildschirms ausgedehnt. Mit V. ZOOM wird das Bild vom Mittelpunkt aus zum oberen und unteren Rand des Bildschirms ausgedehnt. OBEN LINKS: Legt den Ausgangspunkt für die Bildexpansion fest (OBEN für V. ZOOM, LINKS für H. ZOOM). Wenn bei der aktuellen Auflösung der Bildschirm nicht ausgefüllt ist, wird das Bild bei der Ausdehnung nicht über den oberen bzw. linken Rand des Bildschirms hinaus ausgedehnt. Der rechte und der untere Bildschirmrand können hingegen überschritten werden.
Menüpunkt 5	SHARPNESS (SCHÄRFE)	Dies ist eine digitale Funktion, die bei allen Signaltimings ein scharfes Bild gewährleistet. Die Funktion nimmt ständig Anpassungen vor, um die gewünschten schärferen bzw. weicheren Konturen beizubehalten, und wird für unterschiedliche Timings separat eingestellt. Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um die Einstellung anzupassen.
	VIDEO DETECT (SIGNAL-PRIORITÄT)* ¹	Hier wird die Signalpriorität bei mehreren Videosignalquellen festgelegt. Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um eine Option auszuwählen. ERSTE: Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor nach einem anderen Videosignal von einer anderen Videoquelle. Wenn die andere Videoquelle ein Signal ausgibt, wechselt der Monitor automatisch zur neuen Videoquelle. Der Monitor sucht erst wieder nach anderen Videosignalen, wenn das aktuelle Videosignal nicht mehr verfügbar ist. LETZTE: Zeigt der Monitor ein Signal der aktuellen Videoquelle an und wird eine neue sekundäre Videoquelle eingespeist, schaltet der Monitor automatisch auf die neue Signalquelle um. Ist das ausgewählte Videoeingangssignal nicht verfügbar, sucht der Monitor nach einem anderen Videosignal von einer anderen Videoquelle. Wenn die andere Videoquelle ein Signal ausgibt, wechselt der Monitor automatisch zur neuen Videoquelle. KEINE: Der Monitor sucht nur nach anderen Videoquellen, wenn er über die Netztaaste aus- und wieder eingeschaltet wurde.
	OFF MODE (SCHLAFMODUS)	Der Intelligent Power Manager (IPM) im Betriebssystem des Computers sorgt dafür, dass der Monitor nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Benutzereingaben in den Energiesparmodus übergeht. Der SCHLAFMODUS verfügt über drei Einstellungen. AUS: Wenn das Eingangssignal ausbleibt, schaltet der Monitor nicht in den Energiesparmodus. STANDARD: Wenn das Eingangssignal ausbleibt, schaltet der Monitor automatisch in den Energiesparmodus. OPTION: Der Monitor schaltet automatisch in den Energiesparmodus, wenn die Umgebungshelligkeit unter den vom Benutzer vorgegebenen Wert fällt.

*1 Dieses Element wird durch WERKSEINSTELLUNGEN nicht zurückgesetzt.

*2 Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein digitales QXGA-Monochromsignal (1536 x 2048 oder 2048 x 1536) anliegt.

	OFF MODE SETTING (EINSTELLUNG SCHLAFMODUS)	Passt den Wert von LUMINANZ für den SCHLAFMODUS an. Zeigt den Luminanzpegel an.
	RESPONSE IMPROVE (REAKTIONS- VERBESSERUNG)* ¹	Schaltet die Funktion REAKTIONSVERBESSERUNG ein bzw. aus. Mit dieser Funktion können Unschärfen, die bei einigen bewegten Bildern auftreten können, reduziert werden. Wenn der Monitor im Hochformat verwendet wird, ist diese Funktion deaktiviert.
	SIDE BORDER (SEITENRAND)	Hiermit lässt sich die Farbe der seitlichen Balken von Schwarz in Weiß ändern.
	LED BRIGHTNESS (LED-HELLIGKEIT)* ¹	Stellt die Helligkeit der Netzstrom-LED am Monitor ein.
	UNIFORMITY (GLEICHMÄSSIGKEIT)* ¹	Diese Funktion kompensiert elektronisch leichte Abweichungen beim Weißabgleich, die im gesamten Anzeigebereich des Bildschirms auftreten können. Diese Abweichungen sind typisch für die LCD-Bildschirmtechnologie. Diese Funktion sorgt für den Luminanzabgleich des Bildschirms. Die GLEICHMÄSSIGKEIT kann auf AUS, NIEDRIG und HOCH gestellt werden. HINWEIS: Mithilfe der Funktion GLEICHMÄSSIGKEIT wird die maximale Luminanz des Bildschirms verringert. Wenn eine höhere Luminanz wichtiger als eine gleichmäßige Bildschirmleistung ist, sollte diese Funktion deaktiviert werden. Ein höherer Wert wirkt sich günstiger auf die Gleichmäßigkeit aus, kann jedoch auch das KONTRASTVERHÄLTNIS verringern.
	QA TEST* ¹	Ermöglicht eine schnelle tägliche Sichtprüfung der Bildqualität dieses Diagnosemonitors durch Drücken einer Taste am Monitor. Siehe Seite 16.
Menüpunkt 6	LANGUAGE (SPRACHE)* ¹	Die OSD-Steuerungsmenüs sind in neun Sprachen verfügbar. Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um eine Option auszuwählen.
	OSD H.POSITION (OSD H-LAGE)	Sie können festlegen, wo das OSD-Steuerungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Die Position des OSD-Steuerungsmenü kann nach links oder rechts verschoben werden.
	OSD V.POSITION (OSD V-LAGE)	Sie können festlegen, wo das OSD-Steuerungsmenü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Das Menü kann manuell nach oben oder unten verschoben werden.
	OSD TURN OFF (OSD ANZEIGEDAUER)	Das OSD-Steuerungsmenü wird ausgeblendet, wenn es nicht mehr verwendet wird. Sie können festlegen, nach welchem Zeitraum das OSD-Steuerungsmenü ausgeblendet wird, wenn der Benutzer keine Taste drückt. Die Voreinstellungen reichen von 10 – 120 Sekunden in 5-Sekunden-Abständen.
	OSD LOCK OUT (OSD ABSCHALTUNG)* ¹	Diese Steuerung sperrt den Zugriff auf alle Funktionen der OSD-Steuerungen. Wenn Sie im Modus OSD ABSCHALTUNG auf die OSD-Steuerungen zugreifen, wird ein Bildschirm angezeigt, der auf die Sperre dieser Steuerungen hinweist. Es gibt drei Arten der OSD ABSCHALTUNG: OSD ABSCHALTUNG ohne Steuerung: Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu aktivieren, halten Sie die Tasten SELECT und RECHTS gleichzeitig gedrückt. Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu deaktivieren, halten Sie die Tasten SELECT und RECHTS gleichzeitig gedrückt, während Sie sich im OSD-Menü befinden. Im Abschaltungsmodus können keine Steuerungen angepasst werden. OSD ABSCHALTUNG mit (nur) LUMINANZ-Steuerung: Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu aktivieren, halten Sie die Tasten SELECT, AB und LINKS gleichzeitig gedrückt. Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu deaktivieren, halten Sie die Tasten SELECT, AB und LINKS gleichzeitig gedrückt, während Sie sich im OSD-Menü befinden. Im Abschaltungsmodus kann die LUMINANZ angepasst werden. INDIV.: Drücken Sie RESET und EXIT, um das Menü INDIV. zu öffnen. Wählen Sie FREIGEGEREN oder GESPERRT für EINGANGSAUSWAHL, LUMINANZ, BILDMODUS, WARNUNG (OSD ABSCHALTUNG). Um die Funktion OSD ABSCHALTUNG zu deaktivieren, drücken Sie die Tasten RESET und EXIT, bis die Abschaltungswarnung angezeigt wird. Drücken Sie SELECT, SELECT, LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS, EXIT.
	BOOT LOGO* ¹	Das NEC-Logo wird nach dem Einschalten des Monitors kurz angezeigt. Diese Funktion kann im OSD ein- oder ausgeschaltet werden. Hinweis: Halten die Taste EXIT bei angezeigtem NEC-Logo gedrückt, wird das BOOT LOGO-Menü angezeigt. Sie können die BOOT LOGO-Einstellung ausschalten.
	SIGNAL INFORMATION (SIGNALINFORMATIONEN)* ¹	Die Signalinformation kann in der Bildschirmecke angezeigt werden. Die Einstellung kann auf EIN und AUS gesetzt werden.
	HOT KEY (DIREKTZUGRIFF)* ¹	Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der BILDMODUS über die Steuerungstasten ausgewählt werden, ohne dass das OSD-Menü aufgerufen werden muss.

*¹ Dieses Element wird durch WERKSEINSTELLUNGEN nicht zurückgesetzt.

	FACTORY PRESET (WERKSEINSTELLUNGEN)	Mit der Option WERKSEINSTELLUNGEN können Sie alle OSD-Einstellungen auf die werkseitig voreingestellten Werte zurücksetzen, ausgeschlossen davon sind die durch *1 gekennzeichneten Werte. Wenn Sie eine bestimmte OSD-Menüoption markieren und RESET drücken, wird nur diese Einstellung zurückgesetzt.
Menüpunkt 7	GRAYSCALE MODE (GRAUSTUFEN-MODUS)	Diese Funktion ändert das angezeigte Bild in monochrom. Es gibt vier Arten von Einstellungen. AUS: Zeigt ein Farbsignal in Graustufen an. MODUS1: Der Signaleingang ist monochrom, 8 Bit. Der Monitor zeigt ein Graustufenbild an. In diesem Modus wird nur der Grün-Kanal des RGB-Eingangssignals verwendet. MODUS2: Der Eingang erfolgt in RGB-Farbe, doch der Monitor ändert den Farbraum in YUV. Das dargestellte Bild wird monochrom. Nur die Y-Daten werden von der R/G/B LUT durchgeleitet. 10BIT: Der Signaleingang ist monochrom, 10 Bit. Der Monitor zeigt ein Graustufenbild an. Dieser Modus wird mit bestimmten Grafikkarten verwendet. Wird ein 10-Bit-Monochrom-Eingangssignal in QXGA-Auflösung (1536 x 2048 oder 2048 x 1536) eingespeist, so wird automatisch 10BIT festgelegt; dies kann nicht geändert werden.
	OSD ROTATION	AUTO: Das OSD dreht sich bei Drehen des Monitors automatisch. OSD ROTATION ist standardmäßig auf AUTO eingestellt. QUERFORM.: Das OSD wird im Querformat angezeigt. HOCHFORM.: Das OSD wird im Hochformat angezeigt.
	IMAGE ROTATION (BILDROTATION)*1	AUTO: Das angezeigte Bild dreht sich automatisch entsprechend der Ausrichtung des Monitors. BILDROTATION ist standardmäßig auf AUTO eingestellt. QUERFORM.: Die dargestellte Bild wird nicht gedreht. HOCHFORM.: Das angezeigte Bild ist gedreht.
	EDID SELECTION (EDID AUSWAHL)*1	Bei der Kommunikation mit der Signalquelle (Computer) via EDID* wird das bevorzugte Signaltiming für den Monitor bereitgestellt. AUTO: Das bevorzugte Timing hängt von der physischen Ausrichtung des Monitors aus. Querformat: 2048 x 1536 Pixel, Hochformat: 1536 x 2048 Pixel. Ein Sensor erkennt die Ausrichtung automatisch. QUERFORM.: Hier wird das bevorzugte Timing für das Querformat festgelegt: 2048 x 1536 Pixel. HOCHFORM.: Hier wird das bevorzugte Timing für das Hochformat festgelegt: 1536 x 2048 Pixel. Hinweis: Treten Probleme auf, beachten Sie den Abschnitt Fehlerbehebung dieser Bedienungsanleitung. Wenn die EDID AUSWAHL geändert wurde, muss der angeschlossene Computer neu gestartet werden, um diese Änderung zu übernehmen.
	DDC/CI	DDC/CI FREIGEgeben/GESPERRT: Schaltet die 2-Wege-Kommunikation und die Steuerung des Monitors über das DDC/CI-Protokoll ein oder aus.
Menüpunkt 8	STAND ALONE CALIBRATION (EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG)*1	Wählt den Kalibrierungsmodus (Seite 24).
	SELF TEST MODE (SELBSTTESTMODUS)*1	Zeigt einen komplett weißen Bildschirm an. Wird beim Kopieren der Kalibrierung verwendet.
	FAN CONTROL (VENTILATORS-TEUERUNG)	Durch eingebaute Lüfter wird die Temperatur im Innern des Monitors gesenkt. AUTO: Temperaturabhängiger Lüfterbetrieb. EIN: Permanenter Lüfterbetrieb. Es wird dringend empfohlen, diese Einstellung zu aktivieren, wenn der Monitor in großen Höhenlagen eingesetzt wird.
	TEMPERATURE (TEMPERATUR)*1	Die aktuelle Innentemperatur wird in Grad (C) angezeigt.
	BACKLIGHT LIFETIME (LEBENSDAUER LAMPEN)*1	Hier wird die geschätzte Lebensdauer der Lampen im Monitor angezeigt. Die Lebensdauer der Lampen hängt hauptsächlich von den gewünschten Kalibrierungseinstellungen ab. Je niedriger die Kalibrierungseinstellung, desto länger ist die geschätzte Lebensdauer der Lampen.
	HOURS RUNNING (BETRIEBSZEIT)*1	Zeigt die Gesamtbetriebszeit an.
	ILLUMINANCE (BELEUCHTUNG)*1	Zeigt den vom Umgebungslichtsensor berechneten Lux-Wert an. Der Wert von ILLUMINANCE (BELEUCHTUNG) hängt vom Typ und der Position der Lichtquelle ab. Er kann von dem Wert abweichen, der mit dem Illuminanzmessgerät gemessen wurde.
Menüpunkt 9	INFORMATION*1	Enthält Informationen zur aktuellen Bildschirmauflösung. Stellt ferner technische Daten wie aktuell verwendetes Signaltiming, horizontale und vertikale Frequenz bereit.

*1 Dieses Element wird durch WERKSEINSTELLUNGEN nicht zurückgesetzt.

Technische Daten

Monitordaten		Monitor MD211G3	Hinweise
LCD-Modul	Diagonal: Sichtbare Bildgröße: Native Auflösung (Pixelzahl):	54,0 cm/21,3 Zoll 54,0 cm/21,3 Zoll 1536 x 2048 (Hochformat) 2048 x 1536 (Querformat)	Aktivmatrix; Flüssigkristallanzeige (LCD) in Dünnschichttransistortechnologie (TFT); SA-SFT (IPS); Punktabstand 0,212 mm; 1450 cd/m ² maximale Luminanz; 400 cd/m ² kalibrierte Luminanz; Kontrastverhältnis 900:1 (typisch).
Eingangssignal			
DisplayPort:	DisplayPort-Anschluss:	Digital RGB	DisplayPort entspricht Standard V1.1a, anwendbar für HDCP
DVI:	DVI-D (24-polig):	Digital RGB	DVI
Monitorfarbtöne		10 Bit: 1024 (10 Bit) Graustufen aus einer Palette von 48961 (15,5 Bit) 8 Bit: 256 (8 Bit) Graustufen aus einer Palette von 48961 (15,5 Bit)	Bei Verwendung mit einer von NEC geprüften 10-Bit-Grafikkarte Bei Verwendung mit einer von NEC geprüften 8-Bit-Grafikkarte
Synchronisationsbereich		Horizontal: 31,5 kHz bis 99,4 kHz, 126,3 kHz Vertikal: 30 Hz, 50 Hz bis 85 Hz	Automatisch Automatisch
Taktfrequenz		214,3 MHz (max.)	
Betrachtungswinkel		Links/Rechts: ±88° (CR > 10) Aufwärts/Abwärts: ±88° (CR > 10)	
Bildaufbaugeschwindigkeit		27 ms (typ.)	13 ms (Grau zu Grau typ.)
Unterstützte Auflösungen (Einige Systeme unterstützen möglicherweise nicht alle aufgeführten Modi).		640 x 480* ¹ bei 60 Hz bis 85 Hz 720 x 400* ¹ bei 70 Hz bis 85 Hz 800 x 600* ¹ bei 56 Hz bis 85 Hz 1024 x 768* ¹ bei 60 Hz bis 85 Hz 1280 x 1024* ¹ bei 60 Hz bis 85 Hz 1600 x 1200* ¹ bei 60 Hz bis 75 Hz 1920 x 1200* ¹ bei 60 Hz 2048 x 1536* bei 30 Hz bis 60 Hz (reduzierte Dunkelastung) 2048 x 1536 bei 60 Hz (reduzierte Dunkelastung)..... 1024 x 1280 bei 60 Hz* ¹ 1200 x 1600 bei 60 Hz* ¹ 1536 x 2048 bei 60 Hz (reduzierte Dunkelastung).....	Von NEC DISPLAY SOLUTIONS empfohlene Auflösung für optimale Displayleistung. Von NEC DISPLAY SOLUTIONS empfohlene Auflösung für optimale Displayleistung.
Nutzbare Bildschirmfläche		Querformat: Horiz.: 433,2 mm/17,1 Zoll Vert.: 324,9 mm/12,8 Zoll Hochformat: Horiz.: 324,9 mm/12,8 Zoll Vert.: 433,2 mm/17,1 Zoll	
USB-Hub		I/F: USB-Spezifikation, Revision 2.0 Anschluss: Upstream 1 Downstream 2 Stromstärke: Höchstens 0,5 A pro Anschluss	
Netzspannung		Wechselstrom 100-240 V, ~ 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme		1,2 - 0,46 A	Für Mexiko 2,0 A
Maße		Querformat: 467,8 mm (B) x 377,6 - 527,6 mm (H) x 227,6 mm (T) 18,4 Zoll (B) x 14,9 - 20,8 Zoll (H) x 9,0 Zoll (T) Hochformat: 361,6 mm (B) x 483,4 - 580,7 mm (H) x 227,6 mm (T) 14,2 Zoll (B) x 19,0 - 22,9 Zoll (H) x 9,0 Zoll (T) Höheneinstellung: 150 mm/5,9 Zoll	
Gewicht		10,7 kg/Ohne Fuß: 7,5 kg	
Sensorgenauigkeit und -wiederholbarkeit			
Frontsensor		Genauigkeit: +/-10 % (Lv>10 cd/m ²), +/-1 cd/m ² (10 cd/m ² ≥ Lv>2 cd/m ²), +/-0,5 cd/m ² (Lv ≤ 2 cd/m ²) Wiederholbarkeit: +/-2 % (Standardabweichung)	
Umgebungslichtsensor		Genauigkeit: +/-10 % (Lichtquelle: Fluoreszenzlampe, Abstand: 58 cm, Winkel: 25 +/- 5 Grad von der vertikalen Achse des Umgebungslichtsensors). Wiederholbarkeit: +/-5 % (Wie bei den Genauigkeitsbedingungen).	
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur:		5 °C bis 35 °C/41 °F bis 95 °F	
Feuchtigkeit:		30 % bis 80 %	
Höhe:		-1.246 bis 9.842 Fuß/-380 bis 3.000 m	
Atmosphärischer Druck:		700 hPa bis 1060 hPa	
Transport-/Lagertemperatur:		-10 °C bis 60 °C/14 °F bis 140 °F	
Feuchtigkeit:		10 % bis 85 %	
Höhe:		-1.246 bis 39.370 Fuß/-380 bis 12.000 m	
Atmosphärischer Druck:		200 hPa bis 1060 hPa	

Bei 25 Grad, Zielhelligkeit 400 cd/m²

*1 Interpolierte Auflösungen: Werden Auflösungen mit weniger Punkten angezeigt als das LCD Pixel besitzt, wird der Text möglicherweise nicht korrekt dargestellt. Dies ist für alle derzeitigen Flachbildschirmtechnologien normal, wenn von der Pixelzahl abweichende Auflösungen als Vollbild angezeigt werden. Bei Flachbildschirmen entspricht ein Bildschirmpunkt einem Pixel. Um also eine Vollbildarstellung zu erzielen, muss die Auflösung interpoliert werden.

HINWEIS: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Merkmale und Funktionen

DisplayPort: DisplayPort ist die zukunftsfähige, skalierbare Lösung für die leistungsstarke Anbindung digitaler Displays. Anders als bei Standardkabeln ermöglicht diese Lösung die höchsten Auflösungen, die schnellsten Bildwiederholraten und die bestmögliche Farbtiefe.

DVI-D: Die rein digitale Komponente der von der Digital Display Working Group (DDWG) definierten DVI-Schnittstelle für digitale Verbindungen zwischen Computern und Anzeigegeräten. Da es sich um einen echten Digitalanschluss handelt, werden analoge Signale nicht über einen DVI-D-Anschluss unterstützt. Die ausschließlich digitale Verbindung basiert auf DVI. Deshalb wird nur ein einfacher Adapter benötigt, um die Kompatibilität zwischen DVI-D und anderen digitalen DVI-Anschlüssen wie DFP und P&D zu gewährleisten.

P&D (Plug and Display): Der VESA-Standard für digitale Flachbildschirmschnittstellen. Dieser Standard ist stabiler als DFP, da er den Einsatz anderer Optionen über einen Signalanschluss zulässt (beispielsweise USB, Analogvideo und IEEE-1394-995). Das VESA-Komitee hat DFP als Teilmenge von P&D anerkannt. Die ausschließlich digitale Verbindung basiert auf DVI. Deshalb wird nur ein einfacher Adapter benötigt, um die Kompatibilität zwischen P&D und anderen digitalen DVI-Anschlüssen wie DFP und DVI zu gewährleisten.

Pivotfuß: Benutzer können die Ausrichtung des Monitors an den jeweiligen Einsatzbereich anpassen, also beispielsweise das Querformat für breite Dokumente nutzen oder im Hochformat eine Seite vollständig auf dem Bildschirm anzeigen. Das Hochformat ist auch hervorragend für Videokonferenzen mit Vollbildarstellung geeignet.

Geringer Platzbedarf: Bietet die ideale Lösung für Umgebungen mit Platzbeschränkungen, für die gleichwohl eine hervorragende Bildqualität benötigt wird. Die geringen Maße des Monitors und das geringe Gewicht erleichtern den Transport von einem Standort zu einem anderen.

OSD-Steuerungen (On-Screen Display): Sie können das Bild schnell und einfach mit auf dem Bildschirm angezeigten Menüs einstellen.

Plug&Play: Diese Microsoft®-Lösung in den Windows®-Betriebssystemen erleichtert Einrichtung und Installation, da der Monitor Daten zu seinen Merkmalen (beispielsweise Bildschirmgröße und unterstützte Auflösungen) an den Computer übermitteln kann und die Bildschirmdarstellung automatisch optimiert.

Intelligent Power Manager-System: Dieses System stellt innovative Stromsparmethoden bereit, mit deren Hilfe der Monitor in einen Modus mit geringerer Leistungsaufnahme umschaltet, wenn er nicht genutzt wird. Dadurch können zwei Drittel der Stromkosten gespart sowie Emissionen reduziert und die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung verlängert werden.

Mehrfrequenztechnologie: Der Monitor wird automatisch an die Zeilenfrequenz der Grafikkarte angepasst, sodass automatisch die erforderliche Auflösung angezeigt wird.

FullScan-Funktion: In den meisten Auflösungen können Sie den vollen Anzeigebereich nutzen, also mit einem größeren Bild arbeiten.

Weiter Betrachtungswinkel: Sie können das Monitorbild im Quer- oder Hochformat innerhalb eines Winkelbereichs von 176 Grad betrachten. Der Monitor bietet einen Betrachtungswinkel von 176° nach oben, unten, links und rechts bei einem Kontrastverhältnis größer als 10:1.

VESA-Standard-Montageadapter: Der Monitor kann an allen Tragarmen oder -bügel montiert werden, die dem VESA-Standard entsprechen.

GLEICHMÄSSIGKEIT: Diese Funktion kompensiert eventuell auftretende, leichte Abweichungen beim Weißabgleich des Bildschirms, und Abweichungen der Luminanz werden ausgeglichen.

Reaktionsverbesserung: Verbesserte Grau-zu-Grau-Reaktion.

Verstellbarer Fuß mit Schwenkmöglichkeit: Ermöglicht eine flexible Anpassung an die Sehgewohnheiten.

Frontsensor: Erkennt Änderungen der Monitorluminanz. Wird zur Stabilisierung der Luminanz sowie für eigenständige (Selbstkalibrierung, Gamma-Anpassung, DICOM-Messung) und netzwerkgesteuerte (Gamma-Anpassung, DICOM-Messung) Kalibrierungen und Konformitätstests eingesetzt.

Testfunktion für Monitor-Kurz-QA: Ermöglicht eine schnelle tägliche Sichtprüfung der Bildqualität dieses Diagnosemonitors durch Drücken einer Taste am Monitor.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): HDCP ist ein System, mit dem das illegale Kopieren von digital eingespeisten Videodaten verhindert werden soll. Wenn Sie Videos nicht betrachten können, die mit einem digitalen Signal übertragen werden, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass der Bildschirm defekt ist. Bei mit HDCP ausgerüsteten Systemen kann es Situationen geben, in denen bestimmte Inhalte durch HDCP geschützt sind und auf Wunsch/Absicht der HDCP-Gemeinde (Digital Content Protection LLC) nicht eingesehen werden können.

Fehlerbehebung

Kein Bild

- Das Signalkabel muss richtig mit Grafikkarte/Computer verbunden sein.
- Die Grafikkarte muss richtig in den Steckplatz eingesetzt sein.
- Der Monitor unterstützt kein DisplayPort-Konvertierungssignal.
- Der Netzschalter des Monitors und der Netzschalter des Computers müssen sich in der Position ON bzw. EIN befinden.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Monitor nicht im Stromsparmodus befindet (drücken Sie eine Taste, oder bewegen Sie die Maus).
- Überprüfen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstützter Modus ausgewählt wurde. (Informationen zum Ändern des Signalausgangsmodus und der Auflösung finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum System.)
- Bei DisplayPort geben einige Grafikkarten kein Videosignal aus, wenn der Monitor unter geringer Auflösung aus-/eingeschaltet wird.
- Überprüfen Sie, ob für Monitor und Grafikkarte die empfohlenen Einstellungen vorgenommen wurden.
- Prüfen Sie, ob Kontaktstifte im Stecker des Signalkabels verbogen sind oder fehlen.
- Prüfen Sie den Signaleingang („DVI-D“ oder „DisplayPort“).
- Überprüfen Sie, ob der Computer die Grafikkarte ausreichend mit Strom versorgen kann.

Bildschatten

- Bildschatten sind verbleibende oder sogenannte „Geisterbilder“, die vom vorhergehenden Bild auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Im Unterschied zu CRT-Monitoren ist der Bildschatten auf LCD-Monitoren nicht dauerhafter Natur, aber die Anzeige von Standbildern über eine längere Zeit sollte vermieden werden. Sie können den Bildschatten beseitigen, indem Sie den Monitor so lange ausschalten, wie das vorherige Bild angezeigt wurde. Wurde auf dem Monitor beispielsweise eine Stunde lang ein Standbild angezeigt, und bleibt ein „Geisterbild“ sichtbar, sollte der Monitor mindestens eine Stunde ausgeschaltet werden, damit der Bildschatten verschwindet.

HINWEIS: NEC DISPLAY SOLUTIONS empfiehlt die Aktivierung eines Bildschirmschoners auf allen Anzeigegeräten, wenn sich das Bild längere Zeit nicht verändert. Schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Meldung FREQUENZ ZU HOCH wird angezeigt (Bildschirm ist entweder leer oder zeigt nur ein undeutliches Bild)

- Das Bild erscheint undeutlich (Pixel fehlen), und die OSD-Meldung FREQUENZ ZU HOCH wird angezeigt: Die Signalfrequenz oder Auflösung ist zu hoch. Wechseln Sie in einen unterstützten Modus.
- Auf dem leeren Bildschirm wird die OSD-Meldung FREQUENZ ZU HOCH angezeigt: Die Signalfrequenz liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wechseln Sie in einen unterstützten Modus.

Bild ist nicht stabil, unscharf oder verstümmelt

- Das Signalkabel muss richtig mit dem Computer verbunden sein.
- Überprüfen Sie, ob für Monitor und Grafikkarte die empfohlenen Signaltimings eingestellt wurden und die Geräte kompatibel sind.
- Ist der Text auf Ihrem Monitor verstümmelt, aktivieren Sie einen Videomodus ohne Zeilensprung (Non-Interlaced) und eine Wiederholfrequenz von 60 Hz.

LED an der Rückseite des Monitors leuchtet nicht (*weder grün, noch blau oder gelb*)

- Der Netzschalter muss sich in der Position EIN befinden, und das Netzkabel muss angeschlossen sein.
- Erhöhen Sie die Einstellung der LED-HELLIGKEIT.

Bild wird nicht in der richtigen Größe angezeigt

- Überprüfen Sie, ob ein von der verwendeten Grafikkarte unterstützter Modus ausgewählt wurde. (Informationen zum Ändern des Signalausgangsmodus und der Auflösung finden Sie im Handbuch zur Grafikkarte bzw. zum System.)

Selbstdiagnose

- Der LCD-Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion zur Erkennung von Funktionsabweichungen. Wenn ein Problem festgestellt wird, blinkt die LED auf der Rückseite in einem bestimmten Muster aus langem und kurzem Aufleuchten, je nach Art des Problems.
- Wenn die LED ein Problem signalisiert, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicepersonal.

USB-Hub arbeitet nicht

- Prüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum USB-Gerät.

EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG

Mit der eigenständigen Kalibrierung kann der Bildschirm ohne Verwendung eines Computers neu kalibriert werden, indem der Frontsensor verwendet oder ein externer Sensor angeschlossen wird. Die EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG bietet 5 Funktionen.

- **Selbstkalibrierung:** Kalibriert den Frontsensor auf der Grundlage des optischen USB-Sensors. Der integrierte Frontsensor kann auch manuell mit Bezug auf einen externen Nahbereichs-Luminanzsensor, der auf ein Labor mit Primärstandards zurückgeführt werden kann, abgeglichen werden.
- **Kopierte Kalibrierung:** Kopiert die Luminanz von einem Monitor auf einen oder mehrere zusätzliche Monitore.
- **Gamma-Anpassung:** Dient zur Anpassung des Gammawerts.
- **DICOM Messung:** Misst die DICOM-Reaktion.
- **KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS:** Der integrierte Frontsensor wird manuell mit Bezug auf einen externen Illuminanzsensor, der auf ein Labor mit Primärstandards zurückgeführt werden kann, abgeglichen.

HINWEIS: Damit die eigenständige Kalibrierung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, sollte der Bildschirm mindestens 30 Minuten warmlaufen. Wenn die eigenständige Kalibrierung gestartet wird, bevor der Monitor warmgelaufen ist, wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt (**Abbildung A.1**).

Nachdem die eigenständige Kalibrierung ausgeführt wurde, wird das Meldungsfenster angezeigt (**Abbildung A.3**), und der Bildschirm wird für ca. 10 Sekunden dunkel. Die ZERO CALIBRATION (NULL-KALIBRIERUNG) startet automatisch.

HINWEIS: Verwenden Sie nur optische USB-Sensoren, die unseren Spezifikationen entsprechen. Beachten Sie die TASTENTABELLE (**Abbildung A.2**), wenn Sie die Einstellungen für die Kalibrierung anpassen möchten. Die eigenständige Kalibrierung kann entweder im Querformat oder im Hochformat vorgenommen werden.

HINWEIS: Wenn Sie die Kalibrierung ohne Computer durchführen möchten, beachten Sie die folgenden Arbeitsschritte. Wenn die Meldung KEIN SIGNAL auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste LINKS und anschließend die Taste RECHTS, und halten Sie beide Tasten gleichzeitig gedrückt. Das Menü KALIBRIERUNG wird angezeigt.

HINWEIS: Nachdem die eigenständige Kalibrierung ausgeführt wurde, wird das Meldungsfenster angezeigt (**Abbildung A.3**), und der Bildschirm wird für ca. 10 Sekunden dunkel. Dies ist keine Fehlfunktion.



Abbildung A.1

TASTENTABELLE	
AUF/AB:	Wechselt von einer Einstellung zur nächsten.
LINKS/RECHTS:	Ändert die Auswahl für eine Einstellung. (d. h. ...SELBST oder KOPIE)
SELECT:	Wechselt zum nächsten Schritt der Kalibrierung.
EXIT:	Wechselt zum vorherigen Schritt der Kalibrierung.

Abbildung A.2

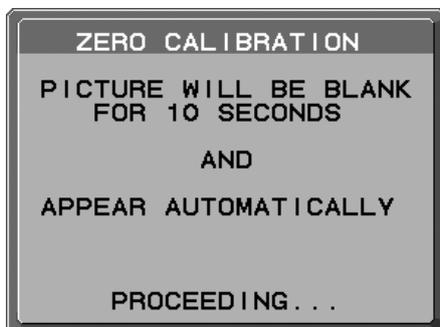


Abbildung A.3

VORSICHT: Verwenden Sie einen ordnungsgemäß gewarteten optischen USB-Sensor. Wenn Sie Zweifel am Ergebnis der eigenständigen Kalibrierung haben, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Selbstkalibrierung

Kalibriert den Frontsensor auf der Grundlage des optischen USB-Sensors. Der integrierte Frontsensor kann auch manuell mit Bezug auf einen externen Nahbereichs-Luminanzsensor, der auf ein Labor mit Primärstandards zurückgeführt werden kann, abgeglichen werden. Die Selbstkalibrierung sollte durchgeführt werden, nachdem die GLEICHMÄSSIGKEIT oder die Bildausrichtung geändert wurden. Beim Durchführen der Selbstkalibrierung werden alle BILDMODI aktualisiert.

HINWEIS: Für den Modus AUTO CALIB. (AUTOM. KALIBRIERUNG) muss der optische USB-Sensor an den Sensoranschluss angeschlossen werden. Für den Modus EXPERT CALIB. (KALIBRIERUNG DURCH EXPERTEN) wird der externe Nahbereichs-Luminanzsensor benötigt.

- Um das Menü KALIBRIERUNG anzuzeigen, schließen Sie den optischen USB-Sensor am Sensoranschluss an (**Abbildung S.1**), oder wählen Sie im erweiterten Menü die Option EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG aus (Seite 20).
- Drücken Sie auf LINKS oder RECHTS, um für den MODUS die Einstellung SELBST auszuwählen (**Abbildung S.2**). Drücken Sie AUF oder AB, um zur nächsten Einstellung zu wechseln.

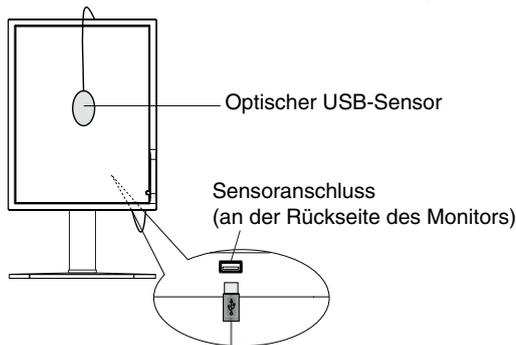


Abbildung S.1



Abbildung S.2

- Drücken Sie LINKS oder RECHTS, um unter OPTION den Befehl AUTO CALIB. (AUTOM. KALIBRIERUNG) oder EXPERT CALIB. (KALIBRIERUNG DURCH EXPERTEN) auszuwählen. Drücken Sie SELECT, um zum nächsten Abschnitt zu wechseln.
- Wählen Sie die Zieleinstellung für die GLEICHMÄSSIGKEIT. Drücken Sie SELECT, um zum nächsten Abschnitt zu wechseln.
- Legen Sie die Zieleinstellung für die LUMINANZ (cd/m²) (**Abbildung S.3**) fest. Drücken Sie SELECT, um zum nächsten Abschnitt zu wechseln.

Um die AUTO CALIB. (AUTOM. KALIBRIERUNG) auszuwählen, fahren Sie mit Schritt 6 fort. Um EXPERT CALIB. (KALIBRIERUNG DURCH EXPERTEN) auszuwählen, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

[AUTO CALIB.] (AUTOM. KALIBRIERUNG) Stellen Sie sicher, dass der optische USB-Sensor an den Sensoranschluss angeschlossen ist.

- Sie werden aufgefordert, den optischen USB-Sensor in der Mitte des Bildschirms zu platzieren (**Abbildung S.4**). Neigen Sie den Monitor um etwa 5 Grad nach hinten, und platzieren Sie den optischen USB-Sensor in der Mitte des Bildschirms (**Abbildung S.1**).

HINWEIS: Halten Sie den optischen USB-Sensor flach auf den LCD-Monitor, um äußere Lichteinflüsse zu vermeiden. Üben Sie mit dem optischen USB-Sensor KEINEN Druck auf den Monitor aus.

Drücken Sie SELECT, um die Kalibrierung zu starten.

Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

[EXPERT CALIB.] (KALIBRIERUNG DURCH EXPERTEN) Für diesen Vorgang wird ein externer Nahbereichs-Luminanzsensor benötigt, der auf ein Labor mit Primärstandards zurückgeführt werden kann.

- Der Messbildschirm wird angezeigt. Messen Sie den Luminanzwert in der Mitte des Displays mithilfe des externen Nahbereichs-Luminanzsensors. Geben Sie den gemessenen Wert mithilfe der Steuerungstasten in MEASURED LUMINANCE (GEMESSENE LUMINANZ) ein, und drücken Sie dann SELECT (**Abbildung S.5**).
- Wiederholen Sie gemäß dem Meldungsfenster die Messung der Luminanz, und geben Sie den gemessenen Wert ein, bis das Verfahren abgeschlossen ist.
- Die Gamma-Anpassung sowie die DICOM-Messung werden dann automatisch ausgeführt. Nach Abschluss der DICOM-Messung können DATUM und UHRZEIT mithilfe der Steuerungstasten eingestellt werden.



Abbildung S.3



Abbildung S.4

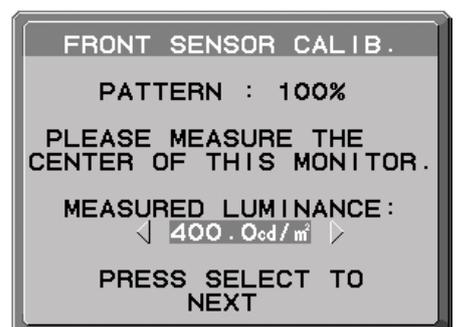


Abbildung S.5

Kopierte Kalibrierung

Die Luminanz kann von einem Monitor auf einen oder mehrere zusätzliche Monitore kopiert werden. Die Verwendung dieser Funktion reduziert die Abweichung zwischen verschiedenen Monitoren und ermöglicht so eine genauere Übereinstimmung dieser Anzeigen.

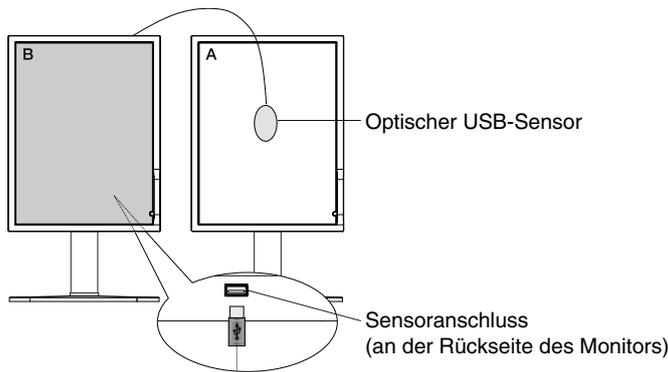


Abbildung C.1

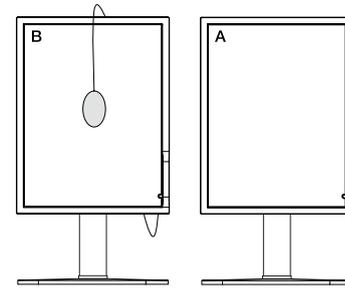


Abbildung C.2

Monitor A – QUELL-Monitor für zu kopierende Lumineszenz.
Monitor B – MD211G3, auf den die Daten kopiert werden sollen.

1. Um das Menü KALIBRIERUNG anzuzeigen, schließen Sie den optischen USB-Sensor am Sensoranschluss an (**Abbildung C.1**), oder wählen Sie im erweiterten Menü die Option EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG aus (Seite 20).
2. Legen Sie auf Monitor A die Zielfarbe Weiß fest. Rufen Sie das erweiterte OSD auf, indem Sie RESET und EXIT drücken.
3. Drücken Sie auf Monitor B LINKS oder RECHTS, um für den MODUS die Einstellung KOPIE auszuwählen (**Abbildung C.3**).
4. Wählen Sie unter SELBST die Einstellung EIN oder AUS. Wenn EIN eingestellt ist, wird die Selbstkalibrierung zusammen mit der kopierten Kalibrierung durchgeführt. Wählen Sie den gewünschten BILDMODUS aus. Bitte wählen Sie dieselbe Zieleinstellung für den BILDMODUS wie auf Monitor A. Drücken Sie SELECT, um zum nächsten Abschnitt zu wechseln.
5. Sie werden aufgefordert, den optischen USB-Sensor in der Mitte des Bildschirms zu platzieren (**Abbildung C.4**). Neigen Sie den Monitor um etwa 5 Grad nach hinten, und platzieren Sie den optischen USB-Sensor in der Mitte des Bildschirms (**Abbildung C.1**).

HINWEIS: Halten Sie den optischen USB-Sensor flach auf den Monitor A, um äußere Lichteinflüsse zu vermeiden. Üben Sie mit dem optischen USB-Sensor **keinen Druck** auf den Monitor aus. Drücken Sie SELECT.

6. Drücken Sie am Monitor B SELECT, um die Luminanz von Monitor A zu messen.
7. Nach dem Kopieren der Informationen von Monitor A wird die Zieleinstellung für die LUMINANZ gespeichert und im OSD-Fenster auf Monitor B angezeigt. Der Zielwert kann nicht angepasst werden (**Abbildung C.5**).
8. Entfernen Sie den optischen USB-Sensor vom Quellmonitor A, und platzieren Sie ihn in der Bildschirmitte von Monitor B (**Abbildung C.2**).
9. Drücken Sie SELECT, um das Kopieren der Kalibrierung zu starten. Abhängig von den Benutzereinstellungen kann der Kopiervorgang einige Minuten in Anspruch nehmen.
10. Nach erfolgreicher Kalibrierung sollten die Luminanz von Monitor A und Monitor B übereinstimmen. Wenn im Bereich SELBST die Option EIN ausgewählt ist, wird die Selbstkalibrierung automatisch ausgeführt.
11. Nach Abschluss der Kalibrierung können DATUM und UHRZEIT mithilfe der Steuerungstasten eingestellt werden.

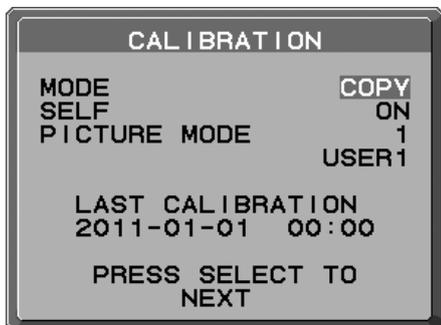


Abbildung C.3

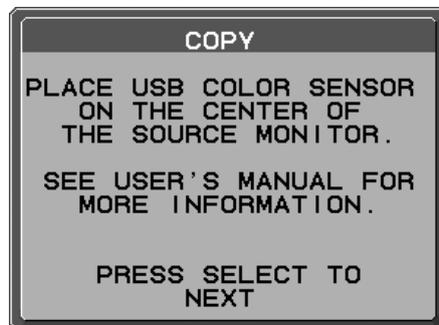


Abbildung C.4

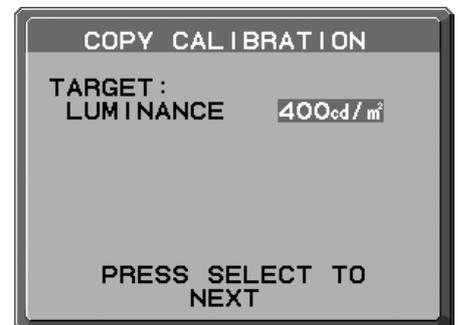


Abbildung C.5

Gamma-Anpassung

Mithilfe des Frontsensors kann die Gamma-Anpassung die Luminanz und den Gammawert rekalisieren. Beim Durchführen der Gamma-Anpassung werden alle BILDMODI aktualisiert.

1. Um das Menü KALIBRIERUNG anzuzeigen, wählen Sie im erweiterten Menü die Option EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG aus (Seite 24).
2. Wählen Sie unter MODUS die Option GAMMA-ANPASSUNG aus (**Abbildung 1**).
3. Wählen Sie die Zieleinstellung für die GLEICHMÄSSIGKEIT. Drücken Sie SELECT, um zum nächsten Abschnitt zu wechseln.
4. Legen Sie die Zieleinstellung für die LUMINANZ (cd/m²) (**Abbildung 2**) fest. Drücken Sie SELECT, um die Kalibrierung zu starten. Abhängig von der Benutzereinstellung kann dies einige Minuten in Anspruch nehmen.

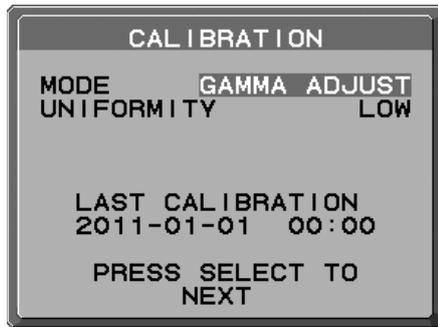


Abbildung 1

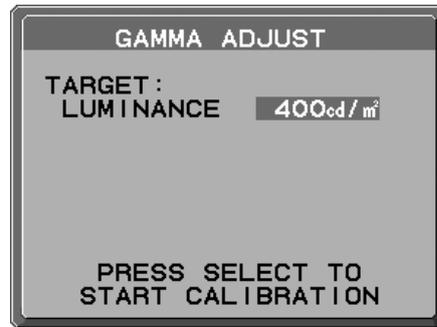


Abbildung 2

5. Die DICOM-Messung wird fortlaufend automatisch ausgeführt.
Nach Abschluss der DICOM-Messung können DATUM und UHRZEIT mithilfe der Steuerungstasten eingestellt werden.

DICOM Messung

Anpassungen gemäß DICOM TEIL 14 können mithilfe des Frontsensors durchgeführt werden.

1. Um das Menü KALIBRIERUNG anzuzeigen, wählen Sie im erweiterten Menü die Option EIGENSTÄNDIGE KALIBRIERUNG aus (Seite 24).
2. Drücken Sie die Taste LINKS oder RECHTS, um für den MODUS die Einstellung DICOM MESSUNG auszuwählen (**Abbildung D.1**).
3. Wählen Sie das GAMMA aus, das Sie messen möchten, und drücken Sie SELECT.

HINWEIS: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn GAMMA (erweitertes Menü, Menüpunkt 1) auf DICOM oder PROGRAMMIERBAR festgelegt ist.

4. Die Meldung DICOM MESSUNG ERGEBNIS (**Abbildung D.2**) wird angezeigt. Mit den Steuertasten können Sie das DATUM und die ZEIT einstellen. Drücken Sie anschließend SELECT.
5. Drücken Sie EXIT, um den Kalibrierungsmodus zu beenden.

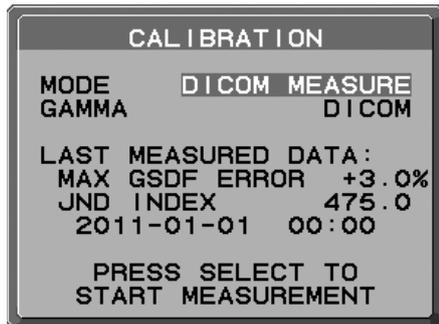


Abbildung D.1

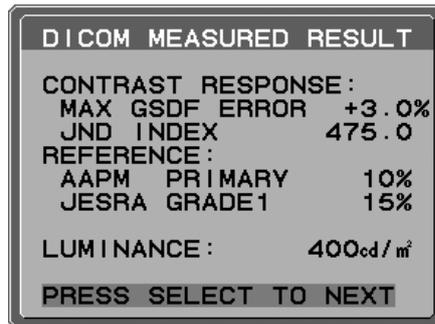


Abbildung D.2

KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS

Mit der KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS wird der Umgebungslichtsensor manuell kalibriert. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn AMBIENT LIGHT COMP. (Seite 17) auf 1 oder 2 eingestellt ist. Führen Sie die KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS in den folgenden Fällen durch:

- Die Benutzungsumgebung hat sich verändert.

Für die KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS werden ein Illuminanzmessgerät und ein Fern-Luminanzmessgerät benötigt.

1. Messen Sie mit dem Fern-Luminanzmessgerät den Luminanzwert in der Mitte des Bildschirms bei ausgeschaltetem Monitor. Wenn kein Fern-Luminanzmessgerät verfügbar ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Schalten Sie den Monitor ein. Wählen Sie nach 30 Minuten im Kalibrierungsmodus AMBIENT SENSOR (UMGEBUNGSLICHTSENSOR) aus (**Abbildung AS.1**). Damit die Kalibrierung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, sollte der Bildschirm mindestens 30 Minuten warmlaufen. Wenn die KALIBRIERUNG DES UMGEBUNGSLICHTSENSORS gestartet wird, bevor das Display warmgelaufen ist, wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Eine Meldung zur Kalibrierung des Umgebungslichtsensors wird angezeigt. Drücken Sie SELECT.
4. Geben Sie den vom Illuminanzmessgerät gemessenen Wert ein. Das Messgerät sollte hierbei im selben Winkel wie der Monitor aufgestellt werden (**Abbildung AS.5**). Geben Sie den Wert mithilfe der Steuerungstasten ein, und drücken Sie SELECT (**Abbildung AS.2**).



Abbildung AS.1



Abbildung AS.2

5. Geben Sie den unter 1 gemessenen Wert ein, und drücken Sie SELECT (**Abbildung AS.3**). Wenn keine Messung stattgefunden hat, drücken Sie SELECT, ohne den Wert zu ändern.
6. Nachdem die Meldung KALIBRIERUNG ERFOLGREICH angezeigt wurde (**Abbildung AS.4**), drücken Sie SELECT. Mit den Steuertasten können Sie das DATUM und die ZEIT einstellen. Drücken Sie anschließend SELECT.
7. Drücken Sie EXIT, um den Kalibrierungsmodus zu beenden.

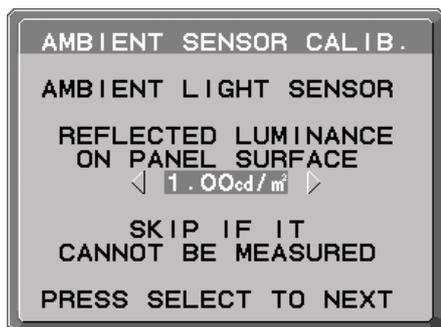


Abbildung AS.3



Abbildung AS.4



Abbildung AS.5

Informationen des Herstellers zu Recycling und Energieverbrauch

NEC DISPLAY SOLUTIONS ist dem Umweltschutz verpflichtet und betrachtet Recycling als eine der obersten Prioritäten des Unternehmens, um die Belastung der Umwelt zu verringern. Wir bemühen uns um die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte sowie um die Definition und Einhaltung der aktuellsten Standards unabhängiger Organisationen wie ISO (Internationale Organisation für Normung) und TCO (Dachverband der schwedischen Angestellten- und Beamten-gewerkschaft).

Entsorgung alter NEC-Geräte

Ziel des Recyclings ist es, durch Wiederverwendung, Verbesserung, Wiederaufbereitung oder Rückgewinnung von Material einen Nutzen für die Umwelt zu erzielen. Spezielle Recyclinganlagen gewährleisten, dass mit umweltschädlichen Komponenten verantwortungsvoll umgegangen wird und diese sicher entsorgt werden. Um für unsere Produkte die beste Recycling-Lösung zu gewährleisten, bietet **NEC DISPLAY SOLUTIONS eine große Anzahl an Recycling-Verfahren** und informiert darüber, wie das jeweilige Produkt umweltbewusst entsorgt werden kann, sobald das Ende der Produktlebensdauer erreicht wird.

Alle erforderlichen Informationen bezüglich der Entsorgung des Produktes sowie länderspezifische Informationen zu Recycling-Einrichtungen erhalten Sie auf unserer Website:

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> (in Europa),

<http://www.nec-display.com> (in Japan) oder

<http://www.necdisplay.com> (in den USA).

Energiesparmodus

Dieser Monitor verfügt über fortschrittliche Energiesparfunktionen. Wird ein dem Standard von VESA Display Power Management Signaling (DPMS) entsprechendes Signal an den Monitor gesendet, so wird der Energiesparmodus aktiviert. Der Monitor wird in einen einzigen Energiesparmodus versetzt.

Modus	Leistungsaufnahme	LED-Farbe
Normalbetrieb	Ca. 105 W	Grün
Energiesparmodus	Weniger als 2 W	Gelb
Ausgeschaltet	Weniger als 1 W	Ausgeschaltet

WEEE-Zeichen (Europäische Richtlinie 2012/19/EU)



Entsorgung alter Geräte: In der Europäischen Union

Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch Monitore und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Befolgen Sie bei der Entsorgung solcher Produkte bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden bzw. erfragen Sie diese bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie ggf. gemäß den geltenden Vorschriften und Gesetzen bzw. einer entsprechenden Vereinbarung. Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte gilt möglicherweise nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

NEC Display Solutions, Ltd.
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
Japan

NEC Display Solutions of America, Inc.
500 Park Blvd. Suite 1100 Itasca,
Illinois 60143
USA
Telefon: 630.467.3000
Fax: 630.467.3010

NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14,
D-80637 München,
Deutschland
Telefon: +49(0)89/99699-0
Fax: +49(0)89/99699-500

3. Ausgabe, August 2016