

Pantalla de diagnóstico médico








GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

MultiSync MDC551C8

Índice

Información sobre símbolos	Español-1
Información importante.....	Español-2
ADVERTENCIA.....	Español-2
PELIGRO.....	Español-2
Uso	Español-3
Información de registro.....	Español-4
Declaración.....	Español-4
Información de la CFC.....	Español-4
Declaración de conformidad.....	Español-4
Clasificación.....	Español-4
Medidas de seguridad, mantenimiento y uso recomendado.....	Español-5
Medidas de seguridad y mantenimiento.....	Español-5
Uso recomendado.....	Español-6
Ergonomía.....	Español-6
Mantenimiento.....	Español-6
Cómo limpiar el panel LCD.....	Español-6
Cómo limpiar la carcasa.....	Español-6
Tabla de contenido.....	Español-7
Instalación.....	Español-8
Colocación de los accesorios de montaje.....	Español-9
Denominación de las piezas y funciones.....	Español-11
Panel de control.....	Español-11
Panel del terminal.....	Español-12
Mando a distancia.....	Español-13
Funcionamiento del mando a distancia.....	Español-14
Ajust.....	Español-15
Conexiones.....	Español-17
Esquema de conexiones eléctricas.....	Español-17
Conexión de un ordenador personal.....	Español-18
Conexión de un reproductor o un ordenador con HDMI.....	Español-18
Conexión de un ordenador con DisplayPort.....	Español-18
Conexión de un ordenador con DVI.....	Español-18
Conexión de un dispositivo USB al puerto USB.....	Español-18
Funcionamiento básico.....	Español-19
Modos Encendido y Apagado.....	Español-19
Indicador de corriente.....	Español-20
Configuración inicial.....	Español-20
Utilización de la gestión de alimentación.....	Español-20
MODO IMAGEN MÚLTIPLE.....	Español-20
Aspecto.....	Español-20
CONFIGURACIÓN ENTRADA.....	Español-21
Información OSD.....	Español-21
Modo imagen.....	Español-22
Controles OSD (On-Screen-Display).....	Español-25
IMAGEN.....	Español-26
AJUSTE.....	Español-26
AUDIO.....	Español-27
PROGRAMA.....	Español-27
CTROL IMAGEN MÚLTIPLE.....	Español-28
OSD.....	Español-29
MULTIPANTALLA.....	Español-30
PROTECCIÓN PANTALLA.....	Español-30
CONTROL EXTERNO.....	Español-31
OPCIÓN AVANZADA1.....	Español-32
OPCIÓN AVANZADA2.....	Español-34
Funciones del mando a distancia.....	Español-36
Conexión de varios monitores.....	Español-37
Control del monitor LCD mediante el mando a distancia RS-232C.....	Español-38
Controlar el monitor LCD a través del control LAN.....	Español-40
Conexión a una red.....	Español-40
Configuración de la red con un navegador HTTP.....	Español-40
POINT ZOOM.....	Español-49
PRUEBA DE REPRODUCCIÓN.....	Español-49
DATOS INALÁMBRICOS INTELIGENTES.....	Español-50
Características.....	Español-51
Solución de problemas.....	Español-52
Especificaciones.....	Español-54
Información del fabricante sobre reciclaje y energía.....	Español-55

Información sobre símbolos

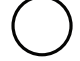	Este símbolo advierte al usuario de que el producto puede contener suficiente voltaje sin aislar como para causar descargas eléctricas. Por tanto, evite el contacto con cualquier pieza del interior del monitor.
	Este símbolo advierte al usuario de que se incluye documentación importante respecto al funcionamiento y el mantenimiento de este producto. Por ello, debería leerla atentamente para evitar problemas.
	Terminal con protección a tierra marcada.
	En reposo.
	Entrada de CA.
	Encendido.
	Apagado.

CERTIFICACIÓN DE LA MARCA UL, ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 y Enmienda 1) cUL, CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:2014



MEDICAL - GENERAL MEDICAL EQUIPMENT AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 AND AMENDMENT 1) AND CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:2014

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.

NEC es una marca registrada de NEC Corporation.

DisplayPort y el logotipo de conformidad de DisplayPort son marcas registradas propiedad de la Video Electronics Standards Association.

Todos los nombres de marca y de producto son marcas o marcas registradas de sus respectivas empresas.



HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

La marca PLink es una marca registrada que determina los derechos de marca en Japón, Estados Unidos de América y otros países y regiones.

CRESTRON y ROOMVIEW son marcas comerciales registradas de Crestron Electronics, Inc. en Estados Unidos y otros países.

Licencias de software GPL/LGPL

El producto incluye software licenciado conforme a la licencia GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor) y otras.

Para más información sobre cada software, consulte el archivo "readme.pdf" que se encuentra en la carpeta "about GPL&LGPL" del CD-ROM entregado.



Información importante



ADVERTENCIA



PARA PREVENIR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO UTILICE EL ENCHUFE POLARIZADO DE ESTE PRODUCTO CON UN RECEPTÁCULO DEL CABLE DE EXTENSIÓN U OTRAS TOMAS A MENOS QUE LAS PROLONGACIONES SE PUEDAN INSERTAR COMPLETAMENTE.

NO ABRA LA CAJA DEL MONITOR, YA QUE CONTIENE COMPONENTES DE ALTO VOLTAJE. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.



PELIGRO








PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DESCONECTADO DEL ENCHUFE DE PARED. PARA ASEGURARSE COMPLETAMENTE DE QUE NO LLEGA CORRIENTE A LA UNIDAD, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE CA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). EL MONITOR NO CONTIENE PIEZAS QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. DEJE QUE SEA EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO QUIEN SE ENCARGUE DE LAS TAREAS DE SERVICIO.

Información importante sobre el cable de alimentación

PRECAUCIÓN: Utilice el cable de alimentación que se suministra con el monitor según las indicaciones de la tabla que aparece a continuación. Si el equipo se le ha suministrado sin cable de alimentación, póngase en contacto con su proveedor. En los demás casos, utilice un cable de alimentación compatible con la corriente alterna de la salida de alimentación que esté homologado y cumpla las normas de seguridad de su país.

Si utiliza este monitor en Norteamérica, utilice cable de alimentación apto para hospitales.

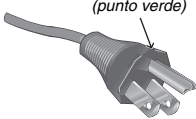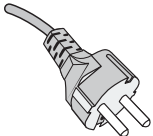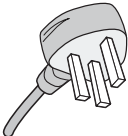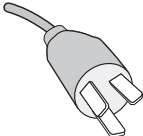Tipo de enchufe	América del Norte	Europa	Reino Unido	Chino	Japonés
Forma del enchufe					
País	EE.UU. / Canadá	UE (excepto Reino Unido)	Reino Unido	China	Japón
Voltaje	120	230	230	220	100

NOTA: Este producto sólo puede recibir asistencia técnica en el país en el que ha sido adquirido.

Uso

El monitor color MDC551C8 se ha concebido para mostrar y visualizar imágenes médicas de uso general.

No puede utilizarse con fines de diagnóstico.

Así pues, y puesto que su uso es solo general, no existen restricciones en cuanto al tipo de paciente.

Para garantizar el rendimiento del monitor tal como se ha previsto, ésta debe utilizarse únicamente con los controladores de pantalla aprobados por NEC.

MDC551C8 no puede utilizarse en un sistema de apoyo vital.

Tampoco debe usarse en mamografías digitales.

Este dispositivo se ha diseñado exclusivamente para interconectarse con equipos certificados IEC 60601-1.

Contraindicaciones: No se conoce ninguna.

Medida de seguridad

Esta unidad se ha diseñado para interconectarse exclusivamente con equipos certificados IEC 60950-1 fuera del entorno del paciente y con equipos certificados IEC 60601-1 en el entorno del paciente.

- Los equipos conectados a las interfaces digitales deben cumplir con los estándares IEC respectivos (por ejemplo, IEC 60950-1 para equipos de proceso de datos e IEC 60601-1 para equipos médicos).
- Este dispositivo cumple con IEC 60601-1-2. Para reducir las interferencias con otros equipos es preciso mantener una distancia mínima de 0,5 m respecto a otras posibles fuentes electromagnéticas como, por ejemplo, los teléfonos móviles.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, asegúrese de que el cable de alimentación está desconectado del enchufe de la pared. Para asegurarse completamente de que no llega corriente a la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma de ca. No retire la cubierta (o la parte trasera). El monitor no contiene piezas que deba manipular el usuario. Las tareas de servicio deberá realizarlas un técnico cualificado. La toma de CA debe estar disponible y fácilmente accesible.

Este dispositivo utiliza ventiladores diseñados para controlar la temperatura que facilitan la ventilación interna. No se recomienda el uso de este dispositivo en los quirófanos si el usuario no puede realizar la limpieza periódica de las entradas de aire para eliminar las partículas de polvo e hilachas (intervalo máximo: seis meses).

Principio operativo: Gracias al CI del Scaler, la señal de vídeo o la señal digital procedentes de un solo dispositivo se acercan o se alejan, y se lleva a cabo el proceso de la imagen digital. A continuación, las señales LVDS se transmiten a través de la línea de cable a uno de los módulos LCD. Finalmente, y a través del controlador del reloj, la señal del reloj se transmite al CI de la unidad del panel y se enciende la luz de fondo de la fuente de luz del módulo LCD mediante el control del Scaler.

Operario previsto: La persona que haya recibido la formación y los conocimientos básicos para entender el funcionamiento.

Paciente previsto: El paciente únicamente lo ve, no está conectado directamente al paciente.

Clientes de Norteamérica

La fiabilidad de la toma de tierra sólo se garantiza si el equipo se conecta a un receptáculo equivalente marcado como "Hospital Only" ("Sólo hospitales") u "Hospital Grade" ("Para hospitales"). Es necesario que el puerto de entrada de la señal esté conectado correctamente y no deberá dejarse ningún puerto de entrada de señal que no se use al alcance del paciente una vez integrado el monitor en un sistema médico.

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a través de o por orden de un facultativo autorizado.

En Europa

El desembalaje, la instalación y la calibración del monitor debe realizarla personal autorizado. Las instalaciones realizadas por personal no autorizado correrán por su cuenta y riesgo. Nosotros no nos hacemos responsables del mal funcionamiento del aparato.


Visualización de imágenes médicas

El MDC551C8 está diseñado para imágenes médicas de 3840 x 2160.

NOTA: Para evitar cualquier desajuste accidental de la configuración óptima y de los valores calibrados, NEC Display Solutions le aconseja encarecidamente activar la función "SEGURIDAD - BLOQUEO DE CONTROL" en los controles OSD (On-Screen-Display) del monitor. Esta operación aparece descrita en la página 31 de este documento.

Información de registro

Declaración

Declaración del fabricante	
Modos de conformidad	NEC Display Solutions Europe GmbH declara que el producto aquí mencionado está conforme con los requerimientos y las disposiciones esenciales de la Directiva 93/42/EEC del Consejo, incluyendo las enmiendas a la Directiva 2011/47/EC del Consejo y a la Directiva 2011/65/EU (ROHS) del Consejo, y cumple con los apartados aplicables de los siguientes estándares:
Clasificación del dispositivo: Clase I, sin función de medición	 <ul style="list-style-type: none">- EN 60601-1- EN 60601-1-2- EN 61000-3-2- EN 61000-3-3- EN 50581:2012
Normas aplicables: Anexo IX, normas 1.4 (sección 1) y 1.1 (sección 3)	
Nombre del producto: MDC551C8 (Monitor color LCD de 55")	
Número de modelo: MDC551C8	
Código UMDNS: 16603	
NEC Display Solutions Europe GmbH Landshuter Allee 12-14. 80637 Munich, Alemania	

Información de la CFC

- Utilice los cables específicos que se suministran con este monitor para no provocar interferencias en la recepción de radio y televisión.
 - Utilice el cable de alimentación suministrado o un equivalente para asegurarse de que cumple con las normas de la CFC.
 - Utilice el cable de señal de vídeo apantallado que se incluye con el monitor.
Si utiliza otros cables y adaptadores, puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión.
- Este equipo se ha examinado y se garantiza que cumple los límites de los aparatos digitales de clase B, conforme al capítulo 15 de las normas de la CFC. Estos límites se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en las instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría generar interferencias que afectaran a la comunicación por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera interferencias que afectaran a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede detectar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias de una de las siguientes formas:
 - Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
 - Separe más el equipo y la unidad receptora.
 - Conecte el equipo a la toma de corriente en un circuito distinto de aquél al que esté conectada la unidad receptora.
 - Consulte a su proveedor o a un técnico especializado en radios o televisores para obtener ayuda adicional.

Si fuera necesario, el usuario deberá ponerse en contacto con el proveedor o con un técnico especializado en radios o televisores para recibir otras indicaciones. El siguiente folleto, publicado por la Comisión Federal para las Comunicaciones (CFC), puede ser de utilidad para el usuario: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" ("Cómo identificar y resolver problemas de interferencias de radio y televisión"). Este folleto está editado por la imprenta del Gobierno de EE.UU. (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4).

Declaración de conformidad

Este aparato cumple el capítulo 15 de las normas de la CFC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2) acepta cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que pueden afectar al funcionamiento del equipo.

Parte responsable en EE.UU.:	NEC Display Solutions of America, Inc.
Dirección:	500 Park Boulevard, Suite 1100
Tel.:	Itasca, Illinois 60143
	(630) 467-3000

Tipo de producto:	Monitor
Clasificación del equipo:	Aparato periférico, clase B
Modelos:	MDC551C8



Por la presente certificamos que el equipo anteriormente mencionado se ajusta a los estándares técnicos especificados en las normas de la CFC.

Clasificación

Según el tipo de protección contra las descargas eléctricas: CLASE I

Según el nivel de protección contra las descargas eléctricas: No se aplica ningún capítulo

Según el nivel de protección contra la entrada de agua, tal como se describe en la edición actual de IEC529: IP20

Según el método de esterilización o desinfección recomendado por el fabricante: Sin especificar

Según el nivel de seguridad de su utilización cuando hay una MEZCLA DE ANESTÉSICO INFLAMABLE Y AIRE, OXÍGENO O ÁCIDO NITROSO: Sin categoría AP o APG

Según el modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo

Medidas de seguridad, mantenimiento y uso recomendado

Medidas de seguridad y mantenimiento

PARA GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL PRODUCTO, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES AL CONFIGURAR Y UTILIZAR EL MONITOR MULTIFUNCIÓN:

ADVERTENCIA: No rectifique el equipo sin la autorización del fabricante.

ADVERTENCIA: Para desconectar este producto de la alimentación principal, desconecte el cable eléctrico de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, este equipo sólo debe conectarse a una fuente de alimentación con protección a tierra.

ADVERTENCIA: No se permite modificar el equipo en modo alguno.

ADVERTENCIA: Para obtener información sobre EMC, póngase en contacto con su proveedor.

- **NO ABRA EL MONITOR.** No contiene piezas que deba manipular el usuario. Si se abren o retiran las cubiertas, existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas peligrosas u otros daños. Las tareas de servicio deberá realizarlas un técnico cualificado.
- No doble, pince o dañe en modo alguno el cable de alimentación.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Si éste se dañara, podrían producirse descargas o fuego.
- El cable de alimentación que utilice debe estar homologado y cumplir las normas de seguridad de su país. (En Europa debería utilizarse el tipo H05VV-F 3G 1 mm²).
- En el Reino Unido, utilice un cable de alimentación homologado BS con enchufe moldeado que tenga un fusible negro (13A) instalado para utilizarlo con este monitor.
- En caso de emergencia, tire del conector del cable de alimentación si debe desconectar el sistema de la tensión de alimentación. El monitor debería estar instalado cerca de una caja de enchufe de fácil acceso.
- No vierta ningún líquido en la caja ni utilice el monitor cerca del agua.
- No inserte objetos de ningún tipo en las ranuras de la caja, porque podrían tocar puntos con tensión peligrosos y ser dañinos o letales, o causar descargas eléctricas, fuego o fallos en el equipo.
- No coloque este producto sobre un carro, soporte o mesa inclinado o inestable, ya que el monitor podría caerse y se podrían producir daños graves.
- Evite que el monitor pase mucho tiempo con la pantalla en posición invertida porque puede ocasionarle un daño permanente.
- No coloque objetos sobre el monitor ni utilice el monitor al aire libre.
- Si hay cristales rotos, retírelos con precaución.
- Este monitor incluye ventiladores para controlar la temperatura. Para obtener un rendimiento fiable y prolongar la vida útil de este producto, está prohibido tapar cualquier ranura de ventilación del monitor.
- No toque al paciente mientras esté manipulando este equipo médico.
- Si se rompe el monitor o el cristal, no toque el cristal líquido y tenga precaución.
- Coloque el monitor en un lugar debidamente ventilado para permitir que el calor se disipe sin problemas. No bloquee las aberturas ventiladas ni coloque el monitor cerca de un radiador u otras fuentes de calor. No coloque nada sobre el monitor.
- No mueva ni monte este producto colgándolo del asa trasera con una cuerda o un alambre. No monte ni fije este producto utilizando el asa trasera. Puede caerse y causar daños personales.
- Trate con cuidado el monitor al transportarlo. Guarde el embalaje. Podría necesitarlo para futuros transportes.
- Al utilizar un cable LAN, no conecte el dispositivo periférico con cables que puedan tener excesivo voltaje.
- No utilice el monitor en zonas con altas temperaturas, humedad, polvo o grasa.
- No utilice el monitor en ambientes en los que la temperatura y la humedad cambian rápidamente y evite que reciba directamente el frío del aire acondicionado, porque puede reducir la vida útil del monitor o producir condensación. Si se produce condensación de agua, deje el monitor desenchufado hasta que desaparezca la condensación.
- Este dispositivo utiliza ventiladores diseñados para controlar la temperatura que facilitan la ventilación interna en un entorno con temperaturas elevadas. Si no es posible controlar la temperatura ambiental para mantenerla en un nivel máximo de 30 °C, se aplica lo siguiente: Debe realizarse la limpieza periódica de las entradas de aire para eliminar las partículas de polvo e hilachas (máx. seis meses).
- Para garantizar la fiabilidad del monitor, limpie una vez al año los orificios de la parte posterior de la caja para eliminar la suciedad y el polvo.
- Las vibraciones pueden dañar la luz posterior. No instale el monitor donde pueda quedar expuesto a vibraciones continuas.
- Para prevenir daños al monitor causados por caídas provocadas por terremotos u otros seísmos, asegúrese de instalar el monitor en una ubicación estable y tome medidas para evitar que se caiga.
- No toque la pantalla LCD durante el transporte, el montaje o la instalación. Presionar la superficie del panel LCD puede causar daños permanentes.
- La latencia de las imágenes y el vídeo es de 2,5 marcos. Este valor puede no ser suficiente para aplicaciones que requieren la reproducción de imágenes en tiempo real, incluidas las aplicaciones en quirófanos. Consulte con el proveedor de dispositivos clínicos si esta demora es aceptable para la aplicación.

Conexión a una TV*

- El sistema de distribución de cables debe tener una conexión a tierra adecuada según lo establecido en ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), específicamente en la sección 820.93, Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable.
- La malla del cable coaxial se debe conectar a la toma de tierra de la instalación del edificio.

* Es posible que el producto que ha adquirido no disponga de esta función.

Si se dan algunas de estas circunstancias, desconecte inmediatamente el monitor de la toma de corriente y contacte con el personal de servicio cualificado:

- Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado.
- Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del monitor.
- Si el monitor ha estado expuesto a la lluvia o el agua.
- Si el monitor se ha caído o se ha dañado la caja.
- Si observa algún daño estructural como, por ejemplo, alguna rotura o un combado que no sea natural.
- Si el monitor no funciona con normalidad y ha seguido las instrucciones de servicio.

Uso recomendado

- Para garantizar el rendimiento óptimo del monitor, déjelo en marcha durante 20 minutos para que se caliente.
- Descanse la vista periódicamente enfocándola hacia un objeto situado a 1,5 metros como mínimo. Parpadee con frecuencia.
- Coloque el monitor en un ángulo de 90° respecto a las ventanas u otras fuentes de luz para evitar al máximo los brillos y reflejos.
- Limpie la superficie del monitor con pantalla de cristal líquido con un paño sin hilachas y no abrasivo. No utilice líquidos limpiadores ni limpiacristales.
- Evite reproducir patrones fijos en el monitor durante largos períodos de tiempo. De ese modo, evitará la persistencia de la imagen (efectos post-imagen).
- Revise su vista con regularidad.

Ergonomía

Para conseguir las máximas ventajas ergonómicas, recomendamos que:

- Utilice los controles de tamaño y posición predefinidos con señales estándar.
- Utilice la configuración de color predefinida.
- Utilice señales no entrelazadas.
- No utilice el color azul primario en un fondo oscuro, ya que no se ve fácilmente y, dado que el contraste es insuficiente, podría fatigarle la vista.
- Apto para fines recreativos en entornos con iluminación controlada, para evitar las molestias que ocasionan los reflejos de la pantalla.

Mantenimiento

- Es muy recomendable realizar una "calibración de referencia" con el software GammaCompMD QA de NEC durante la instalación. Consulte el Manual de usuario de GammaCompMD QA para obtener más información sobre cómo realizar una "calibración de referencia".
- Puede acceder a la última versión del software GammCompMD QA en las páginas web de NEC Display Solutions (www.necdisplay.com para EE. UU. y www.nec-display-solutions.com para Europa).

Cómo limpiar el panel LCD

- Si la pantalla de cristal líquido está sucia, límpiela cuidadosamente con un paño suave.
- No frote el panel LCD con materiales duros.
- No presione la superficie del panel LCD.
- No utilice productos de limpieza con ácidos orgánicos, ya que la superficie del panel LCD se puede deteriorar o incluso cambiar de color.
- Utilice agua, IPA o hexano.
- En el momento de la configuración, límpielo siguiendo el método indicado arriba según sea necesario.

Cómo limpiar la carcasa


- Desconecte el cable de alimentación
- Limpie con cuidado la carcasa utilizando un paño suave
- Para limpiar la carcasa, humedezca el paño con agua o IPA al 40 o 50 %, páselo por la carcasa y repáselo con otro paño seco.
- En el momento de la configuración, límpielo siguiendo el método indicado arriba según sea necesario.

NOTA: NO la limpie con benceno, diluyente, detergente alcalino, detergente con componentes alcohólicos, limpiacristales, cera, abrillantador, jabón en polvo ni insecticida. La carcasa no debe estar en contacto con goma o vinilo durante un largo período de tiempo. Estos tipos de líquidos y de materiales pueden hacer que la pintura se deteriore, se resquebraje o se desprege.


Tabla de contenido

Su nueva *caja de monitor MultiSync MDC debería contener:


- Monitor LCD
- Cable de alimentación*1
- Cable de señal de vídeo (cable DisplayPort)
- Cable de señal de vídeo (cable mini DisplayPort a DisplayPort)
- Mando a distancia inalámbrico y pilas AAA
- Guía de referencia rápida
- 3 abrazaderas
- 3 tornillos con arandela
- 2 tornillos de mariposa para el soporte opcional
- Un CD-ROM

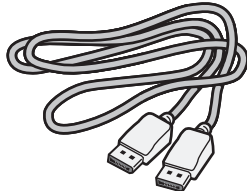


Cable de señal de vídeo
(cable DisplayPort)

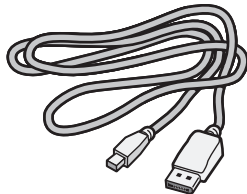


Cable de señal de vídeo
(cable mini DisplayPort a
DisplayPort)

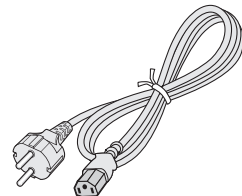

Cable de alimentación*1

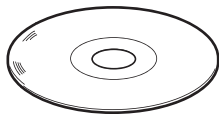


CD ROM

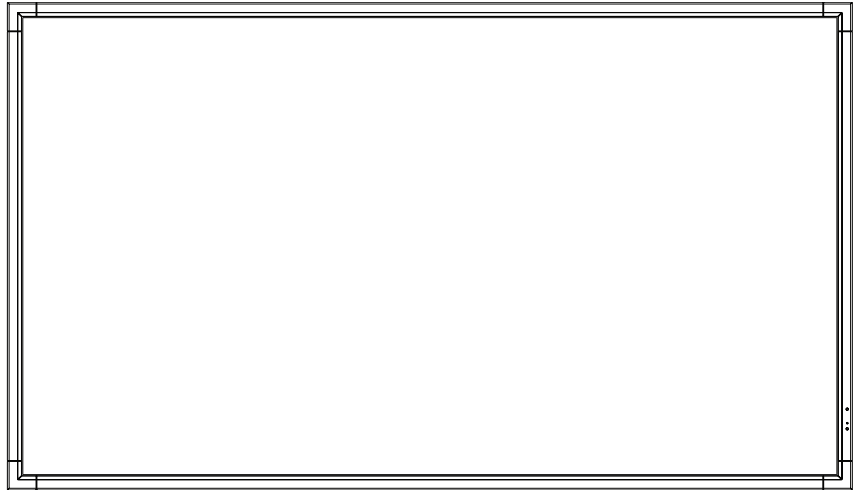

3 tornillos con arandela (M4 x 10)



3 abrazaderas

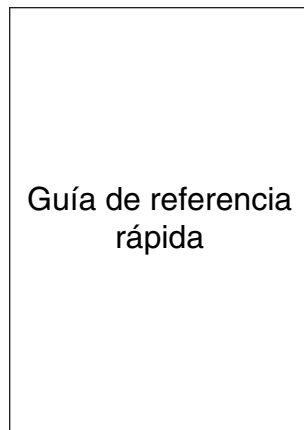

Guía de referencia rápida



2 tornillos de mariposa para
el soporte opcional



Mando a distancia inalámbrico
y pilas AAA

- Recuerde conservar la caja y el material de embalaje originales para poder transportar el monitor en el futuro.
- *1 El número y el tipo de cables de alimentación incluidos dependen del país de destino de entrega del monitor LCD. Si se incluyen varios cables de alimentación, utilice un cable de alimentación compatible con la corriente alterna de la salida de alimentación que esté homologado y cumpla las normas de seguridad de su país.

Instalación

Este dispositivo no puede utilizarse ni instalarse sin el soporte para mesa u otro accesorio de montaje para soporte. Para una instalación adecuada, se recomienda encarecidamente que se acuda a un técnico formado y autorizado por NEC. Si no se siguen los procedimientos de montaje estándar de NEC es posible que el equipo se dañe o el instalador sufra alguna lesión. La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.

Montaje

NO monte el monitor por su cuenta. Pregunte a su proveedor. Para una instalación adecuada, se recomienda encarecidamente que se acuda a un técnico formado y cualificado. Le rogamos que inspeccione la ubicación donde se va a montar la unidad. El montaje en una pared o techo se realiza bajo responsabilidad del cliente. No todas las paredes y techos son aptas para soportar el peso de la unidad. La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta, reformas o desastres naturales. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.


NO bloquee las ranuras de ventilación al montar accesorios u otros elementos.

Para personal cualificado de NEC:

Con el fin de garantizar una instalación segura, utilice dos o más escuadras para montar la unidad. Monte la unidad en dos puntos como mínimo en la ubicación de la instalación.


Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones cuando monte la unidad en una pared o techo.

- Cuando se utilicen accesorios adicionales que no estén aprobados por NEC, deben cumplir el método de montaje compatible con VESA (FDMLv1).
- NEC recomienda interfaces de montaje que cumplan con la norma UL1678 norteamericana.
- NEC recomienda encarecidamente que se utilicen tornillos de tamaño M8 (longitud de 15-17 mm más el grosor de escuadra y arandela). Si se utilizan tornillos superiores a 15-17 mm, compruebe la profundidad del orificio. (Fuerza de sujeción recomendada: 1125 – 1375 N•cm). El orificio de la escuadra debe ser inferior a \varnothing 10 mm.
- Antes de proceder al montaje, inspeccione la ubicación de instalación con el fin de garantizar que ésta es lo suficientemente fuerte para soportar el peso la unidad montada y que la unidad no sufrirá daños.
- Consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje para obtener información detallada.
- Asegúrese de que no quede ningún hueco entre el monitor y la escuadra.

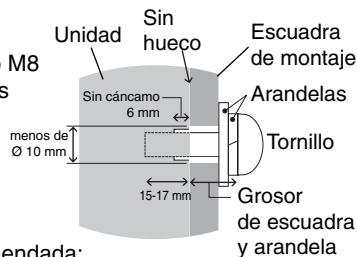

Orientación

- Al utilizar el monitor en posición vertical, este debe girarse hacia la derecha, de modo que el lado izquierdo se mueva hacia arriba y el derecho, hacia abajo. De este modo se facilitará una ventilación adecuada y se prolongará la duración del monitor. Una ventilación incorrecta puede acortar la vida útil del monitor.

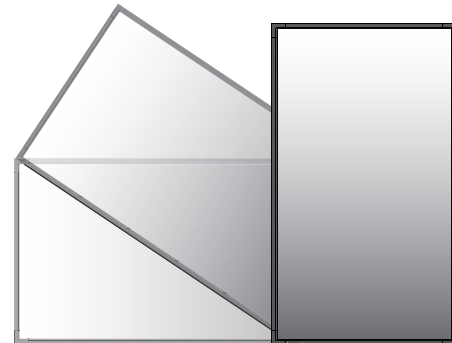

Diodo luminoso

- Al utilizar la pantalla en posición vertical, la posición de las asas y de la placa con el logotipo de NEC puede cambiar.

Ubicación de montaje

- El techo debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el monitor y los accesorios adicionales.
- NO lo instale en ubicaciones donde una puerta o un portón puedan golpear a la unidad.
- No lo instale en zonas donde la unidad estará sometida a vibraciones fuertes y polvo.
- NO instale el monitor junto a ninguna de las principales entradas de alimentación al edificio.
- NO instale el monitor donde alguien se pueda agarrar a la unidad o a los equipos montados, o colgarse de éstos fácilmente.
- Permita que haya una ventilación adecuada o aire acondicionado alrededor del monitor, de tal forma que el calor se pueda disipar adecuadamente del monitor y los equipos adicionales.

Montaje en los techos

- Asegúrese de que el techo es lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la unidad y de los equipos adicionales con el transcurso del tiempo, en caso de terremotos, vibraciones inesperadas u otras fuerzas externas.
- Asegúrese de que la unidad se monte sobre una estructura sólida dentro del techo, como una viga maestra. Asegure el monitor utilizando pernos, arandelas de seguridad con resorte, arandelas y tuercas.
- NO lo monte en zonas que no dispongan de una estructura interna de soporte.
- NO utilice tornillos de madera o tornillos de anclaje para montarlo.
- NO monte la unidad en el techo ni en dispositivos colgantes.

Mantenimiento


- Compruebe periódicamente que no haya tornillos no apretados, separaciones, distorsiones u otras anomalías que se puedan producir con los equipos adicionales. En caso de que se detecte un problema, consulte a personal cualificado para obtener asistencia.
- Compruebe periódicamente la ubicación de montaje por si aprecia señales de daños o debilidades que se produzcan a lo largo del tiempo.

Colocación de los accesorios de montaje

El monitor está diseñado para su uso con el sistema de montaje VESA.

1. Colocación de los accesorios de montaje

Procure no inclinar el monitor mientras coloca los accesorios.

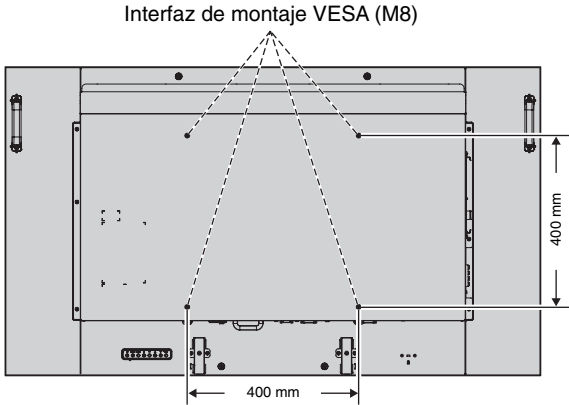

Los accesorios adicionales se pueden colocar con el monitor boca abajo. Para evitar dañar la parte frontal, coloque la lámina protectora en la mesa debajo del monitor. La lámina protectora envuelve el monitor en el embalaje original. Asegúrese de que no hay nada en la mesa que pueda dañar el monitor.

Si se utilizan accesorios de montaje que no cumplen las indicaciones NEC ni están aprobados por éste, deben cumplir el estándar Interfaz de Montaje de Dispositivo Plano (FDMI) de la VESA.

NOTA: Antes de instalarlo, asegúrese de colocarlo en una superficie plana con suficiente espacio.

2. Uso de la placa opcional

1. Desactive el interruptor eléctrico principal.
2. Afloje los tornillos para extraer la cubierta acoplada de la ranura (**Figura 1**).
3. Inserte la placa opcional en el monitor. Fije la cubierta de la ranura con ayuda de los tornillos retirados.

NOTA: Póngase en contacto con el proveedor para obtener información sobre la disponibilidad de la placa opcional. Antes de fijar la placa opcional con los tornillos, procure manipularla sin ejercer demasiada fuerza. Asegúrese de que la placa sea introducida en la ranura en la orientación correcta.

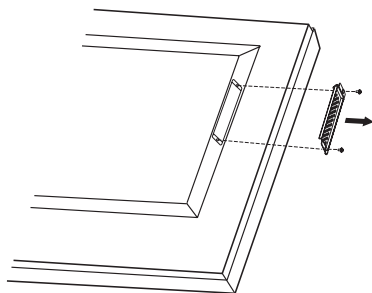


Figura 1


3. Instalación y extracción del soporte para mesa opcional.

AVISO: La instalación y extracción del soporte debe realizarse por dos o más personas.

Para la instalación, siga las instrucciones incluidas en el soporte o en el equipo de montaje. Use sólo el soporte para mesa opcional ST-5220. Instale el soporte procurando que el extremo largo de los pies mire hacia delante.


NOTA: Use SOLO los tornillos de mariposa suministrados con el monitor.

Al instalar el soporte del monitor LCD, sostenga la unidad con cuidado para evitar pellizcarse los dedos.

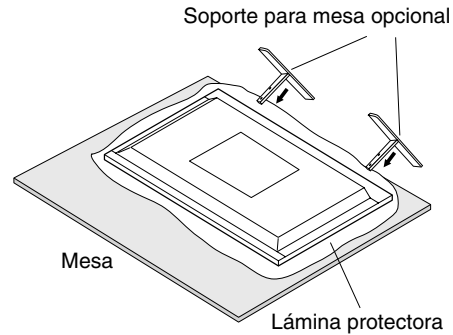

4. Requisitos de ventilación

Cuando el montaje se haga en un espacio cerrado o empotrado, deje la suficiente separación entre el monitor y la pared para asegurar que el calor se dispersa, como se muestra abajo.

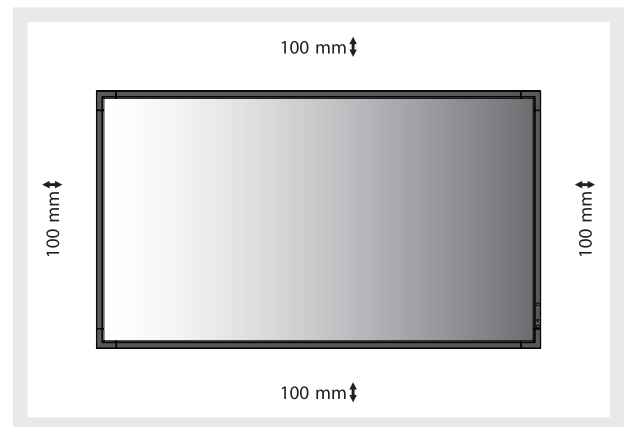


Permita que haya una ventilación adecuada o aire acondicionado alrededor del monitor, de tal forma que el calor se pueda disipar adecuadamente de la unidad y de los equipos adicionales, sobre todo si utiliza monitores en una configuración de varias pantallas.

NOTA: La calidad del sonido de los altavoces internos será distinta en función de la acústica de la sala.

5. Impedir la inclinación

Cuando se utilice el monitor con el soporte para mesa opcional, sujételo a la pared con una cuerda o cadena que soporte el peso del monitor para impedir que el monitor se caiga. Sujete la cuerda o cadena al monitor con las abrazaderas y los tornillos facilitados.

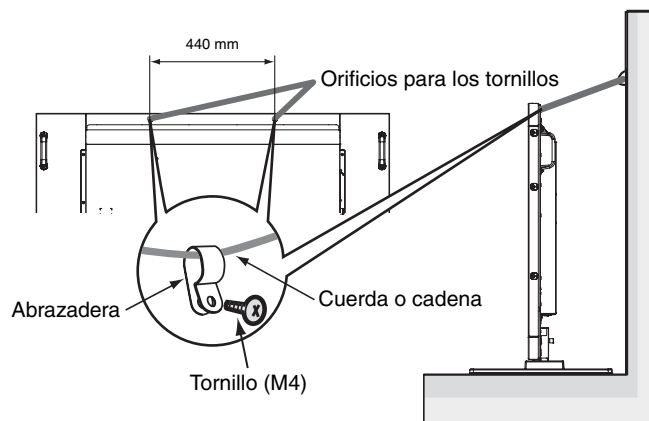


Antes de fijar el monitor a la pared, asegúrese de que ésta puede soportar el peso del monitor.

Asegúrese de quitar la cuerda o la cadena de la pared antes de mover el monitor.

Denominación de las piezas y funciones

Panel de control

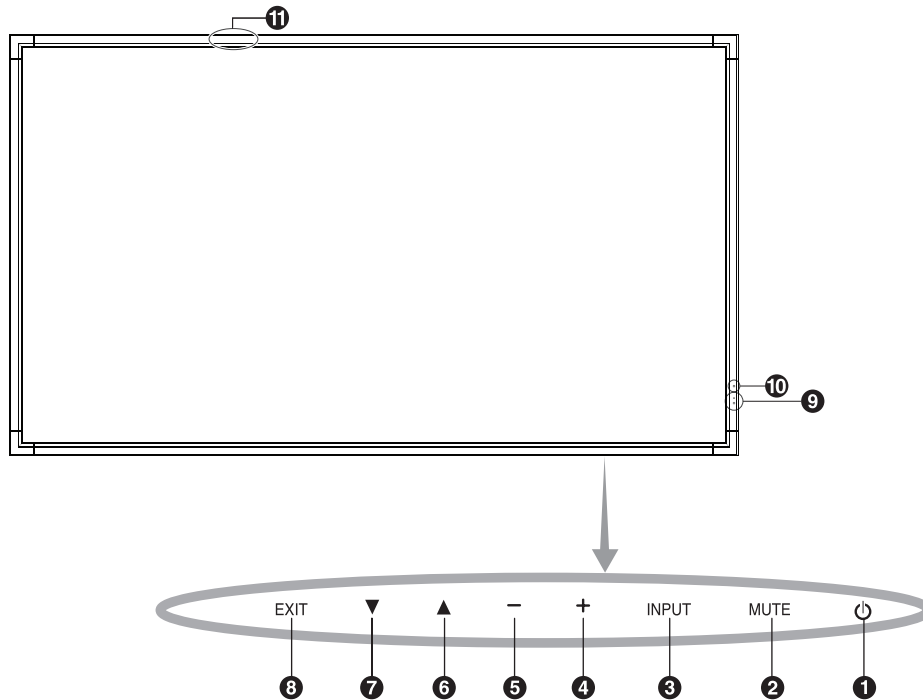

1 Botón de ENCENDIDO ()

Enciende y apaga el monitor. Véase también la página 19.

2 Botón MUTE (silencio)

Activa y desactiva la función de silencio.

3 Botón INPUT (entrada)

Tiene la misma función que el botón SET/POINT ZOOM del menú OSD. (Alterna entre [DVI1], [DVI2], [DPORT], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3], [HDMI4], [OPTION]*). Estas son únicamente las entradas disponibles, mostradas con su nombre predeterminado de fábrica.

4 Botón MÁS (+)

Aumenta el nivel de salida de audio cuando el menú OSD está apagado.
Tiene la misma función que el botón (+) para incrementar el ajuste en el menú OSD.

5 Botón MENOS (-)

Reduce el nivel de salida de audio cuando el menú OSD está apagado.
Tiene la misma función que el botón (-) para reducir el ajuste en el menú OSD.

6 Botón ARRIBA (▲)

Activa el menú OSD cuando no está en funcionamiento.
Tiene la misma función que el botón ▲ que permite desplazar el área seleccionada arriba para seleccionar las opciones de ajuste en el menú OSD.

7 Botón ABAJO (▼)

Activa el menú OSD cuando no está en funcionamiento.
Tiene la misma función que el botón ▼ que permite desplazar el área seleccionada abajo para seleccionar las opciones de ajuste en el menú OSD.

8 Botón EXIT (Salir)

Activa el menú OSD cuando no está en funcionamiento.
Tiene la misma función que el botón EXIT de OSD: llevar al menú anterior.

9 Sensor del mando a distancia e Indicador de corriente

Recibe la señal del mando a distancia (cuando se utiliza el mando a distancia inalámbrico). Véase también la página 14.
Se enciende la luz verde cuando el monitor LCD está en modo activo*.
Se apaga cuando el LCD está en modo APAGADO.
Parpadea en ámbar cuando el monitor está en modo de ahorro de energía. Parpadea alternativamente en verde y ámbar mientras está en espera con la función AJUSTES DE PROGRAMA activada. Cuando se detecta un fallo de componente en el monitor, el indicador parpadea en rojo.
* Si selecciona OFF en INDICADOR DE CORRIENTE (véase la página 30), el LED no se iluminará cuando el monitor LCD esté en modo activo.

10 Sensor de luz ambiental

Detecta el nivel de luz ambiental, lo que permite ajustar el monitor automáticamente en el ajuste de la luz de fondo.
NO lo active para su uso como monitor de revisiones clínicas. Véase la página 34.

11 Sensor de datos inalámbricos inteligentes


Sensor de comunicación inalámbrica de la información y los ajustes del monitor.

Modo Bloqueo de la tecla control

Este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones de la tecla Control. Para activar la función de bloqueo de la tecla Control, mantenga pulsados ▼ y ▲ durante más de tres segundos. Para volver al modo de usuario, mantenga pulsados los botones ▼ y ▲ durante más de tres segundos.

*: Esta función depende de la placa opcional que esté utilizando.

Panel del terminal

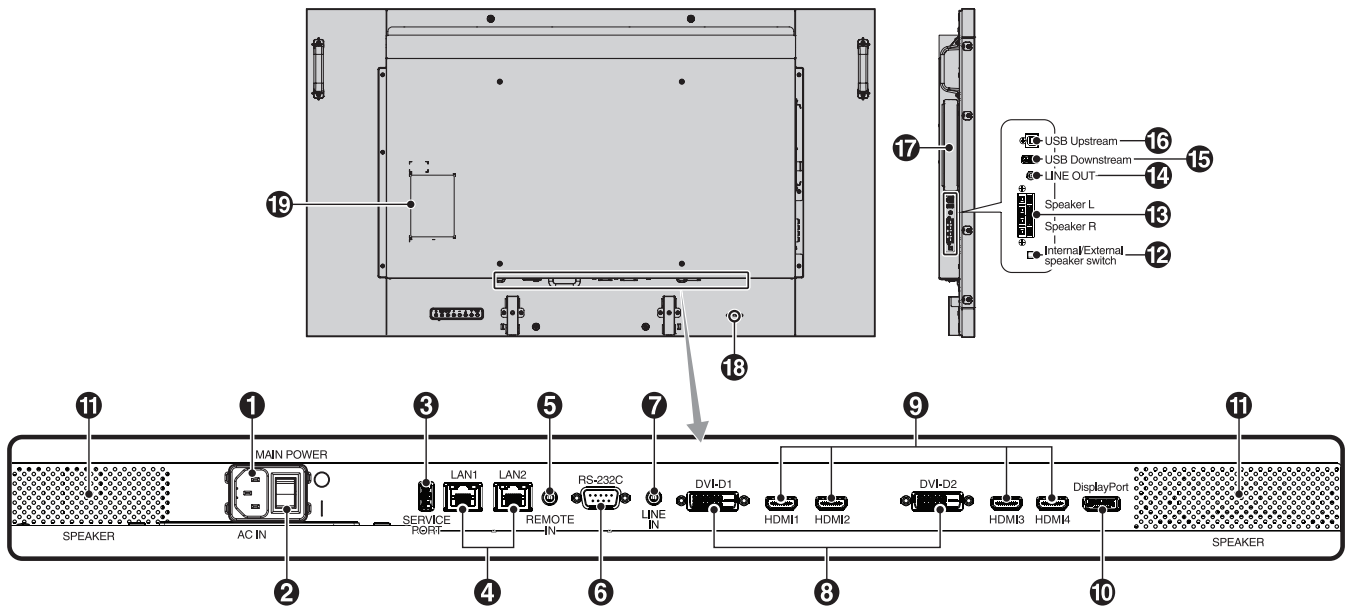

1 Conector de entrada CA

Conecta el cable de alimentación que se suministra con el producto.

2 Interruptor principal de encendido

Interruptor de encendido/apagado para encender y apagar el monitor.

3 Puerto de servicio

Esta ranura USB está pensada para realizar futuras actualizaciones del software.

4 Puerto LAN (RJ-45)

Conexión LAN. Véase la página 37 y 40.
NOTA: Conceda prioridad de uso a LAN1.

5 REMOTE IN

Utilice el mando a distancia alámbrico opcional conectándolo a su monitor.

NOTA: No utilice este conector a menos que se le indique específicamente.

6 RS-232C (D-Sub de 9 clavijas)

Conecte la entrada RS-232C de un equipo externo, como un ordenador, para controlar las funciones RS-232C.

7 LINE IN

Para introducir señales de audio desde un equipo externo, como ordenadores o reproductores.

8 DVI IN (DVI-D) (Dual Link)

Para introducir señales digitales RGB desde un ordenador o un dispositivo HDTV que incorpore una salida de RGB digital.
* Este conector no es compatible con la entrada analógica.

9 HDMI IN

Para dar entrada a señales HDMI digitales.

10 DisplayPort IN

Para dar entrada a señales DisplayPort.

11 Altavoz interno

12 Conmutador altavoz interno/externo

: Altavoz interno : Altavoz externo.

NOTA: Apague el monitor cuando utilice el conmutador altavoz interno/externo.

13 TERMINAL DE ALTAVOZ EXTERNO

Para dar salida a la señal de audio desde LINE IN, DisplayPort y HDMI.

El terminal rojo es el que lleva el signo de suma (+).
El terminal negro es el que lleva el signo de resta (-).

NOTA: este terminal de altavoz es para un altavoz de 15 W + 15 W (8 ohmios).

14 LINE OUT

Para dar salida a la señal de audio desde LINE IN, DisplayPort y HDMI a un dispositivo externo (receptor estéreo, amplificador, etc.).

NOTA: Este conector no es un terminal de auriculares.

15 Puerto downstream USB

Para conectar el monitor con dispositivos USB.

16 Puerto upstream USB

Para conectar el monitor con equipo externo, como un ordenador.

17 Ranura para placa opcional

Hay disponibles accesorios para las ranuras 2. Póngase en contacto con el proveedor para obtener información detallada.


NOTA: Póngase en contacto con el proveedor para obtener información sobre la disponibilidad de la placa opcional.

18 Candado Kensington

Para garantizar la seguridad y evitar robos.

19 Etiqueta de clasificación

Mando a distancia

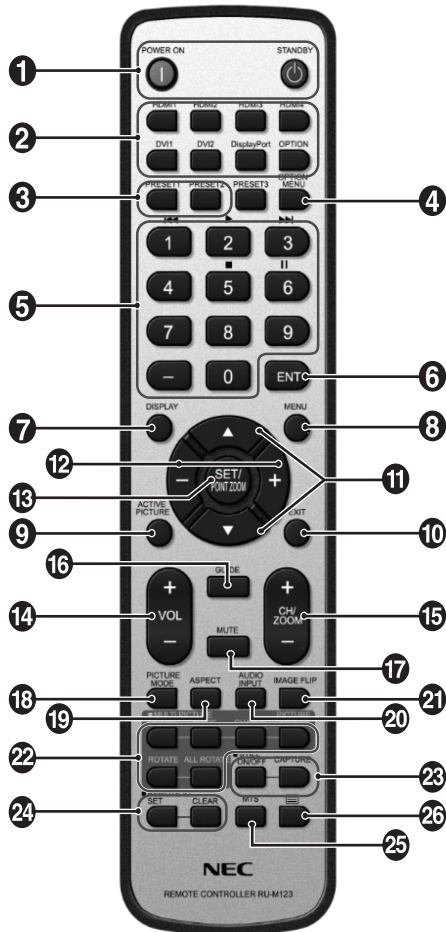

1 Botón de ENCENDIDO

Enciende el monitor y activa el modo en espera.

2 Botón INPUT

Selecciona la señal de entrada

- HDMI1: HDMI1
- HDMI2: HDMI2
- HDMI3: HDMI3
- HDMI4: HDMI4
- DVI1: DVI1
- DVI2: DVI2
- DisplayPort: DPORT
- OPTION: OPTION*2

3 Botón MULTI INPUT

Selecciona la señal de entrada. Véase la página 32.

- PREAJUSTE1: PREAJUSTE1*3
- PREAJUSTE2: PREAJUSTE2*3.

4 Botón OPTION MENU*1

5 TECLADO

Pulse los botones para establecer y cambiar contraseñas, cambiar de canal y establecer el ID REMOTO.

6 Botón ENT*1

7 Botón DISPLAY

Activa o desactiva la información OSD. Véase la página 21.

8 Botón MENU

Activa o desactiva el modo de menú.

9 Botón IMAGEN ACTIVA

Selecciona la imagen activa.

10 Botón EXIT

Vuelve al menú previo dentro del menú OSD.

11 Botón ARRIBA/ABAJO (▲/▼)

Tiene la misma función que el botón ▲▼ que permite desplazar el área seleccionada arriba o abajo para seleccionar las opciones de ajuste en el menú OSD. La pequeña pantalla que ha ajustado el modo PIP se mueve hacia arriba o hacia abajo.

12 Botón MÁS/MENOS (+/-)

Aumenta o disminuye el nivel de ajuste dentro de la configuración del menú OSD. La pequeña pantalla que ha ajustado el modo PIP se mueve hacia arriba o hacia abajo y aumenta o disminuye de tamaño.

13 Botón SET/POINT ZOOM

Realiza la selección. Activa la función POINT ZOOM cuando no aparece el menú OSD.

14 Botón BAJAR/SUBIR VOLUMEN (VOL +/-)

Aumenta o reduce la señal de salida de audio.

15 Botón AUMENTAR/DISMINUIR ZOOM (CH/ZOOM +/-)*1

Aumenta o reduce el nivel de zoom.

16 Botón GUIDE*1

17 Botón MUTE

Activa y desactiva la función de silencio.

18 Botón PICTURE MODE

Selecciona el modo de imagen, [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [CUSTOM1], [CUSTOM2], [SVE-(1-5) SETTINGS]. Véase la página 24.

HIGHBRIGHT: para imágenes en movimiento, por ejemplo, DVD.

STANDARD: para imágenes.

sRGB: para imágenes de texto.

CINEMA: para películas.

CUSTOM1 y CUSTOM2: activa la función de ajuste automático de intensidad de la luz. Véase la página 34.

SVE-(1-5) SETTINGS: para imágenes y películas.

19 Botón ASPECTO

Selecciona el aspecto de la imagen: [COMPLETA], [ANCHA], [DINÁMICO], [1:1], [ZOOM] y [NORMAL]. Véase la página 20.

20 Botón AUDIO INPUT

Selecciona la fuente de entrada de audio [LINE IN], [OPTION]*2, [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3], [HDMI4], [DPORT].

21 Botón INVERTIR IMAGEN

Alternar entre [ROTAR H], [ROTAR V], [GIRAR 180°] y [NINGUNO]. Véase la página 27.

22 Botón IMAGEN MÚLTI.

Botón ON/OFF: Permite cambiar entre ON y OFF. Véase la página 20.

Botón MODO: Seleccione el número de imagen y un modo entre PIP, PBP1, PBP2, PBP3.

Botón CHANGE: Selecciona un par de imágenes. Puede intercambiar la posición de ambas imágenes.

Botón ASPECTO IMAGEN: Selecciona el aspecto del marco de la imagen activa.

Botón ROTAR: Selecciona una imagen múltiple para rotarla 90°.

Botón ROTAR TODO: Todas las imágenes rotan 90°. Cuando IMAGEN MÚLTI. está en OFF, la única imagen que se muestra rota 90°.

NOTA: Permite modificar el tamaño de cada imagen múltiple pulsando el botón SET/POINT ZOOM durante el modo de imagen múltiple.

No puede seleccionar ninguna entrada diferente de la del ajuste de SELECCIÓN HDMI/DVI.

23 Botón STILL*4

Botón ON/OFF: Activa y desactiva el modo de imagen fija.

Botón STILL CAPTURE: Captura la imagen fija.

NOTA: Esta función se libera al seleccionar MODO IMAGEN MÚLTIPLE, TEXT TICKER, PROTECTOR PANTALLA, POINT ZOOM, INVERTIR IMAGEN excepto NINGUNO, SÚPER en CAMBIO ENTRADA, CONFIGURACIÓN ENTRADA.

Cuando STILL está activado, no está disponible ROTAR.

24 Botón REMOTE ID

Activa la función ID REMOTO. Véase la página 36.

25 Botón MTS*1

26 Botón *1

Activa los subtítulos.

NOTA: Solo entradas VIDEO*2, S-VIDEO*2.

*1: La acción de este botón depende de la placa opcional que utilice. Consulte el manual de usuario de la placa opcional para obtener más información.

*2: Esta función depende de la placa opcional que utilice.

*3: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.


*4: Si usa la entrada de señal OPCIÓN, esta función dependerá de la placa opcional que esté usando.

NOTA: Los botones que no tienen explicación no funcionan.

Funcionamiento del mando a distancia

Señale con la parte superior del mando a distancia hacia el sensor de control remoto del monitor LCD mientras pulsa el botón.

Utilice el mando a una distancia máxima de 7 m desde la parte frontal del sensor del mando a distancia y dentro de un ángulo horizontal y vertical de 30°, a una distancia máxima de 3,5 m.

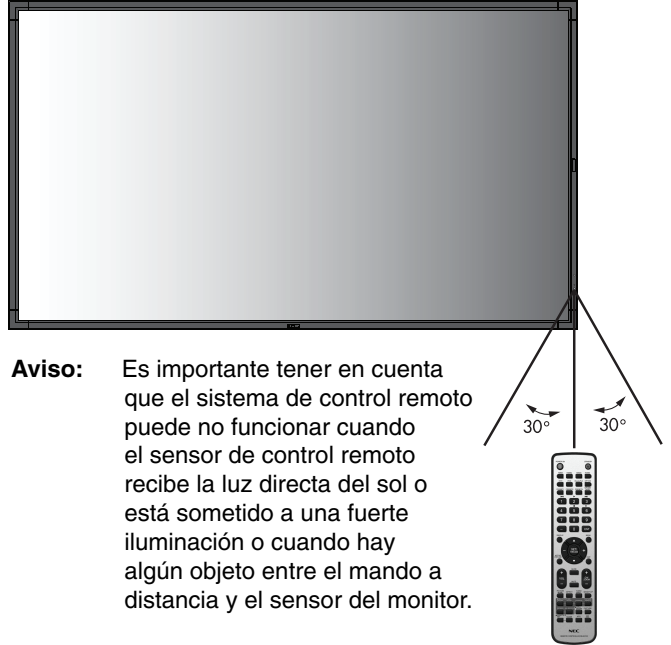

Aviso: Es importante tener en cuenta que el sistema de control remoto puede no funcionar cuando el sensor de control remoto recibe la luz directa del sol o está sometido a una fuerte iluminación o cuando hay algún objeto entre el mando a distancia y el sensor del monitor.

Manejo del mando a distancia

- No lo exponga a golpes fuertes.
- Evite el contacto del mando a distancia con agua u otros líquidos. Si el mando a distancia se moja, séquelo inmediatamente.
- Evite exponerlo al calor y al vapor.
- No abra el mando a distancia excepto para colocar las pilas.

1. Determine la ubicación de la instalación

AVISO: La instalación del monitor debe realizarla un técnico cualificado. Póngase en contacto con el proveedor para obtener más información.

AVISO: SE NECESITAN AL MENOS DOS PERSONAS PARA MOVER O INSTALAR EL MONITOR LCD. Si no se tiene en cuenta esta advertencia y el monitor se cae, podría causar lesiones.

AVISO: Evite montar o utilizar el monitor boca abajo.

AVISO: Este monitor tiene sensores de temperatura internos y ventiladores, además de un ventilador para la placa opcional.

Si el monitor se calienta demasiado, los ventiladores se ponen en marcha automáticamente.

El ventilador opcional que enfría la placa se activa incluso cuando la temperatura es inferior a la temperatura de funcionamiento normal.


Si el monitor se calienta demasiado mientras el ventilador está en funcionamiento, aparece el menú "Aviso". En caso de aparecer el menú "Aviso", deje de utilizar la unidad para que se enfríe. El uso de ventiladores reduce la probabilidad de una avería temprana de la unidad y puede contribuir a reducir el deterioro de la imagen y la "Persistencia de la imagen".

Si el monitor se utiliza en un área cerrada o si el panel LCD se cubre con una pantalla protectora, compruebe la temperatura interna del monitor mediante el control ESTADO TEMPERATURA del menú OSD (véase la página 31). Si la temperatura es superior a la temperatura de funcionamiento normalmente, active el ventilador desde el menú CONTROL VENTILADOR en el OSD (véase la página 31).

IMPORTANTE: Coloque la lámina protectora debajo del monitor para que no se raye el panel LCD. La lámina protectora envuelve el monitor en el embalaje original.

2. Instale las pilas del mando a distancia

El mando a distancia funciona con dos pilas AAA de 1,5 V. Para colocar las pilas o cambiarlas:

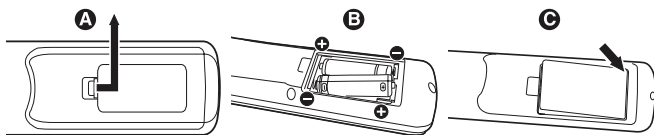

A. Presione la tapa y desplácela para abrirla.

B. Coloque las pilas siguiendo la indicación de los polos (+) y (-) que hay en el receptáculo.

C. Vuelva a colocar la tapa.

AVISO: El uso incorrecto de las pilas puede provocar fugas o roturas en las mismas.

NEC recomienda el siguiente uso de pilas:

- Coloque las pilas "AAA" de manera que la indicación de los polos (+) y (-) de cada pila corresponda a la indicación (+) y (-) del compartimento.
- No mezcle distintas marcas de pila.
- No mezcle pilas nuevas y viejas. Si lo hace, puede acortar la duración de la pila o hacer que se produzcan fugas de líquidos en ella.
- Retire inmediatamente las pilas agotadas para evitar que el ácido de las mismas se derrame en el compartimento.
- Si cae ácido, no lo toque, ya que puede dañarle la piel.

NOTA: Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas.

3. Conecte el equipo externo (véanse las páginas 17 y 18)


- Para proteger el equipo externo, apague el interruptor principal antes de realizar las conexiones.
- Consulte el manual del usuario del equipo para obtener más información.

NOTA: No conecte ni desconecte cables al encender el monitor o cualquier otro equipo externo, ya que esto podría originar la pérdida de la imagen del monitor.

4. Conecte el cable de alimentación que se suministra con el producto

- El equipo debería estar instalado cerca de un enchufe de fácil acceso.
- Sujete el cable de alimentación al monitor con el tornillo y la abrazadera.
- Introduzca completamente los terminales de contacto en la toma de corriente. Si la conexión no queda bien sujeta puede deteriorarse la imagen.

NOTA: Consulte el apartado "Medidas de seguridad y mantenimiento" de este manual para asegurarse de que selecciona el cable de alimentación de CA adecuado.

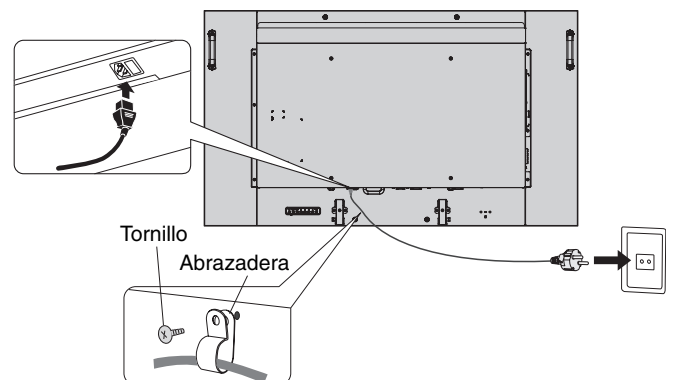

5. Encienda todos los equipos externos

Una vez que los equipos estén conectados al ordenador, encienda primero el ordenador.

6. Funcionamiento del equipo externo

Muestre la señal de la pantalla desde la fuente de entrada deseada.

7. Ajuste el sonido

Realice los ajustes de volumen necesarios.

8. Ajuste la pantalla (véanse las páginas 26 y 27)

Realice ajustes en la posición de la imagen, si es preciso.

9. Ajuste la imagen (véase la página 26)

Si es necesario, realice ajustes, como la luz de fondo o el contraste.

AVISO: Esta unidad se ha calibrado de fábrica de conformidad con la DICOM Apartado 14. Cualquier cambio manual de la luminancia o de cualquier otra característica de las imágenes perjudicará la precisión de la reproducción de imágenes en escala de grises. Use el software de calibración GammaCompMD QA de NEC y un sensor de color USB externo para mantener la mejor calidad en la reproducción de las imágenes. Véase también la página 6.

10. Ajustes recomendados

Para reducir el riesgo de la “Persistencia de la imagen”, ajuste los siguientes elementos en función de la aplicación utilizada: PROTECTOR PANTALLA, COLOR DEL BORDE (véase la página 31), FECHA Y HORA (véase la página 28), AJUSTES DE PROGRAMA (véase la página 27).

También se recomienda activar el ajuste CONTROL VENTILADOR (véase la página 31).

Conexiones


NOTA: No conecte ni desconecte cables al encender el monitor o cualquier otro equipo externo, ya que esto podría originar la pérdida de la imagen del monitor.

NOTA: Utilice un cable de audio sin resistor integrado. Si utiliza un cable de audio con resistor integrado se reduce el sonido.

Antes de realizar las conexiones:

- * En primer lugar, apague todos los equipos acoplados y realice las conexiones.
- * Consulte el manual del usuario incluido con cada pieza del equipo.

Esquema de conexiones eléctricas

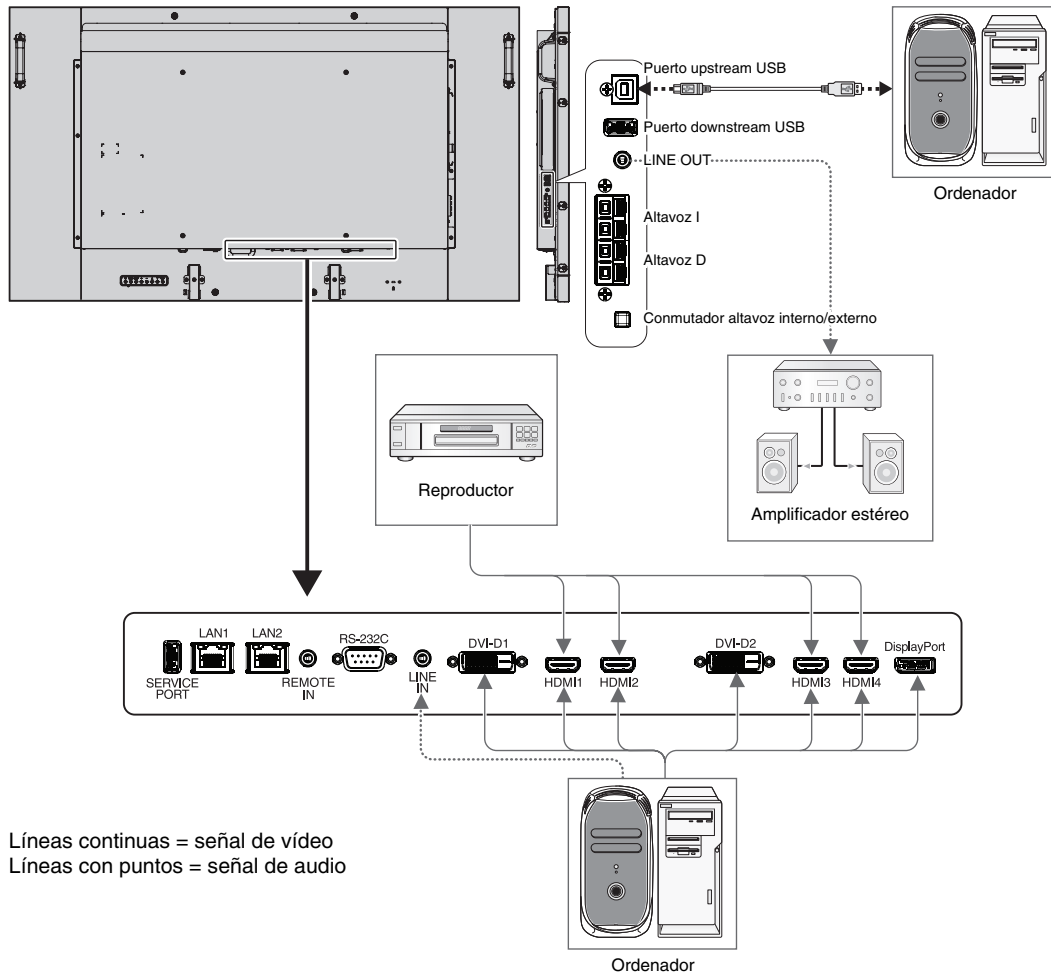

Equipo conectado	Conexión de terminal	Ajustes en OPCIÓN DE TERMINAL	SELECCIÓN HDMI/DVI*2	Nombre de señal de entrada	Conexión de terminal de audio	Botón de entrada en el mando a distancia
AV	DisplayPort	-	-	DPORT	DPORT	DisplayPort
	DVI1 (DVI-D1)	DVI-HD	DVI*3, HDMI/DVI	DVI1	LINE IN	DVI1
	DVI2 (DVI-D2)	DVI-HD	DVI*3, HDMI/DVI	DVI2	LINE IN	DVI2
	HDMI1	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI1	HDMI1	HDMI1
	HDMI2	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI2	HDMI2	HDMI2
	HDMI3	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI3	HDMI3	HDMI3
	HDMI4	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI4	HDMI4	HDMI4
Opción	-	-	OPTION	OPTION	OPTION	
PC	DisplayPort	-	-	DPORT	DPORT	DisplayPort
	DVI1 (DVI-D1)	DVI-HD/DVI-PC*1	DVI*3, HDMI/DVI	DVI1	LINE IN	DVI1
	DVI2 (DVI-D2)	DVI-HD/DVI-PC*1	DVI*3, HDMI/DVI	DVI2	LINE IN	DVI2
	HDMI1	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI1	HDMI1	HDMI1
	HDMI2	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI2	HDMI2	HDMI2
	HDMI3	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI3	HDMI3	HDMI3
	HDMI4	ORIG./AMPL.*1	HDMI, HDMI/DVI	HDMI4	HDMI4	HDMI4
Opción	-	-	OPTION	OPTION	OPTION	

*1: Depende del tipo de señal.

*2: CONFIGURACIÓN ENTRADA (Véase la página 21).

*3: Los ajustes preestablecidos de fábrica no reproducen una señal HDMI. Para ver la señal HDMI, seleccione HDMI en SELECCIÓN HDMI/DVI.

Conexión de un ordenador personal

Si conecta su ordenador al monitor podrá reproducir la salida de señal de vídeo del ordenador.

Puede que algunos controladores de pantalla no puedan admitir la resolución necesaria para una adecuada reproducción de las imágenes. Para garantizar el rendimiento visual tal como se ha previsto, el monitor debe utilizarse únicamente con los controladores de pantalla aprobados por NEC.

El monitor LCD mostrará una imagen adecuada al ajustar automáticamente la cadencia predefinida.

<Cadencia predefinida típica>

Resolución	Frecuencia de exploración		DVI	HDMI	DisplayPort		Notas
	Horizontal	Vertical			1.2	1.1a	
640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
800 x 600	37,9 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1280 x 720	45,0 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1280 x 768	47,8 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1280 x 800	49,7 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1280 x 960	60,0 kHz	60 Hz	Sí	No	No	No	
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1360 x 768	47,7 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1366 x 768	47,7 kHz	60 Hz	No	Sí	Sí	Sí	
1400 x 1050	65,3 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1440 x 900	55,9 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1600 x 1200	75,0 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1680 x 1050	65,3 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1920 x 1080	67,5 kHz	60 Hz	Sí	Sí	Sí	Sí	
1920 x 1200	74,6 kHz	60 Hz	No	Sí	Sí	Sí	
1920 x 2160	133,3 kHz	60 Hz	Sí*	Sí	Sí	Sí	
3840 x 2160	65,7 kHz	30 Hz	Sí*	No	No	Sí	Resolución recomendada - DVI
3840 x 2160	67,5 kHz	30 Hz	No	Sí	No	No	Resolución recomendada - HDMI
3840 x 2160	133,3 kHz	60 Hz	No	No	Sí	No	Resolución recomendada - DisplayPort
4096 x 2160	54,0 kHz	24 Hz	No	Sí	No	No	Imagen comprimida

*: Cable de enlace doble.

- Si utiliza un dispositivo Macintosh, establezca "Mirroring" (Reflexión) en Off en el dispositivo.
Consulte el manual del usuario de su Macintosh para obtener más información acerca de los requisitos de salida de vídeo de su ordenador y para saber si es necesaria alguna identificación especial o alguna configuración en la imagen y en el monitor.
- Las señales de entrada TMDS deben ajustarse a los estándares DVI.
- Para mantener la calidad en la reproducción de las imágenes, utilice un cable que cumpla los estándares DVI.

Conexión de un reproductor o un ordenador con HDMI

- Utilice el cable HDMI con el logotipo HDMI.
- La señal puede tardar unos momentos en aparecer.
- Es posible que algunos controladores de pantalla no muestren las imágenes correctamente.
- Si utiliza un ordenador con HDMI, establezca OVER SCAN en AUTO o en OFF (véase la página 33).

Conexión de un ordenador con DisplayPort

- Utilice un cable DisplayPort de máxima calidad provisto del logotipo de conformidad de DisplayPort.
- La señal puede tardar unos momentos en aparecer.
- Al conectar un cable DisplayPort a un componente provisto de un adaptador de conversión de señales, es posible que no aparezca la imagen.
- Los cables DisplayPort de máxima calidad activan una función de bloqueo. Cuando quite este cable, mantenga pulsado el botón de arriba para evitar el bloqueo.

Conexión de un ordenador con DVI

- Utilice un cable Dual Link de máxima calidad.
- En el MODO IMAGEN MÚLTIPLE, utilice dos cables Dual Link DVI de la misma marca, modelo y longitud.

Conexión de un dispositivo USB al puerto USB

Puerto upstream: Conecte un ordenador compatible con USB mediante un cable USB.

Puerto downstream: Conecte un dispositivo de memoria flash USB compatible, un ratón o un teclado a un puerto downstream.



- Tenga en cuenta la forma y la orientación del conector al conectar el cable USB.
- Dependiendo del uso de la BIOS, el sistema operativo o el dispositivo, es posible que la función USB no funcione. En este caso, consulte el manual del usuario de su ordenador o dispositivo o póngase en contacto con su proveedor para obtener información detallada.
- Antes de apagar el interruptor de alimentación principal del monitor o de cerrar Windows®, desactive la función USB y desconecte el cable USB del monitor. Puede perder datos si el ordenador se cuelga.
- Es posible que el monitor tarde algunos segundos en reconocer la entrada USB. No desconecte el cable USB, ni lo desconecte y lo vuelva a conectar, antes de que el monitor reconozca la entrada.

Funcionamiento básico


Modos Encendido y Apagado

El indicador de corriente del monitor se iluminará de color verde cuando esté encendido y se apagará o estará de color ámbar si está apagado.

NOTA: El interruptor de alimentación principal debe estar en posición de encendido para encender el monitor con el mando a distancia o el botón de encendido.

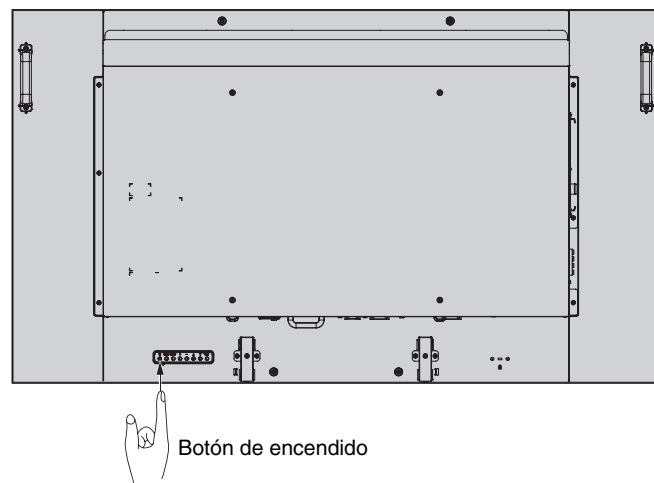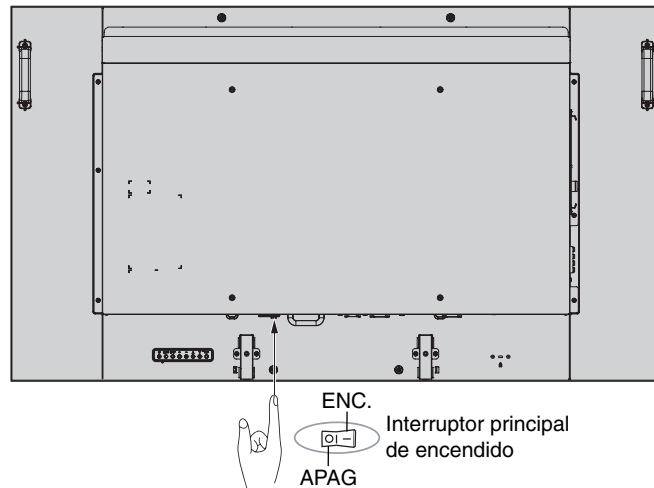

Utilizando el mando a distancia

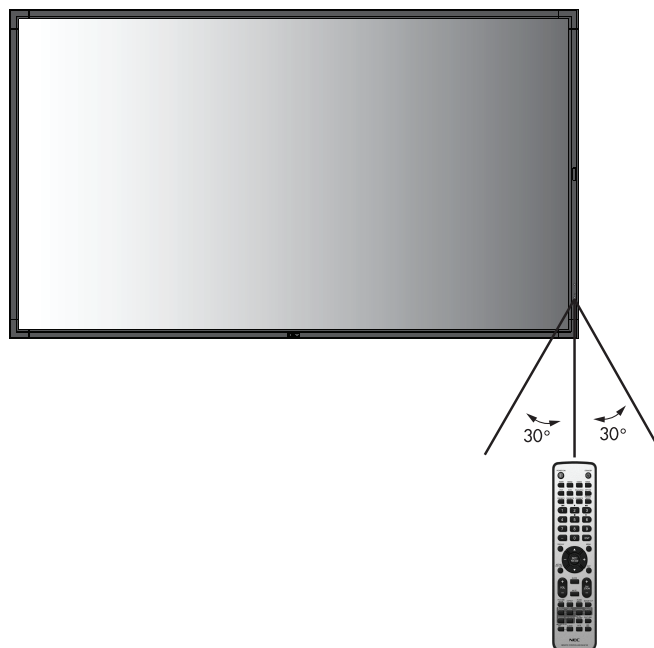

Indicador de corriente

Modo	Piloto de estado
Encendido	Verde*1
APAGADO y ahorro de energía MODO ESPERA AUTO Consumo eléctrico inferior a 0,5 W*2	Apagado
Ahorro de energía MODO ESPERA AUTO Consumo eléctrico inferior a 0,5 W*2	Ámbar
En espera si AJUSTES DE PROGRAMA está activado	Verde y ámbar parpadeando alternativamente
Diagnóstico (detección de fallos)	Rojo parpadeando (véase Solución de problemas en la página 52)
*1 Si selecciona OFF en INDICADOR DE CORRIENTE (véase la página 30), el LED no se iluminará cuando el monitor LCD esté en modo activo. *2 Sin ninguna opción, con los valores de fábrica.	

Configuración inicial

Las ventanas de configuración de ALIM. LAN (véase la página 31) y AHORRO DE ENERGÍA (véase la página 30) aparecen la primera vez que se enciende el monitor. Estos ajustes sólo son necesarios en la configuración inicial. No obstante, la ventana de este mensaje vuelve a aparecer cuando la alimentación está encendida tras realizar la CONF. DE FÁBRICA.

Utilización de la gestión de alimentación

Este monitor cumple la función de Gestión de la alimentación de pantallas (DPM) aprobada por la VESA. La función de gestión de la alimentación es una función de ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo de energía del monitor cuando no se utiliza durante un determinado tiempo el teclado ni el ratón conforme a lo que se haya establecido previamente en el sistema operativo. La función de gestión se ha establecido en MODO ESPERA AUTO. Esto permite que el monitor pase al modo de ahorro de energía cuando no hay señal de vídeo. Se prolongará la vida del monitor y se reducirá el consumo de energía.

NOTA: En función del ordenador y del controlador de pantalla que se utilice, es posible que esta opción no funcione.

NOTA: El monitor se apaga automáticamente en el tiempo preestablecido cuando se pierde la señal de vídeo.

MODO IMAGEN MÚLTIPLE


Seleccione el MODO IMAGEN MÚLTIPLE. Puede seleccionar hasta 4 tipos de imagen. Cuando IMAGEN MÚLTI. está en ON y NÚMERO IMAGEN es 2 IMÁGENES, las imágenes se organizan como las de abajo.

2 IMÁGENES	PIP	PBP1

Cuando IMAGEN MÚLTI. está en ON y NÚMERO IMAGEN es 3 IMÁGENES, las imágenes se organizan como las de abajo.

3 IMÁGENES	PIP	PBP1	PBP2	PBP3

Cuando IMAGEN MÚLTI. está en ON y NÚMERO IMAGEN es 4 IMÁGENES, las imágenes se organizan como las de abajo.

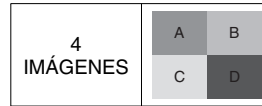

A: IMAGEN 1
B: IMAGEN 2
C: IMAGEN 3
D: IMAGEN 4

MODO IMAGEN MÚLTIPLE (véase la página 28).

Aspecto

Para DVI1, DVI2, DPORT, OPTION*4, PRESET1*5, PRESET2*5
FULL → 1:1 → ZOOM → NORMAL

Para HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*5, PRESET2*5
FULL → WIDE → DYNAMIC → 1:1 → ZOOM → NORMAL

*4: Esta función depende de la placa opcional que utilice.

*5: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.

Relación de la imagen	Visión no cambiada*3	Selección recomendada para el aspecto de la imagen*3
4:3		NORMAL
		DYNAMIC (DINÁMICO)
Comprimir		FULL (COMPLETA)
Buzón		WIDE (ANCHA)

*3 Las áreas grises indican las partes de la pantalla que no se usan.

NORMAL: Reproduce la relación de aspecto según lo que manda la fuente.

FULL (COMPLETA): Se muestra a pantalla completa.

WIDE (ANCHA): Expande una señal con formato 16:9 ampliada a pantalla completa.


DYNAMIC (DINÁMICO): Expande imágenes con formato 4:3 ampliadas a pantalla completa sin linealidad. Parte de la imagen quedará cortada a consecuencia de la ampliación.

1:1: Muestra la imagen en formato de 1 x 1 píxeles.

ZOOM





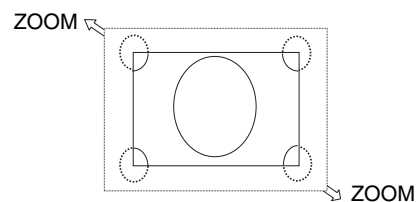






La imagen se puede ampliar hasta superar el área activa de la pantalla.

La imagen que queda fuera del área activa de la pantalla no se muestra.



CONFIGURACIÓN ENTRADA

Pueden crearse imágenes de 3840 x 2160 a 60 Hz usando múltiples señales de entrada. Selecciona las fuentes de entrada. Dependiendo del ajuste de SELECCIÓN HDMI/DVI en el OSD, cambia la selección de CONFIGURACIÓN ENTRADA. Véase la página 32.

SELECCIÓN HDMI/DVI	CONFIGURACIÓN ENTRADA			
	OFF	HDMIx4 (PREAJ.1)	HDMIx2 (PREAJ.1)	HDMIx2 (PREAJ.2)
HDMI				
				
HDMI/DVI	OFF	HDMIx2 (PREAJ.1)		
				
DVI	OFF	DVIx2 (PREAJ.1)		
				
				

CONFIGURACIÓN ENTRADA (véase la página 32).

Información OSD

Información OSD proporciona información como: fuente de entrada, tamaño de imagen, etc. Pulse el botón DISPLAY en el mando a distancia para mostrar Información OSD.



- ① Nombre de la entrada
- ② Modo Entrada de audio
- ③ Aspecto de la imagen
- ④ Información de señal de entrada
- ⑤ Información de la imagen múltiple
- ⑥ Información de comunicaciones

Modo imagen


Dependiendo del ajuste de SPECTRAVIEW ENGINE en la entrada OPCIÓN AVANZADA2 del OSD (véase la página 34), las opciones de selección para Modo de imagen son distintas.

SPECTRAVIEW ENGINE se ha establecido en ON:

Selecciona cinco modos de imagen a través del elemento de menú MODO IMAGEN del menú OSD o mediante el botón PICTURE MODE del mando a distancia inalámbrico.


Seleccione el modo de imagen con el mando a distancia inalámbrico

Al pulsar el botón de Modo de imagen, cambia el modo de imagen.

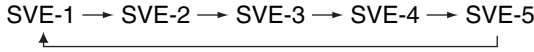

Seleccione o cambie el modo de imagen en el elemento de menú MODO IMAGEN del OSD.

Selecciona una opción desde SVE-1 a SVE-5. Al pulsar nuevamente el botón SET puede ajustar los menús de abajo.

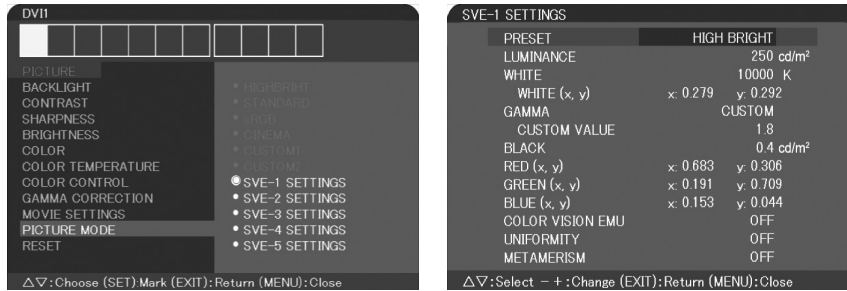



Elija el modo de imagen más adecuado para el tipo de contenido que se muestra.

- Se pueden seleccionar varios modos (sRGB, Adobe®RGB SIM., eciRGB_v2 SIM., DCI SIM., REC-Bt709, HIGH BRIGHT, FULL, DICOM, PROGRAMABLE).
- Cada MODO IMAGEN incluye ajustes de LUMINANCIA, BLANCO, GAMMA, NEGRO, RED, GREEN, BLUE, EMU VISIÓN COLOR, UNIFORMIDAD y METAMERISMO.

Tipos de PREAJUSTES

PREAJUSTE	OBJETIVO
sRGB	Espacio de color estándar utilizado en Internet, sistemas operativos Windows y cámaras digitales. Opción recomendada para la gestión del color en general.
Adobe®RGB SIM.	Proporciona un espacio de color estándar utilizado en aplicaciones gráficas de gama alta, como las cámaras fotográficas digitales profesionales y el tratamiento de imágenes.
eciRGB_v2 SIM.	Proporciona un perfil de espacio de color recomendado por la ECI (European Color Initiative).
DCI SIM.	Configuración del color para cine digital.
REC-Bt709	Configuración del color para televisión de alta definición.
HIGH BRIGHT (BRILLO ALTO)	Ajuste de brillo máximo.
FULL (COMPLETA)	Gama de colores en panel LCD estándar. Apropiado para el uso de aplicaciones con gestión del color.
DICOM	Ajustes médicos para la visualización de radiografías. Opción que cumple la Función de pantalla de escala de grises (GSDF) según lo definido en el estándar DICOM.
PROGRAMMABLE (PROGRAMABLE)	Para los ajustes de la calibración de hardware mediante el software GammaCompMD QA de NEC Display Solutions. NOTA: Después de una calibración de hardware, los ajustes OSD de la lista siguiente se desactivan para evitar manipulaciones intencionadas o accidentales. Tales manipulaciones deteriorarían la calidad de imagen en la visualización de imágenes médicas en escala de grises.

MODO	OBJETIVO
LUMINANCIA	Ajusta el brillo general de la imagen y la pantalla. Pulse IZQ. o DERECHA para ajustarlo.
BLANCO	Permite ajustar el color blanco mediante el ajuste de temperatura o xy. Al reducir la temperatura de color la pantalla se tornará rojiza y al elevarla se volverá azulada. Al aumentar el valor x la pantalla se tornará rojiza, al aumentar el valor y se volverá verdosa, y al reducir ambos valores cambiará a color blanco azulado.

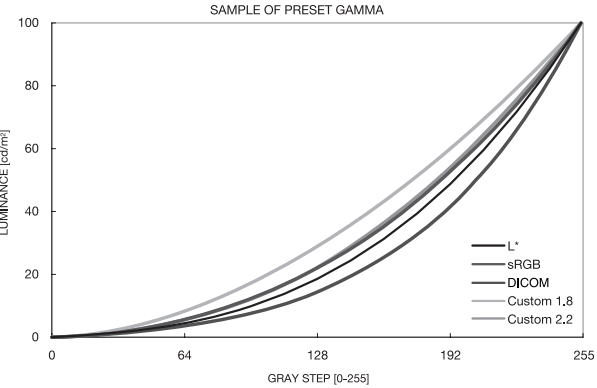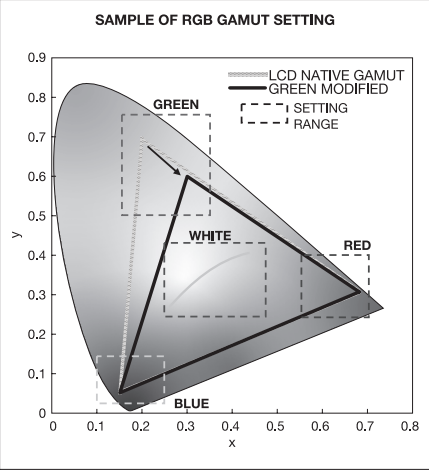GAMMA	<p>Permite seleccionar manualmente el brillo de la escala de grises. Hay cinco opciones: sRGB, L STAR, DICOM y CST. Recomendamos mostrar los datos de imagen en escala de grises en pantalla.</p> <p>sRGB: Ajuste GAMMA para sRGB.</p> <p>L STAR: Ajuste GAMMA para el espacio de color de laboratorio.</p> <p>DICOM: DICOM GSDF (Función de pantalla estándar de escala de grises) suele utilizarse para el tratamiento de imágenes médicas.</p> <p>CST: VALOR PERSONAL. se puede ajustar cuando se selecciona CST como la opción de SELECCIÓN DE GAMMA.</p> <p>VALOR PERSONAL.: El valor gamma se puede seleccionar de 0,5 a 4,0 en intervalos de 0,1.</p> 
NEGRO	Permite ajustar la luminancia del negro.
ROJO VERDE AZUL	<p>Ajusta la gama del color.</p> 
EMULACIÓN DE LA VISIÓN DEL COLOR	<p>Ofrece una vista previa de algunas de las alteraciones típicas en la visión del ojo humano y resulta muy útil para evaluar de qué forma perciben los colores las personas que padecen tales alteraciones. Esta vista previa está disponible en cuatro modos: los tipos P (protanopía), D (deuteranopía) y T (tritanopía) emulan la dicromacia respecto a la visión de los colores, mientras que la escala de grises se emplea para evaluar la legibilidad del contraste.</p> <p>NOTA: Dependiendo de la visión del usuario, incluidas las personas con problemas de visión, la percepción y la impresión de cómo se ve la pantalla puede variar.</p> <p>Para saber cómo ven las personas con algún problema de visión, se utiliza una simulación. No se trata de su visión real. La simulación es una reproducción de las personas con un modo de visión intenso de los colores de tipo P, D o T. Las personas con problemas leves de visión de los colores apenas notarán la diferencia respecto a las personas con una visión normal.</p>
UNIFORMIDAD	<p>Esta función compensa electrónicamente las leves desviaciones de la uniformidad del blanco y de los colores que se pueden producir en el área de la pantalla. Estas desviaciones son típicas de los paneles LCD. Esta función mejora la reproducción del color y nivela la uniformidad de la luminancia del monitor.</p> <p>NOTA: Un número superior consigue un mejor efecto, pero también puede provocar una reducción de la relación de contraste.</p>
METAMERISMO	<p>Compensa la diferencia visual de color respecto a los otros monitores.</p> <p>Si prefiere que la reproducción del color sea más cercana al ajuste de modo de la imagen, desactive esta función.</p>

- NOTA:**
- Cuando el MODO DE IMAGEN seleccionado no coincide con el perfil de color ICC del ordenador, puede que la reproducción del color sea imprecisa.
 - Por lo general, el software para imágenes médicas no utiliza ningún perfil de color ICC.

SPECTRAVIEW ENGINE está en OFF:

Selecciona cinco modos de imagen a través del elemento de menú MODO IMAGEN del menú OSD o mediante el botón PICTURE MODE del mando a distancia inalámbrico.

Para DVI1, DVI2, DPORT, OPTION*, PRESET1*¹, PRESET2*¹
STANDARD → sRGB → CUSTOM1 → CUSTOM2 → HIGHBRIGHT
↑

Para HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*¹, PRESET2*¹
STANDARD → CINEMA → CUSTOM1 → CUSTOM2 → HIGHBRIGHT
↑

Tipos de PREAJUSTES


PREAJUSTE	OBJETIVO
HIGH BRIGHT (BRILLO ALTO)	Ajuste de brillo máximo.
STANDARD	Es la configuración por defecto.
sRGB	Espacio de color estándar utilizado en Internet, sistemas operativos Windows y cámaras digitales. Opción recomendada para la gestión del color en general.
CINEMA	Resalta los tonos oscuros y es la opción más apropiada para las películas.
PROPIA	Activa la función de ajuste automático de intensidad de la luz.

*: Esta función depende de la placa opcional que utilice.


*1: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.

Controles OSD (On-Screen-Display)


NOTA: Algunas funciones puede que no estén disponibles dependiendo del modelo o el equipamiento opcional.

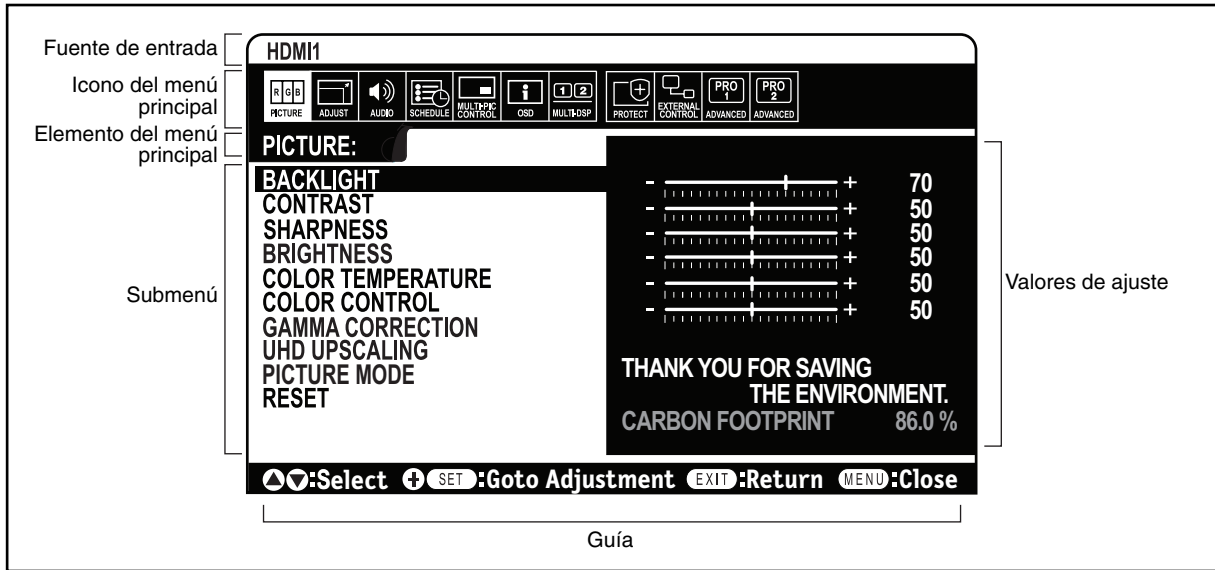


Mando a distancia

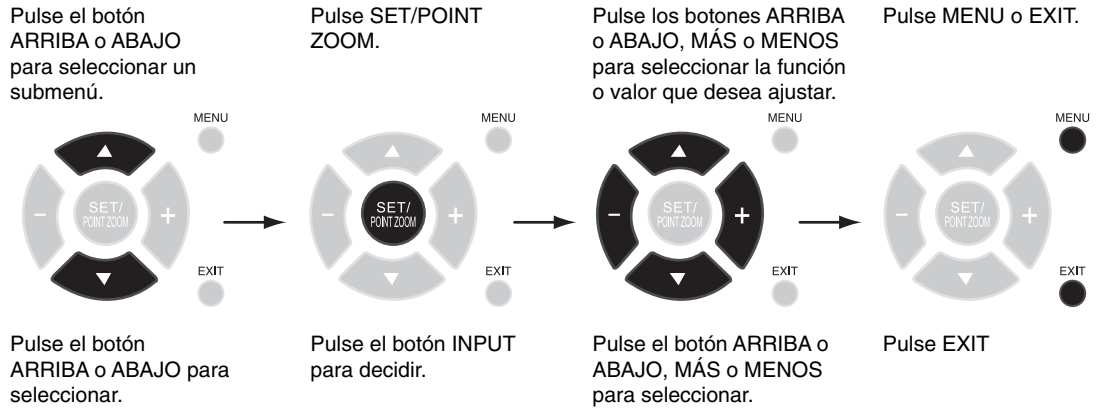

Panel de control

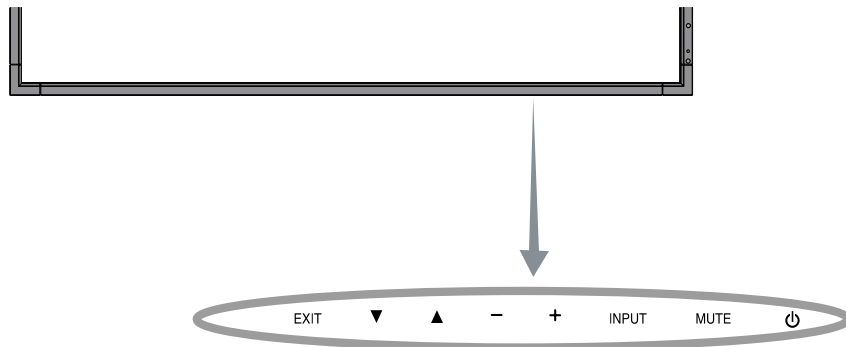

Pantalla OSD

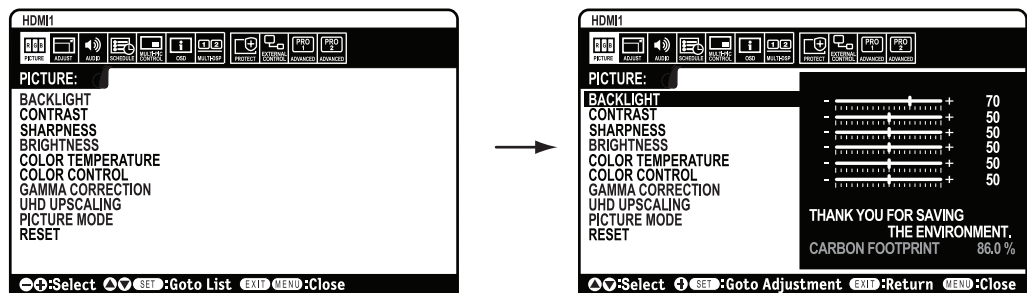


Español

Ajustes

IMAGEN	
LUZ DE FONDO*1	Ajusta el brillo de la imagen global y del fondo. Pulse + o - para ajustarlo. NOTA: Si en SENSOR LUZ AMB. selecciona MODO1 o MODO2, esta función no puede cambiarse.
CONTRASTE*1	Ajusta el brillo de la imagen con respecto a la señal de entrada. Pulse + o - para ajustarlo. NOTA: Si selecciona sRGB en el modo de imagen, esta función no puede cambiarse.
DEFINICIÓN*1	Ajusta la nitidez de la imagen. Pulse + o - para ajustarlo.
BRILLO*1	Ajusta el brillo de la imagen respecto al fondo. Pulse + o - para ajustarlo. NOTA: Si selecciona sRGB en el modo de imagen, esta función no puede cambiarse.
TEMPERATURA COLOR*1	Ajusta la temperatura de color de toda la pantalla. Una temperatura de color baja volverá la pantalla rojiza. Una temperatura de color alta volverá la pantalla azulada. Si es preciso llevar a cabo otros ajustes de la TEMPERATURA, se pueden regular los niveles individuales R/G/B del punto blanco. Para ajustar los niveles R/G/B, establezca PROPIA en la selección de TEMP. COLOR. NOTA: Si selecciona sRGB como modo de imagen, se establece 6500 k de forma predeterminada y no puede cambiarse. Si selecciona PROGRAMABLE1, PROGRAMABLE2 o PROGRAMABLE3 en CORRECCIÓN GAMMA, esta función no puede cambiarse.
CONTROL DEL COLOR*1	Ajusta el tono de rojo, amarillo, verde, aguamarina, azul y magenta. NOTA: Si selecciona sRGB en el modo de imagen, esta función no puede cambiarse.
CORRECCIÓN GAMMA*1	Permite seleccionar la corrección de gamma del monitor para obtener la mejor calidad de imagen. La selección depende del uso deseado. NOTA: Si selecciona sRGB en el modo de imagen, esta función no puede cambiarse.
ESTÁNDAR	El panel LCD se encarga de la corrección de gamma.
2.2	Gamma de monitor típico para un ordenador.
2.4	Adecuado para vídeo (DVD, etc.)
GAMMA S	Gamma especial para determinados tipos de películas. Sube las partes oscuras de la imagen y baja las claras (curva S).
DICOM	Ajustes médicos para visualización de radiografías. Ajuste cumple el estándar DICOM para la Función de pantalla de escala de grises.
PROGRAMABLE1, 2, 3	Con software opcional de NEC se puede cargar una curva de gamma programable. La corrección de gamma (función de la pantalla) puede cambiarse utilizando el software QA de NEC Display Solutions. Utilizado para realizar una calibración conforme con DICOM Apartado 14. Este ajuste se puede seleccionar solo si se utiliza el software de NEC Display Solutions cuando el MODO IMAGEN está establecido en PROGRAMABLE. *Gamma: el modo en que la luminancia se distribuye a través del espectro de intensidad por un monitor, Gamma se define como la relación entre el voltaje de entrada de señal y la salida de la luz del monitor. Un dispositivo lineal perfecto debe tener un valor de gamma de 1.0. Una corrección de gamma conforme con DICOM Apartado 14 sirve para alterar la salida de la luminancia de un monitor y convertirla en grados de gris, con el consiguiente aspecto lineal ante el ojo humano.
UHD UPSCALING*1	Logra el efecto de alta definición.
MODO IMAGEN	Selecciona el modo de imagen: SpectraView Engine = OFF: [HIGHBRIGHT], [STANDARD], [sRGB], [CINEMA], [CUSTOM1], [CUSTOM2]. SpectraView Engine = ON: [SVE-1 SETTINGS], [SVE-2 SETTINGS], [SVE-3 SETTINGS], [SVE-4 SETTINGS] o [SVE-5 SETTINGS]. Véase la página 22.
REAJUSTE	Restablece los siguientes ajustes en el menú IMAGEN a sus valores de fábrica: LUZ DE FONDO, CONTRASTE, DEFINICIÓN, BRILLO, TEMPERATURA COLOR, CONTROL COLOR, CORRECCIÓN GAMMA, UHD UPSCALING.
AJUSTE	
ASPECTO	Permite seleccionar la relación de la imagen de la pantalla. NOTA: DINÁMICO o ZOOM en el ajuste ASPECTO pasarán a imagen COMPLETA, mientras que PUNTO ZOOM, INVERTIR IMAGEN y MOVIMIENTO en PROTECTOR PANTALLA se activarán. Cuando estas opciones dejen de activarse, ASPECTO volverá al ajuste de ASPECTO anterior. Cuando el ASPECTO cambie durante POINT ZOOM, INVERTIR IMAGEN, PROTECTOR PANTALLA, DINÁMICO y ZOOM pasará a imagen COMPLETA. Cuando la CONFIGURACIÓN ENTRADA está activa, no está disponible ZOOM. ZOOM tampoco está disponible con una señal 3840 x 2160 a 60 Hz.
NORMAL	Muestra la relación de aspecto según lo que manda la fuente.
COMPLETA	Se muestra a pantalla completa.
ANCHA	Expande una señal con formato 16:9 ampliada a pantalla completa.
DINÁMICO	Expande imágenes para ocupar toda la pantalla con una imagen no lineal. Parte de la imagen quedará cortada a consecuencia de la ampliación.
1:1	Muestra la imagen en formato de 1 x 1 píxeles. Si la resolución de entrada es mayor que una resolución de 3840 x 2160, la imagen se reducirá para que quepa en la pantalla. Si se ha seleccionado ROTAR en la entrada CTROL IMAGEN MÚLTIPLE, los caracteres y las líneas pueden aparecer borrosos dependiendo de la resolución de la señal.

*1: Si SPECTRAVIEW ENGINE está en ON, esta función aparece desactivada.

ZOOM	La imagen puede ampliarse/reducirse. NOTA: La imagen ampliada, que queda fuera del área activa de la pantalla, no se muestra. La imagen reducida puede mostrarse con cierta degradación.
ZOOM	Mantiene la relación al ampliar.
HZOOM	Valor de zoom horizontal.
VZOOM	Valor de zoom vertical.
H POS	Posición horizontal.
V POS	Posición vertical.
INVERTIR LA IMAGEN	NOTA: Cuando el ASPECTO se establezca en DINÁMICO, la imagen se volverá COMPLETA antes de que se inicie INVERTIR IMAGEN. A continuación, INVERTIR IMAGEN empezará a funcionar. Esta función no está disponible cuando MOVIMIENTO en PROTECTOR PANTALLA o ROTAR están en ON. Si selecciona INVERTIR IMAGEN (salvo NINGUNO), se desactivarán las siguientes funciones: MODO IMAGEN MÚLTIPLE, TEXT TICKER, STILL, POINT ZOOM y ROTAR. Cuando la señal de entrada está entrelazada la imagen puede ser inestable.
INVERTIR IMAGEN	Muestra la imagen invertida de derecha a izquierda, de arriba abajo o en giro. Pulse el botón + o - para seleccionar la entrada.
NINGUNA	Modo Normal. 
ROTAR H	La imagen se invertirá de derecha a izquierda.. 
ROTAR V	La imagen se invertirá de arriba abajo. 
ROTAR 180°	La imagen girará 180 grados. 
ROTAR OSD	Determina la dirección de presentación de OSD. Si lo activa, el OSD se invertirá en función del estado de la imagen.
REAJUSTE	Restablece todos los ajustes de AJUSTE a la configuración de fábrica.
AUDIO	
VOLUMEN	Aumenta o reduce el volumen de salida.
BALANCE	Seleccione ESTÉREO o MONO para la salida de audio. Si selecciona ESTÉREO, ajuste el equilibrio del volumen L/R. Pulse el botón + para mover la imagen de sonido estéreo hacia la derecha. Pulse el botón - para mover la imagen de sonido estéreo hacia la izquierda.
AGUDOS	Para acentuar o reducir la gama de frecuencias altas de las señales de audio. Pulse el botón + para aumentar los AGUDOS. Pulse el botón - para disminuir los AGUDOS.
GRAVES	Para acentuar o reducir la gama de frecuencias bajas de las señales de audio. Pulse el botón + para aumentar los GRAVES. Pulse el botón - para disminuir los GRAVES.
ENVOLVENTE	Sonido envolvente artificial NOTA: LINE OUT está desactivada cuando esta función está activada.
AUDIO IMAGEN MÚLTIPLE	Selecciona la fuente de AUDIO IMAGEN MÚLTIPLE. NOTA: Esta función depende del ajuste IMAGEN MÚLTIPLE.
LINE OUT	Si selecciona VARIABLE podrá controlar el nivel de salida de volumen con el botón de VOLUMEN.
ENTRADA DE AUDIO	Seleccione la fuentes de entrada de audio: LINE IN, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*1.
RETAR. AUD.	Activa un tiempo de retardo para la salida de audio. El TIEM. RET. se puede configurar entre 0 y 100 milisegundos. Seleccione ACTIVADO para activar esta función.
REAJUSTE	Restablezca todas las opciones de AUDIO a los valores de fábrica, salvo VOLUMEN.
PROGRAMA	
TIEMPO DESACTIV.	Configure el monitor para que se apague después de un período de tiempo preestablecido. Puede definir un período de entre 1 y 24 horas.
AJUSTES DE PROGRAMA	Cree un programa de trabajo para el monitor. NOTA: Si su programa abarca más de un día, configure individualmente la hora ENC. y la hora APAG.
LISTA PROGRAMA	Lista de programas de trabajo.

*1: Esta función depende de la placa opcional que utilice.

FECHA Y HORA	Establece la fecha, la hora y la región de horario de verano (ahorro luz). La fecha y la hora se deben configurar para que la función PROGRAMA sea operativa. Véase la página 35.
AÑO	Establezca el año en el reloj de tiempo real.
MES	Establezca el mes en el reloj de tiempo real.
DÍA	Establezca el día en el reloj de tiempo real.
HORA	Establezca la hora en el reloj de tiempo real.
AHORRO LUZ	Active o desactive el horario de verano.
REAJUSTE	Restablece los siguientes ajustes en el menú PROGRAMA a sus valores de fábrica: TIEMPO DESACTIV., AJUSTES DE PROGRAMA.
CTROL IMAGEN MÚLTIPLE*1	
MAN. MODO IMAG. MÚLTI.	Permite que el monitor permanezca en modo IMAGEN MÚLTI. y TEXT TICKER después de apagarlo. Al volver a encenderlo, aparecen IMAGEN MÚLTI. y TEXT TICKER sin tener que acceder al OSD.
MODO IMAGEN MÚLTIPLE*3	Selecciona el número de imagen y el formato de visualización. NOTA: Esta función se libera al seleccionar SÚPER en CAMBIO ENTRADA, PROTECTOR PANTALLA, CONFIGURACIÓN ENTRADA, INVERTIR IMAGEN, excepto NINGUNO. Cuando esta función está en ON, STILL, POINT ZOOM no están disponibles.
IMAGEN MÚLTI.	Quando se selecciona OFF, se muestra solo una imagen. Quando se selecciona ON, se muestran varias imágenes.
NÚMERO IMAGEN	Selecciona [2 IMÁGENES], [3 IMÁGENES], [4 IMÁGENES]. Tras seleccionar NÚMERO IMAGEN, seleccione el formato de visualización PIP, PBP1, PBP2 o PBP3. El formato de visualización cambia dependiendo del ajuste de NÚMERO IMAGEN. Véase la página 20.
IMAGEN ACTIVA*2	
ACTIVO	Quando IMAGEN MÚLTI. está en OFF, [IMAGEN1] es la imagen activa. Quando IMAGEN MÚLTI. está en ON, se establece la imagen activa. NOTA: Esta función depende del ajuste IMAGEN MÚLTI..
MARCO ACTIVO	ENCENDIDO: La imagen activa se muestra dentro de un marco rojo.
SELEC. ENTRADA*3	Seleccione la entrada Imagen Multi. Pulse el botón + o el botón - para seleccionar la entrada. NOTA: Esta función no está disponible si IMAGEN MULTI está en OFF (APAGADO). Tras seleccionar la entrada de Imagen Activa, pulse el botón SET.
TAMAÑO IMAGEN*2	Establezca el tamaño de Imagen Activa. Pulse el botón SET/POINT ZOOM para ajustar el tamaño de la imagen. Pulse + o CH+ para aumentar. Pulse - o CH- para reducir. NOTA: Esta función no está disponible si IMAGEN MÚLTI. está en 4 IMÁGENES PBP. Dependiendo del ajuste de MODO IMAGEN MÚLTIPLE, no se puede cambiar el tamaño de algunas imágenes.
POSICIÓN IMAGEN*2	Establece la ubicación de la Imagen activa. Al pulsar el botón + se mueve la imagen activa a la derecha y al pulsar el botón - se mueve a la izquierda. Al pulsar el botón ▲ se mueve la imagen activa hacia arriba, y al pulsar el botón ▼ se mueve hacia abajo. NOTA: Esta función no está disponible si IMAGEN MÚLTI. está en 4 IMÁGENES PBP.
ASPECTO IMAGEN*2	Selecciona el aspecto del marco de la imagen activa: [COMPLETA], [NORMAL] y [AMPL.]. Para cambiar la relación de aspecto de la imagen de la pantalla, consulte la página 20. NOTA: Esta función depende de los ajustes de IMAGEN MÚLTI.
ROTAR*3	
ROTAR TODO	Quando se selecciona ENC., giran todas las imágenes. Quando se selecciona APAG., define los ajustes de ROTAR individualmente para cada imagen.
IMAGEN1	NOTA: Quando las funciones TEXT TICKER, INVERTIR IMAGEN (excepto NINGUNO) o STILL están en ON o PROTECTOR PANTALLA está activado, esta función no está disponible. Si se ha seleccionado ASPECTO "1:1" los caracteres y las líneas pueden aparecer borrosos, dependiendo de la resolución de la señal.
IMAGEN2	Quando ROTAR está en ON, PUNTO ZOOM e INVERTIR IMAGEN (excepto NINGUNO) no están disponibles. Quando se establece IMAGEN MÚLTI. en OFF, los ajustes de ROTAR de cada imagen se liberan.
IMAGEN3	Quando la señal de entrada se suministra en modo entrelazado, la imagen puede ser inestable.
IMAGEN4	Si la señal de entrada es 3840 x 2160 a 60 Hz y [3 IMÁGENES] o [4 IMÁGENES] está seleccionado en NÚMERO IMAGEN en MODO IMAGEN MÚLTIPLE, ROTAR no está disponible. Si en la señal de entrada está seleccionado ROTAR de CTROL IMAGEN MÚLTIPLE con una velocidad de regeneración rápida, es posible que la imagen no se vea de forma fluida. Para reducir este efecto, establezca en la señal de entrada una velocidad de regeneración más baja.

*1: Esta función se libera al seleccionar SÚPER en CAMBIO ENTRADA, PROTECTOR PANTALLA, CONFIGURACIÓN ENTRADA, INVERTIR IMAGEN excepto NINGUNO.

*2: Quando STILL está activado, esta función no está disponible.

*3: Si selecciona OPCIÓN en la entrada de imagen múltiple, esta función dependerá de la placa opcional que esté usando.

TEXT TICKER*1		
	MODO	Activa Text Ticker y le permite establecer la dirección Horizontal o Vertical.
	POSICIÓN	Selecciona la posición del Text Ticker en la pantalla.
	TAMAÑO	Determina el tamaño del Text Ticker en relación con el tamaño total de la pantalla.
	DETECTAR	Activa la detección automática del Text Ticker.
	IMAGEN1	Selecciona las señales de entrada.
	IMAGEN2	Selecciona las señales de entrada. NOTA: Cuando esta función está activa, POINT ZOOM, STILL y ROTAR no están disponibles.
REAJUSTE		Restablece las opciones de CTROL IMAGEN MÚLTIPLE a la configuración de fábrica, excepto SELEC. ENTRADA y ASPECTO IMAGEN.
OSD		
IDIOMA		Permite seleccionar el idioma que utiliza el OSD.
	ENGLISH	
	DEUTSCH	
	FRANÇAIS	
	ITALIANO	
	ESPAÑOL	
	SVENSKA	
	РУССКИЙ	
	中文	
	日本語	
TIEMPO VISUAL. MENÚ		Desactiva el OSD después de un período de inactividad. Los valores preseleccionados son 10-240 segundos.
LOCALIZACIÓN OSD		Determina la posición en la pantalla donde aparece OSD.
	ARRIBA	
	ABAJO	
	DERECHA	
	IZQ.	
INFORMACIÓN OSD		Permite seleccionar si se muestra la información OSD. La información OSD se mostrará cuando cambie la señal o la fuente de entrada. La información OSD también avisará si no hay señal o está fuera de alcance. Es posible seleccionar un intervalo de 3 a 10 segundos para que aparezca la información OSD.
	INFO. COMUNICACIÓN	Al pulsar el botón Display del mando a distancia, se mostrarán ID MONITOR y DIRECCIÓN IP.
INFORMACIÓN MONITOR		Muestra el nombre del modelo, el número de serie y la versión de firmware del monitor. AHORRO DE CO2: Muestra la información del ahorro de CO2 estimado en kg. El factor de reducción de emisiones de CO2 en el cálculo de ahorro de CO2 se basa en OECD (edición 2008). USO DE CO2: Muestra la información del uso de CO2 estimado en kg. Se trata de un estimado aritmético, no del valor real de la medición. El estimado no utiliza ninguna opción.
TRANSPARENCIA OSD		Selecciona la transparencia del OSD.
ROTACIÓN DE OSD		Determina si la orientación del OSD es horizontal o vertical.
	HORIZONTAL	Muestra el OSD con la orientación horizontal.
	VERTICAL	Muestra el OSD con la orientación vertical.
NOMBRE ENTRADA		Puede crear un nombre para la ENTRADA que está utilizando. Máx.: 8 caracteres, incluidos espacios, A-Z, 0-9 y algunos símbolos.
MEMO		Define un título y un mensaje a través del servidor HTTP. Véase la página 48.
REAJUSTE		Restablece los siguientes ajustes en el menú OSD a sus valores de fábrica: TIEMPO VISUAL. MENÚ, LOCALIZACIÓN OSD, INFORMACIÓN OSD, TRANSPARENCIA OSD.

*1: Si selecciona OPCIÓN en la entrada de imagen múltiple, esta función dependerá de la placa opcional que esté usando.

MULTIPANTALLA

CONTROL DE ID	Establece el número de ID del monitor del 1 al 100 y el ID de grupo de la A a la J. PANT. DETEC. muestra el número de todos los monitores incluidos en la cadena de cables de LAN conectados. NOTA: El ID del grupo está formado por varias selecciones.
ID AUTOMÁTICO	Cuando se selecciona SÍ, los números de ID de monitor se establecen automáticamente en todos los monitores que siguen en la cadena. NOTA: Todos los monitores incluidos en la cadena deben estar encendidos. Si ejecuta esta función mientras se encuentra en modo de espera o en modo de ahorro de energía, debe tener activado ALIM. LAN.
REAJ. ID AUTO	Restablece el número de ID de todos los monitores incluidos en la cadena. NOTA: Si cambia el número de monitores incluidos en la cadena, deberá ejecutar REAJ. ID AUTO.
AJUSTES BLOQUEO IR	Impide que el monitor se controle con el mando a distancia inalámbrico. Cuando se selecciona ACTIVATE (ACTIVAR), se activan todos los ajustes. NOTA: AJUSTES BLOQUEO IR es una función pensada únicamente para los botones del mando a distancia inalámbrico. No bloquea al acceso a todos los botones de la parte trasera del monitor. Para volver al funcionamiento normal, pulse el botón DISPLAY en el mando a distancia durante 5 segundos.
SELEC. MODO	Selecciona el modo UNLOCK (DESBLOQUEO), ALL LOCK o CUSTOM LOCK.
UNLOCK (DESBLOQUEO)	Todos los botones del mando a distancia pueden usarse para realizar las operaciones habituales.
ALL LOCK	Bloquea todos los botones del mando a distancia.
CUSTOM LOCK	Selecciona los botones que se bloquearán desde el botón ALIMENT., VOLUMEN y ENTRAD. Salvo los ajustes de CUSTOM LOCK, los demás botones del mando a distancia se bloquean. ALIMENT.: Si selecciona LOCK (BLOQUEO), el botón ALIMENT. se bloquea. VOLUMEN: Al seleccionar UNLOCK (DESBLOQUEO), el volumen mínimo y máximo se configura entre VOL.0 y VOL.100. Los botones VOLUMEN (+) y VOLUMEN (-) solo están disponibles desde el volumen mínimo hasta el volumen máximo configurados. Si selecciona LOCK (BLOQUEO), los botones VOLUMEN (+) y VOLUMEN (-) se bloquean. ENTRAD: Si selecciona UNLOCK (DESBLOQUEO), puede escoger hasta tres botones para desbloquearlos, los que prefiera, de entre los siguientes: DVI1, DVI2, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*1, PRESET1*2, PRESET2*2. Los botones no seleccionados se bloquean. Si selecciona LOCK (BLOQUEO), todos los botones ENTRAD se bloquean.
DEMORA DEL ENCENDIDO	Ajusta el tiempo de demora entre el modo "en espera" y acceder al modo "encendido".
TIEM. RET.	DEMORA DEL ENCENDIDO se puede configurar entre 0 y 50 segundos.
ENLACE A ID	Si lo activa, el tiempo de retardo se vinculará al ID del monitor. Cuanto mayor sea el número del ID, mayor será el tiempo de retardo.
INDICADOR DE CORRIENTE	Permite encender o apagar el LED situado en la parte delantera del monitor. Si selecciona OFF, el LED no se iluminará cuando el monitor LCD esté en modo activo.
AJUSTE DE COPIA	Con conexiones en cadena, seleccione las categorías del menú OSD que desee copiar a los otros monitores. NOTA: Cuando utilice esta función, debe encadenar los monitores por medio de cables de LAN. Esa función volverá a la configuración predeterminada al apagar el equipo. Dependiendo de la calidad y del tipo de cable de LAN que utilice, la función tiene un límite en el número de monitores conectados.
INICIO COPIA	Seleccione SÍ y pulse el botón SET para empezar a copiar.
TODAS LAS ENTRADAS	Cuando seleccione esta opción, se copiarán todas las opciones de los terminales de entrada. Por defecto está desactivado.
REAJUSTE	Restablece las opciones de MULTIPANTALLA a los valores de fábrica excepto DEMORA DEL ENCENDIDO.

PROTECCIÓN PANTALLA

AHORRO DE ENERGÍA	Utilice esta función para establecer cuánto tiempo esperará el monitor para cambiar al modo de ahorro de energía después de que se pierda la señal. NOTA: Al conectar a DVI, es posible que el controlador de pantalla no deje de enviar datos digitales aunque la imagen haya desaparecido. Si esto ocurre, el monitor no pasará al modo de gestión de alimentación. AHORRO DE ENERGÍA se desactiva si selecciona DESC. AUTO o PROPIA en SENSOR HUMANO*3.
AHORRO ENERGÍA AUTO	El monitor se apaga automáticamente en el tiempo preestablecido cuando se pierde la señal. Volverá al modo normal cuando se recupere la señal.
MODO ESPERA AUTO	El monitor se apaga automáticamente en el tiempo preestablecido cuando se pierde la señal. Pulse el botón de encendido para activar el monitor en modo normal.
DESACTIVADO	El monitor no se apagará cuando se pierda la señal.

*1: Esta función depende de la placa opcional que utilice.

*2: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.

*3: Esta función solo está disponible si se conecta la unidad de control opcional.

ESTADO TEMPERATURA	Muestra el estado real de los ventiladores, la luz de fondo y los sensores de temperatura.
CONTROL VENTILADOR	Los ventiladores reducen la temperatura interna del monitor para evitar el recalentamiento. Si selecciona AUTO, puede ajustar la temperatura inicial y la velocidad de los ventiladores.
PROTECTOR PANTALLA	Utilice la función PROTECTOR PANTALLA para reducir el riesgo de persistencia de la imagen. NOTA: Esta función se libera cuando CONFIGURACIÓN ENTRADA está activa. Cuando se active el protector de pantalla, la imagen cambiará a imagen COMPLETA. Cuando el protector de pantalla deje de funcionar, la imagen volverá a reproducirse con el ajuste actual de ASPECTO. El protector de pantalla no se puede seleccionar en el caso de una señal de entrada de 3840 x 2160 a 60 Hz. Cuando PROTECTOR PANTALLA está activado, no están disponibles IMAGEN MÚLTI, ROTAR, STILL, INVERTIR IMAGEN (excepto NINGUNO) o TEXT TICKER, PUNTO ZOOM.
GAMMA*	El valor gamma del monitor se modifica y se corrige al seleccionar ENCENDIDO.
LUZ DE FONDO*	El brillo de la luz de fondo se reduce al seleccionar ENCENDIDO. NOTA: No seleccione esta función si el SENSOR LUZ AMB. está en MODO1 o MODO2.
MOVIMIENTO*1	La imagen de la pantalla se amplía ligeramente y se desplaza en 4 direcciones (ARRIBA, ABAJO, DERECHA, IZQ.) a intervalos determinados por el usuario. Puede elegir un tiempo de intervalo y una relación de zoom.
COLOR DEL BORDE	Ajusta el color de los bordes cuando se reproduce una imagen 4:3. Pulse el botón + del mando a distancia. Los bordes se aclararán. Si pulsa el botón -, los bordes se oscurecerán.
CAMBIAR CONTRASEÑA	Permite cambiar la contraseña de seguridad. La contraseña preestablecida en fábrica es 0000.
SEGURIDAD	Bloquea la contraseña de seguridad. BLOQUEO DE INICIO: La contraseña de seguridad es obligatoria si la alimentación del monitor está encendida. BLOQUEO DE CONTROL: La contraseña de seguridad es obligatoria si se pulsa el botón de control remoto o el botón de control del monitor. AMBOS BLOQUEOS: La contraseña de seguridad es obligatoria si la alimentación del monitor está encendida, o si se pulsa un botón del mando a distancia o un botón de control del monitor.
REAJUSTE	Restablece los siguientes ajustes en el menú PROTECCIÓN PANTALLA a los valores de fábrica: AHORRO DE ENERGÍA, CONTROL VENTILADOR, PROTECTOR PANTALLA, COLOR DEL BORDE.
CONTROL EXTERNO	
INFORMACIÓN DE RED	Muestra los ajustes de red actuales.
AJUSTE DIRECCIÓN IP	NOTA: Al cambiar cualquier ajuste de LAN, debe esperar varios segundos hasta que se aplique.
AJUSTE IP	Activando esta opción se asigna automáticamente una dirección IP al monitor de su servidor DHCP. Desactivando esta opción puede introducir una dirección IP fija y los datos de la máscara de subred que le haya proporcionado su administrador de red. NOTA: Si selecciona AUTO en [AJUSTE IP], consulte la dirección IP al administrador de su red.
DIRECCIÓN IP	Si selecciona MANUAL en [AJUSTE IP], establezca la dirección IP del monitor conectado a la red.
MÁSCARA DE SUBRED	Si selecciona MANUAL en [AJUSTE IP], establezca los datos de la máscara de subred del monitor conectado a la red.
GATEWAY PREDETERMINADA	Si selecciona MANUAL en [AJUSTE IP], establezca la gateway predeterminada del monitor conectado a la red. NOTA: Introduzca [0.0.0.0] para eliminar el ajuste.
DNS	Establezca las direcciones IP de los servidores DNS. AUTO: El servidor DNS conectado al monitor asignará automáticamente su dirección IP. MANUAL: Introduzca manualmente la dirección IP del servidor DNS conectado al monitor.
DNS PRIMARIO	Introduzca los ajustes del servidor DNS primario de la red conectada al monitor. NOTA: Introduzca [0.0.0.0] para eliminar el ajuste.
DNS SECUNDARIO	Introduzca los ajustes del servidor DNS secundario de la red conectada al monitor. NOTA: Introduzca [0.0.0.0] para eliminar el ajuste.
ALIM. LAN	Selecciona el modo de funcionamiento de la LAN. Si lo activa, se podrá suministrar energía al módulo de LAN en el modo de ahorro de energía o en el modo en espera. NOTA: Esta función debe estar activada para activar ID AUTOMÁTICO en la entrada MULTIPANTALLA.
DDC/CI	ACTIVADO/DESACTIVADO: Activa o desactiva la comunicación y control bidireccional del monitor.
PING	Confirma la conexión satisfactoria con la red comunicándose a través de una dirección IP preestablecida.
REAJUST DIRECCIÓN IP	Restablece AJUSTE DIRECCIÓN IP a la configuración de fábrica.
REAJUSTE	Restablece los siguientes ajustes en el menú CONTROL EXTERNO a sus valores de fábrica: DDC/CI.

*: Si SPECTRAVIEW ENGINE está en ON, esta función aparece desactivada.

*1: Si selecciona OPCIÓN en la entrada de señal, esta función dependerá de la placa opcional que esté usando.

OPCIÓN AVANZADA 1

DETECCIÓN ENTRADA		<p>Selecciona el método de detección de entrada que debe usar el monitor cuando hay conectados más de dos fuentes de señal.</p> <p>NOTA: Si selecciona SÚPER en CAMBIO ENTRADA, esta función no puede cambiarse.</p>
	NINGUNO	El monitor no busca señales en los otros puertos de entrada de vídeo.
	DETECTAR EL PRIMERO*1	<p>Cuando no existe ninguna señal de entrada de vídeo, el monitor busca una señal de vídeo de otro puerto de entrada de vídeo. Si existe una señal de vídeo en la otra entrada, el monitor pasa automáticamente de la fuente de vídeo actual esta fuente de vídeo activa.</p> <p>El monitor no buscará otras señales de vídeo mientras exista esa fuente de vídeo.</p>
	DETECTAR EL ÚLTIMO*1	Si el monitor reproduce una señal de la fuente de vídeo actual y se suministra una segunda fuente de vídeo al monitor, este pasará automáticamente a la nueva fuente de vídeo. Cuando deja de existir la señal de entrada de vídeo actual, el monitor busca una señal de vídeo en cualquier otra entrada de vídeo. Si existe una señal de vídeo en la otra entrada, el monitor pasa automáticamente de la fuente de vídeo actual esta fuente de vídeo activa.
	DETECCIÓN PERSONALIZ.*1	<p>Establecer la prioridad de las señales de entrada.</p> <p>Al seleccionar DETECCIÓN PERSONALIZ., el monitor busca sólo en las entradas preestablecidas.</p> <p>NOTA: La prioridad de una señal de entrada opcional sólo está disponible en PRIORIDAD3, a excepción del PC opcional con 2 ranuras.</p>
COMP. CABLE LARGO		<p>Compensa la degradación de la imagen provocada por el uso de cables largos.</p> <p>Un número más bajo produce menos compensación.</p> <p>Si una imagen muestra ruido visible, seleccione MODO2 o MODO3.</p> <p>Si usa un cable largo con ecualizador, seleccione MODO0 o MODO1.</p> <p>NOTA: COMP. CABLE LARGO no compensa las señales de vídeo suministradas a través de un cable DisplayPort.</p>
CAMBIO ENTRADA*1		<p>Establece la velocidad del cambio de entrada. Si selecciona SÚPER, podrá cambiar la alta velocidad entre dos señales preestablecidas.</p> <p>NOTA: Si se selecciona RÁPIDA, puede que la imagen se distorsione durante un breve espacio de tiempo al cambiar la fuente de entrada de señal.</p> <p>Cuando CONFIGURACIÓN ENTRADA está ACTIVO, no está disponible SÚPER.</p> <p>Cuando SÚPER está activado, MODO IMAGEN MÚLTIPLE, TEXT TICKER, STILL, PUNTO ZOOM no están disponibles.</p> <p>Esta función debe elegirse cuando se hayan realizado todas las opciones de ajuste para la configuración de las entradas.</p>
OPCIÓN DE TERMINAL		
	SELECCIÓN HDMI/DVI	<p>Selecciona las fuentes del terminal de entrada [HDMI], [DVI] o [HDMI/DVI].</p> <p>NOTA: Sólo se mostrarán las señales de las entradas seleccionadas.</p> <p>La señal HDMI no aparece por un ajuste de fábrica. Para mostrar una señal HDMI en la pantalla, establezca este ajuste.</p>
	CONFIGURACIÓN ENTRADA	<p>Selecciona las fuentes de entrada. Véase la página 21.</p> <p>Cuando esta función está en ON, MODO IMAGEN MÚLTIPLE, TEXT TICKER, PROTECTOR PANTALLA, STILL, PUNTO ZOOM, SÚPER en CAMBIO ENTRADA, ZOOM en ASPECTO no están disponibles.</p>
	HDMI	<p>Selecciona la fuente de entrada, ON u OFF. [HDMIx4 (PREAJ.1)], [HDMIx2 (PREAJ.1)], [HDMIx2 (PREAJ.2)].</p> <p>HDMIx4 (PREAJ.1): Cuando se establece [HDMIx2 (PREAJ.1)] o [HDMIx2 (PREAJ.2)], se desactiva [HDMI x 4 (PREAJ.1)].</p> <p>HDMIx2 (PREAJ.1): Cuando se establece ARRIBA Y ABAJO, se desactiva [HDMIx2 (PREAJ.2)].</p> <p>HDMIx2 (PREAJ.2): Cuando se establece ARRIBA Y ABAJO, se desactiva [HDMIx2 (PREAJ.1)].</p>
	DVI	Selecciona IZDA Y DCHA o ARRIBA Y ABAJO para las fuentes de entrada múltiple [DVIx2 (PREAJ.1)].
	HDMI/DVI	Selecciona IZDA Y DCHA para las fuentes de entrada múltiple [HDMIx2 (PREAJ.1)].
	MODO DVI	<p>Permite seleccionar el tipo de equipo DVI-D conectado a la entrada DVI.</p> <p>Seleccione DVI-HD si hay conectado un ordenador o un reproductor de DVD, los cuales precisan la autenticación HDCP.</p> <p>Seleccione DVI-PC si hay conectado un ordenador, el cual no precisa la autenticación HDCP.</p>
	DisplayPort	Seleccione el modo DisplayPort [1.1a] o [1.2]. Si la resolución de entrada es superior a 3840 x 2160, la imagen se reducirá para que quepa en la pantalla.
	TASA BITS	<p>Si selecciona DisplayPort 1.1a, puede establecer [RBR] o [HBR].</p> <p>Si selecciona DisplayPort 1.2, puede establecer [RBR], [HBR] o [HBR2].</p> <p>NOTA: Esta función depende de los ajustes de DisplayPort.</p>
	SEÑAL HDMI	<p>ORIG.: Para los ajustes del ordenador. Muestra todas las señales de entrada de 0-255 niveles de gris.</p> <p>AMPL.: Para los ajustes de los equipos audiovisuales. Amplía las señales de entrada de 16-235 niveles de gris hasta 0-255 niveles de gris.</p>

*1: Si selecciona OPCIÓN en la entrada de señal, esta función dependerá de la placa opcional que esté usando.

DESENTRELAZADO		Selecciona la función de conversión de IP (entrelazado a progresivo). NOTA: Para la entrada de DVI, es necesario que DVI-HD esté activado en el menú del modo DVI.
	ENC	Convierte las señales entrelazadas en progresivas. Es la configuración predefinida.
	APAG	Desactiva la conversión IP. Esta configuración resulta más adecuada para imágenes en movimiento, pero aumenta el riesgo de retención de imagen.
AJUSTES PELÍCULA		Selecciona los ajustes adecuados para película.
	TELECINE <small>Solo entradas HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*, PRESET2*.</small>	Percibe automáticamente la velocidad de los fotogramas de las fuentes y ofrece una calidad de imagen óptima.
	CONTRASTE ADAPTATIVO*1 <small>Solo entradas HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*, PRESET2*.</small>	Establece el nivel de ajuste para el contraste dinámico.
SOBRESVIAJACIÓN <small>Solo entradas HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PRESET1*, PRESET2*.</small>		Algunos formatos de vídeo pueden precisar modos de escaneado diferentes para reproducir mejor la imagen.
	ENC.	El tamaño de la imagen es mayor de lo que se puede reproducir. El borde de la imagen aparecerá recortado. Aproximadamente el 95 % del contenido de la imagen se mostrará en la pantalla.
	APAG	El tamaño de la imagen permanece dentro del área de la pantalla. En la pantalla se reproduce la imagen completa. NOTA: Si utiliza un ordenador con salida de señal HDMI, establézcalo en APAGADO.
	AUTO*4	Establece automáticamente el modo de escaneado.
AJUSTE OPCIÓN		
	OPCIÓN ALIM.	Permite que el monitor suministre corriente a la ranura de la placa opcional durante el modo de ahorro de energía o el modo de espera. NOTA: Esta función tiene que estar activada cuando se usa la gestión de ahorro de energía en la opción del tipo ranura 2.
	AUDIO*3	Selecciona la señal de entrada de sonido de acuerdo con las especificaciones de la opción del tipo ranura 2. Para activar DIGITAL, seleccione OPTION para la señal de entrada y OPTION para ENTRADA DE AUDIO. NOTA: DIGITAL solo se activa cuando se selecciona OPTION para la señal de entrada y OPTION para ENTRADA DE AUDIO.
	INTERNAL PC*3	Función disponible para un PC con opción del tipo ranura 2.
	OFF WARNING	Si ENCENDIDO OPCIONAL está desactivado, se muestra un mensaje de advertencia cuando el monitor se apaga. NOTA: El mensaje de advertencia no aparece cuando los ajustes de TIEMPO DESACTIV o PROGRAMA han apagado el monitor.
	DESC. AUTO	El monitor se apaga automáticamente cuando el PC interno está apagado o cuando el monitor está en el modo de ahorro de energía. NOTA: Si selecciona APAGADO, el monitor no pasa automáticamente a ENCENDIDO cuando el PC interno está en ENCENDIDO.
	START UP PC	Al seleccionar ENCENDIDO se enciende el PC interno.
	FORCE QUIT	Al seleccionar ENCENDIDO, se lleva a cabo la desconexión obligatoria del PC interno. Utilice esta función cuando el sistema operativo no se pueda apagar manualmente.
	AJUST. CANAL RANURA2*3	Selecciona el tipo de señal de acuerdo con las especificaciones de la opción del tipo ranura 2.
	AUTO	Establece el tipo de señal automáticamente.
	CANAL1	Ocupa toda la pantalla con la señal seleccionada en SELEC. CANAL RANURA2.
	CANAL2	La señal DisplayPort se muestra en la mitad izquierda de la pantalla y la señal TMDS se muestra en la mitad derecha. Si el PC interno no admite alguno de los tipos de señales, la señal existente se mostrará automáticamente en pantalla completa.
	SELEC. CANAL RANURA2*3	Esta función solo está disponible cuando AJUST. CANAL RANURA2 está en CANAL1.
	DPORT	Muestra a pantalla completa la señal DisplayPort del PC opcional del tipo ranura 2.
	TMDS	Muestra a pantalla completa la señal TMDS del PC opcional del tipo ranura 2.
120 Hz (no se puede ajustar)		
PANEL TÁCTIL (no se puede ajustar)		
REAJUSTE		Restablece los siguientes ajustes en el menú OPCIÓN AVANZADA1 a sus valores de fábrica: DETECCIÓN ENTRADA (solo prioridad de las señales de entrada), CAMBIO ENTRADA (excepto para ENTRADA1 y ENTRADA2), OPCIÓN DE TERMINAL, DESENTRELAZADO, AJUSTES PELÍCULA, OVER SCAN, AUDIO en AJUSTE OPCIÓN.

*1: Si SPECTRAVIEW ENGINE está en ON, esta función aparece desactivada.

*2: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.

*3: Esta función depende de la placa opcional que utilice. Cuando cambie el ajuste, apague el monitor y vuelva a encenderlo.

*4: Si selecciona OPCIÓN en la entrada de señal, esta función dependerá de la placa opcional que esté usando.

OPCIÓN AVANZADA2

ATENUACIÓN AUTO*	Ajusta automáticamente la luz de fondo del LCD dependiendo de la cantidad de luz ambiental. NOTA: No active esta función si SPECTRAVIEW ENGINE está activado.
BRILLO AUTOM. <small>Solo entradas DV11, DV12, DPORT, OPTION*1, PRESET*2, PRESET*2*2</small>	Ajusta el nivel de brillo según la señal de entrada. NOTA: No seleccione esta función si SENSOR LUZ AMB. es MODO1 o MODO2. NOTA: No active esta función si SPECTRAVIEW ENGINE está activado.
ATENUAR LUZ DE FONDO <small>(no se puede ajustar)</small>	
SENSOR LUZ AMB.*	<p>La luz de fondo de la pantalla LCD se puede ajustar para aumentarlo o reducirlo en función de la luz ambiental. Si la luz ambiental es brillante, el monitor se volverá más brillante para adaptarse a la luz ambiental. Si la luz ambiental es tenue, el monitor se volverá más tenue para adaptarse a la luz ambiental. La finalidad de esta función es mejorar la visualización para que resulte más cómoda en distintas condiciones de luz. NOTA: Cuando en SENSOR LUZ AMB. se elige MODO1 o MODO2, las opciones LUZ DE FONDO, BRILLO AUTOM. y LUZ DE FONDO de la función PROTECTOR PANTALLA se desactivan. No cubra el sensor de luz ambiente cuando utilice MODO1 o MODO2.</p> <p>Configuración del parámetro AMBIENTE SENSOR LUZ AMB. en OSD, seleccione MODO1 o MODO2 y elija LÍMITE MÁX en ILUMINADO y OSCURO en cada modo. LÍMITE MÁX: Es el nivel máximo de luz de fondo que puede establecer. ILUMINADO: Es el nivel de luz de fondo que alcanzará el monitor cuando el nivel de luz ambiental sea alto. OSCURO: Es el nivel de luz de fondo al que bajará el monitor cuando la luz ambiental sea baja. Cuando se activa SENSOR LUZ AMB., el nivel de luz de fondo de la pantalla cambia automáticamente según las condiciones de luz de la sala (ver figura de abajo).</p> <p>LÍMITE MÁX: El nivel de LUZ DE FONDO está limitado por el nivel que establezca usted. OSCURO: El nivel de LUZ DE FONDO establecido para el monitor que se utiliza cuando el nivel de luz ambiental es bajo. ILUMINADO: El nivel de LUZ DE FONDO establecido para el monitor que se utiliza cuando el nivel de luz ambiental es alto. NOTA: No active esta función si SPECTRAVIEW ENGINE está activado.</p>
SENSOR HUMANO*3	El SENSOR HUMANO tiene tres opciones: NOTA: AHORRO DE ENERGÍA se desactiva si selecciona DESC. AUTO o PROPIA en SENSOR HUMANO. NOTA: No active esta función si SPECTRAVIEW ENGINE está activado.
APAGAR	Sin detección.
DESC. AUTO	Cuando se ha detectado que no hay ninguna persona y ha transcurrido el tiempo establecido, la LUZ DE FONDO* y el VOLUMEN se apagan automáticamente. Cuando alguien vuelve a acercarse al monitor, éste regresa al modo normal.
PROPIA	La LUZ DE FONDO* y el VOLUMEN cambian automáticamente al valor establecido si no se detecta ninguna persona. Cuando alguien vuelve a acercarse al monitor, éste regresa automáticamente al modo normal y reproduce la señal de entrada seleccionada en SELEC. ENTRADA.
INTELLI. WIRELESS DATA	Seleccione ENCENDIDO para activar los INTELLI. WIRELESS DATA (ver página 50). Para utilizar esta función se necesita una contraseña.
SPECTRAVIEW ENGINE	Seleccione ON para activar los SPECTRAVIEW ENGINE (consulte la página 22).
REAJUSTE	Restablece OPCIÓN AVANZADA2 a sus ajustes de fábrica, excepto INTELLI. WIRELESS DATA
CONF. DE FÁBRICA	Todos los elementos vuelven al estado que tenían al salir de fábrica. NOTA: Puede restablecer todos los elementos en todas las pantallas conectadas en cadena. Tenga cuidado de no restablecer todos los elementos inadvertidamente.

*: Si SPECTRAVIEW ENGINE está en ON, esta función aparece desactivada.

*1: Esta función depende de la placa opcional que utilice.

*2: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.

*3: Esta función solo está disponible si se conecta la unidad de control opcional.

NOTA 1: CREACIÓN DE UN PROGRAMA


La función de programa permite encender y apagar el monitor a diferentes horas. Se pueden crear hasta siete programas distintos.

Para crear el programa:

1. Acceda al menú PROGRAMA. Resalte AJUSTES DE PROGRAMA con los botones arriba y abajo. Pulse el botón SET/POINT ZOOM o + para acceder al menú Ajustes. Resalte el número de programa que desee y pulse SET/POINT ZOOM. El cuadro situado junto al número se volverá de color amarillo. Ahora se puede establecer el programa.
2. Utilice el botón abajo para resaltar el ajuste de horas en la entrada ENCENDIDO. Utilice los botones + y - para establecer la hora. Utilice los botones arriba y abajo para resaltar el ajuste de minutos. Utilice los botones + y - para establecer los minutos. Establezca la hora de APAGADO del mismo modo.
3. Utilice las flechas arriba y abajo para resaltar ENTRADA. Utilice los botones + y - para elegir la fuente de entrada. Utilice las flechas arriba y abajo para resaltar MODO IMG. Utilice los botones + y - para elegir el modo de imagen.
4. Utilice el botón de abajo para seleccionar el día en el que se activará el programa. Pulse el botón SET/POINT ZOOM para activarlo. Si desea que la programación se repita cada día, seleccione DIARIO y pulse el botón SET/POINT ZOOM. El círculo de al lado de DIARIO se pondrá amarillo. Si desea una programación semanal, elija los días de la semana con los botones arriba y abajo; pulse SET/POINT ZOOM para seleccionar. A continuación, resalte la opción SEMANAL y pulse SET/POINT ZOOM.
5. Después de crear un programa, se pueden establecer los demás programas. Pulse MENU para salir del OSD o pulse EXIT para volver al menú anterior.

NOTA: si los programas se superponen, el programa con el número más alto tendrá prioridad sobre el programa con el número más bajo. Por ejemplo, el programa 7 tendrá prioridad sobre el programa 1.

Si en ese momento no están disponibles el modo de imagen o la entrada seleccionada, la entrada o el modo de imagen desactivados aparecerán en rojo.

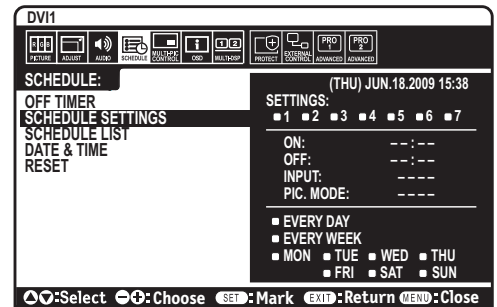

NOTA 2: PERSISTENCIA DE LA IMAGEN

Tenga en cuenta que la tecnología LCD puede sufrir un fenómeno conocido como Persistencia de la imagen. La persistencia de la imagen se produce cuando en la pantalla permanece la "sombra" o el remanente de una imagen. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen de los monitores LCD no es permanente, pero se debe evitar visualizar patrones fijos en el monitor durante largos períodos de tiempo.

Para eliminar la persistencia de la imagen, tenga apagado el monitor tanto tiempo como el que haya permanecido la imagen en la pantalla. Por ejemplo, si una imagen ha permanecido fija en el monitor durante una hora y aparece una "sombra" de esa imagen, debería tener el monitor apagado durante una hora para borrarla.

Como en todos los dispositivos de visualización personales, NEC DISPLAY SOLUTIONS recomienda visualizar imágenes en movimiento y utilizar con regularidad un protector de pantalla con movimiento siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.

Configure las funciones PROTECTOR PANTALLA, FECHA Y HORA y AJUSTES DE PROGRAMA para reducir el riesgo de persistencia de la imagen.

Recomendaciones para una larga vida útil como monitor para visualizar imágenes médicas

Adherencia de la imagen de la pantalla LCD

Cuando la pantalla LCD funciona de forma continua y prolongada, el electrodo del interior de éste acumula en su entorno restos de carga eléctrica, lo que podría provocar la aparición de una imagen residual o "fantasma". (Persistencia de la imagen)

La persistencia de la imagen no es permanente pero, cuando una imagen fija se expone durante un período prolongado, las impurezas iónicas del interior del panel LCD se acumulan a lo largo de la imagen mostrada, por lo que se observa permanentemente. (Adherencia de la imagen)

Para evitar la adherencia de la imagen y prolongar la vida útil del monitor, siga estas recomendaciones:

1. Las imágenes fijas no deben reproducirse durante períodos largos. Cambie las imágenes fijas después de un periodo corto.
2. Cuando no se esté utilizando, apague el monitor con el mando a distancia o utilice la función Gestión de alimentación del PC o las Funciones de programación integradas.
3. Las bajas temperaturas ambiente prolongan la vida del monitor. Utilice los sensores de temperatura ubicados en el interior del monitor cuando se instale una superficie protectora (cristal, acrílico) sobre la superficie de la pantalla del monitor, cuando dicha superficie se encuentre en un espacio cerrado o cuando los monitores estén apilados. Para reducir la temperatura interna, utilice los ventiladores, el protector de pantalla, la función Gestión de la alimentación del PC y el brillo bajo.
4. Utilice el "Modo Salvapantallas" del monitor.

Funciones del mando a distancia

FUNCIÓN DE CONTROL DE ID REMOTO

ID DE MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia puede utilizarse para controlar hasta 100 monitores individuales MultiSync con el llamado modo ID REMOTO. El modo ID REMOTO funciona en combinación con el ID de monitor, lo que permite controlar hasta 100 monitores MultiSync individuales. Por ejemplo: si hay muchos monitores que se utilizan en la misma zona, un mando a distancia en modo normal enviaría señales a todos los monitores a la vez (ver Figura 1). Con el mando en el modo ID REMOTO sólo utilizará un monitor específico del grupo (véase la Figura 2).

PARA ESTABLECER EL ID DE MANDO A DISTANCIA

Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE ID SET en el mando a distancia, utilice el TECLADO para introducir el ID de monitor (1-100) de la pantalla que se controlará con el mando. Después, el mando se puede utilizar para controlar el monitor que tiene ese número de ID de monitor específico.

Cuando se selecciona 0 o cuando el mando a distancia está en modo normal, se controlarán todos los monitores.

PARA ESTABLECER O RESTABLECER EL MODO DEL MANDO A DISTANCIA

Modo ID: para acceder al modo ID, mantenga pulsado el botón REMOTE ID SET durante 2 segundos.

Modo normal: para volver al modo normal, mantenga pulsado el botón REMOTE ID CLEAR durante 2 segundos.

Para un funcionamiento correcto de esta función, a la pantalla se le debe asignar un número de ID de monitor. Dicho número se puede asignar en el menú MULTIPANTALLA del OSD (véase la página 30).

Apunte con el control remoto hacia el sensor remoto del monitor deseado y pulse el botón REMOTE ID SET. El número ID MONITOR se muestra en la pantalla cuando el mando a distancia está en modo ID.

Utilice el control remoto para encender un monitor que tenga un número específico ID MONITOR asignado.

1. Establezca el número ID MONITOR para el monitor (véase la pág. 30) El número de ID DEL MONITOR está comprendido entre 1 y 100. Este número ID MONITOR permite que el control remoto funcione solo con este monitor sin afectar a los otros monitores.
2. En el mando a distancia, mantenga pulsada la tecla REMOTE ID SET mientras introduce con el teclado el número ID del mando a distancia (1-100). El número ID REMOTO debe ser igual al número ID MONITOR del monitor para que pueda controlarse. Escoja "0" para controlar simultáneamente todos los monitores del rango.
3. Apunte con el control remoto hacia el sensor remoto del monitor deseado y pulse el botón REMOTE ID SET.
El número ID MONITOR aparece en rojo en el monitor.
Si el ID CONTROL REMOTO es "0", todos los monitores del rango mostrarán su número ID MONITOR respectivo en color rojo.

Si el número de ID MONITOR se muestra en blanco en el monitor, el número de ID MONITOR y la ID del mando a distancia no son iguales.

NOTA: El ID GRUPO no puede especificarse con el mando a distancia.



Figura 1
Mando en modo normal o el ID REMOTO está configurado en 0



Figura 2
Mando configurado para utilizar ID REMOTO:3


Conexión de varios monitores

Puede controlar varios monitores utilizando RS-232C, REMOTE IN o una conexión en cadena LAN.

NOTA: Si hay varios monitores conectados en cadena existe un límite para los monitores conectables. Antes de especificar manualmente el control o el número ID especificado, ejecute ID AUTOMÁTICO (véase la página 30).

Monitor principal		Monitores secundarios	
Conector		Conector	
ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
RS-232C	LAN2	LAN1	LAN2
REMOTE IN			
LAN1			

Conexión

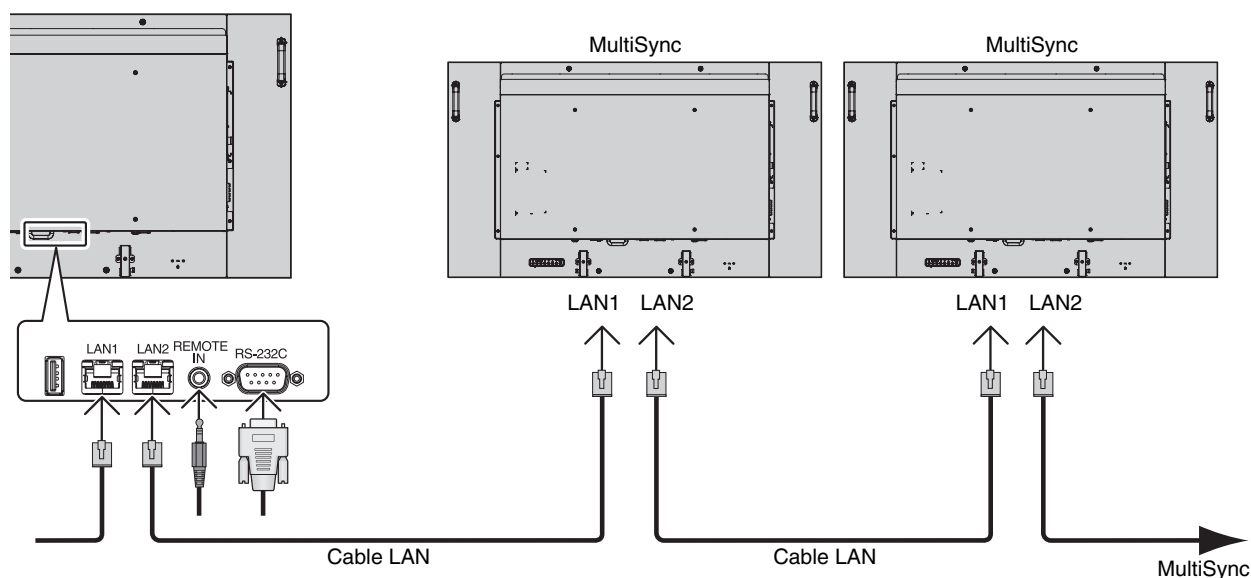

Control del monitor LCD mediante el mando a distancia RS-232C


Este monitor LCD se puede controlar mediante una conexión a un ordenador personal con un terminal RS-232C (de tipo inverso).

Las funciones que se pueden controlar mediante un ordenador personal son las siguientes:

- Encendido y apagado.
- Cambio entre señales de entrada.
- Silencio ENCENDIDO o APAGADO.

Conexión

Monitor LCD + ordenador

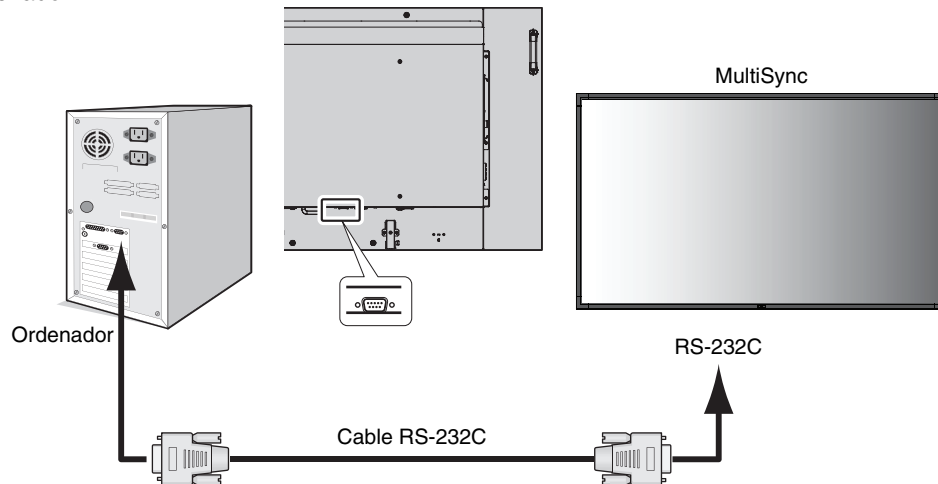

NOTA: Si su ordenador sólo tiene un conector de puerto serie de 25 clavijas, es necesario un adaptador de puerto serie de 25 clavijas. Póngase en contacto con su distribuidor si desea más información. Para ver la asignación de las clavijas consulte "2) Entrada/salida RS-232C" abajo.

Para controlar un monitor, utilice el comando de control. Puede consultar las instrucciones para el comando de control en el CD incluido con el monitor. Si hay varios monitores conectados en cadena existe un límite para el monitor conectable.

1) Interfaz

PROTOCOLO	RS-232C
VELOCIDAD MEDIA DE TRANSFERENCIA EN BAUDIOS	9.600 [bps]
LONGITUD DE DATOS	8 [bits]
BIT DE PARIDAD	NINGUNO
BIT DE PARADA	1 [bit]
CONTROL DE FLUJO	NINGUNO


Este monitor LCD utiliza líneas RXD, TXD y GND para el control de RS-232C.

Para el control RS-232C debería utilizarse el cable de tipo inverso (cable de tipo null modem, no incluido).

2) ASIGNACIÓN DE CLAVIJAS

Entrada/salida RS-232C

Nº clavijas	Nom.
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

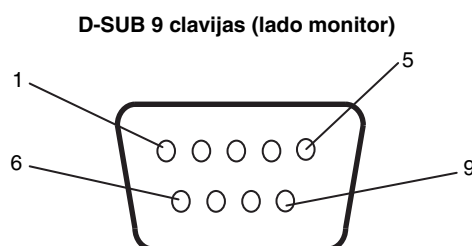

Este monitor LCD utiliza líneas RXD, TXD y GND para el control de RS-232C.

3) Esquema del comando de control

Si desea información sobre otros comandos, consulte el archivo "External_Control.pdf" en el CD-ROM que se suministra con este monitor.

Función (ID de monitor = 1)	Datos del código
Encendido	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Apagado	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
Fuente de entrada Seleccione DisplayPort	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d o 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 46 03 04 0d
Fuente de entrada Seleccione DVI1	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 33 03 71 0d o 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 33 03 71 0d
Fuente de entrada Seleccione DVI2	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 34 03 76 0d o 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 34 03 76 0d
Fuente de entrada Seleccione HDMI1	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d o 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 31 03 72 0d
Fuente de entrada Seleccione HDMI2	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 32 03 71 0d o 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 32 03 71 0d
Fuente de entrada Seleccione HDMI3	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 32 03 78 0d
Fuente de entrada Seleccione HDMI4	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 33 03 79 0d
Fuente de entrada Seleccione OPTION	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 44 03 06 0d o 01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 44 03 06 0d
Modo silencio ACTIVADO	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Modo silencio DESACTIVADO	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d


Controlar el monitor LCD a través del control LAN

Conexión a una red

Utilizar un cable LAN le permite especificar los ajustes de la red y los ajustes del correo de alerta utilizando una función del servidor HTTP.

Para utilizar una conexión LAN, debe asignar una dirección IP.

Ejemplo de conexión LAN:

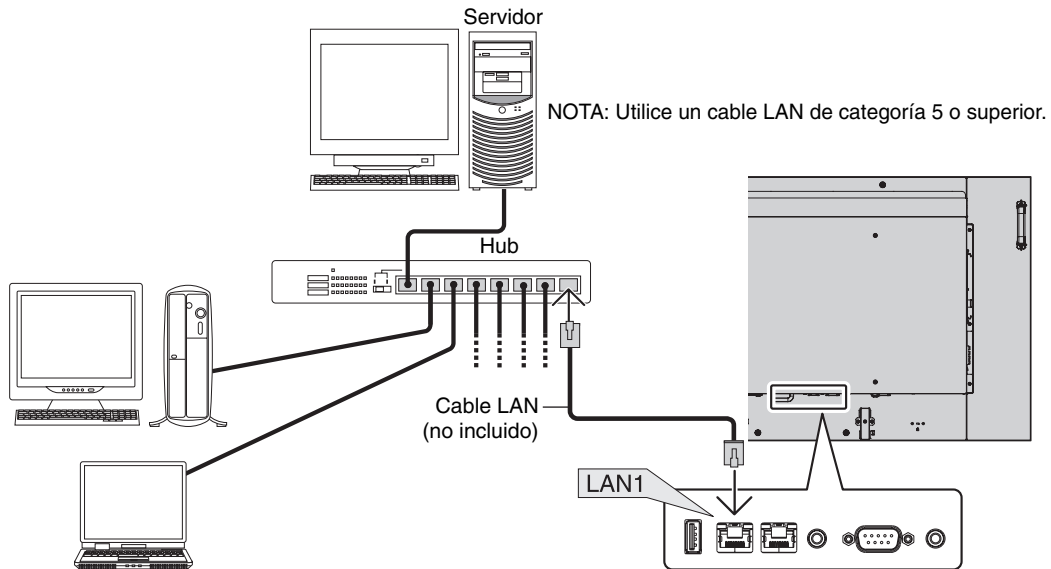

Configuración de la red con un navegador HTTP

Presentación

Conectando el monitor a una red podrá controlar el monitor desde cualquier ordenador a través de la red.

Para realizar el control del monitor desde un navegador web, debe tener una aplicación exclusiva instalada en el ordenador.

La dirección IP y la máscara de subred del monitor pueden configurarse en la pantalla Configuración de red del navegador web utilizando el servidor HTTP. Compruebe que el navegador web utilizado sea "Microsoft Internet Explorer 7.0" o superior.

Este dispositivo utiliza "JavaScript" y "Cookies", por lo que debería configurar el navegador para que acepte estas funciones.

El método de ajustes varía dependiendo de la versión del navegador. Consulte los archivos de ayuda y demás información que acompaña al software.

Para acceder a la función del servidor HTTP, inicie el navegador web en el ordenador a través la red conectada al monitor e introduzca la siguiente URL.

Configuración de red

`http://<dirección IP del monitor>/index.html`

SUGERENCIA: La dirección IP predeterminada se asigna automáticamente al monitor.

La aplicación exclusiva se puede descargar de nuestra página web.

NOTA: Si en el navegador web no aparece la pantalla CONFIGURACIÓN DE RED DEL MONITOR, pulse las teclas Ctrl+F5 para actualizar el navegador (o para borrar la caché).

Dependiendo de la configuración de su red, es posible que las pulsaciones en los botones del navegador o el tiempo de respuesta del monitor sea mayor, o que incluso no sea aceptable la velocidad de ejecución de las operaciones. En ese caso, consulte al administrador de su red.

El monitor no responderá si se pulsan los botones del navegador de forma rápida y repetida. En ese caso, espere un momento y vuelva a intentarlo. Si sigue sin responder, apague el monitor y vuelva a encenderlo.

Para controlar un monitor, utilice el comando de control. Ver "Esquema de comandos de control" (página 39).

Preparación antes del uso

Antes de empezar a utilizar el navegador conecte el monitor a la red mediante un cable de LAN (a la venta en establecimientos comerciales).

Es posible que no puedan utilizarse los navegadores que utilicen un servidor proxy, dependiendo del tipo de servidor proxy y del método de configuración. Aunque el tipo de servidor proxy es un factor importante, es posible que las opciones elegidas no se muestren dependiendo de la efectividad de la caché y también que el contenido establecido en el navegador no se refleje en su funcionamiento. Recomendamos no utilizar un servidor proxy salvo que sea inevitable.

Gestión de direcciones para el funcionamiento a través de un navegador

Se puede utilizar un nombre de host en los casos siguientes:

El nombre del host correspondiente a la dirección IP del monitor ha sido registrado por el administrador de la red en el servidor de nombres de dominio (DNS). En ese caso podrá acceder a la configuración de la red del monitor a través de este nombre de host utilizando un navegador compatible.

Si el nombre de host correspondiente a la dirección IP del monitor ha sido configurado en el archivo "HOSTS" del ordenador que esté utilizando, podrá acceder a la configuración de red del monitor a través de este nombre de host utilizando un navegador compatible.

Ejemplo 1: Si se elige como nombre de host del monitor "pd.nec.co.jp", se accede a la red especificando *http://pd.nec.co.jp/index.html* en la dirección o en la columna de entrada de la URL.

Ejemplo 2: Si la dirección IP del monitor es "192.168.73.1", para acceder a la configuración de alerta de correo se especifica *http://192.168.73.1/index.html* en la dirección o en la columna de entrada de la URL.

Operación

Acceda a la siguiente dirección para ver el INICIO. Haga clic en cada enlace en la columna izquierda debajo de INICIO.

<http://<dirección IP del monitor>/index.html>

MANDO A DISTANCIA

Permite el funcionamiento para controlar el monitor como si se usaran las teclas del mando a distancia.

Menú OSD

Permite la operación para configurar el siguiente menú OSD.

IMAGEN, AJUSTE, AUDIO, PROGRAMA, CTROL IMAGEN MÚLTIPLE, OSD, MULTIPANTALLA, PROTECCIÓN PANTALLA, CONTROL EXTERNO, OPCIÓN AVANZADA1, OPCIÓN AVANZADA2.

NOTA: Función de los botones que aparecen en las páginas de configuración.

[APLICAR]: Refleja sus opciones.

[CANCELAR]: Recupera la configuración anterior.


NOTA: CANCELAR se desactiva después de hacer clic en APLICAR.

[RECARGAR]: Vuelve a cargar la configuración.

[REAJUSTE]: Restablece la configuración inicial.

Configuración de red

Haga clic en "RED" en la columna izquierda debajo de INICIO.

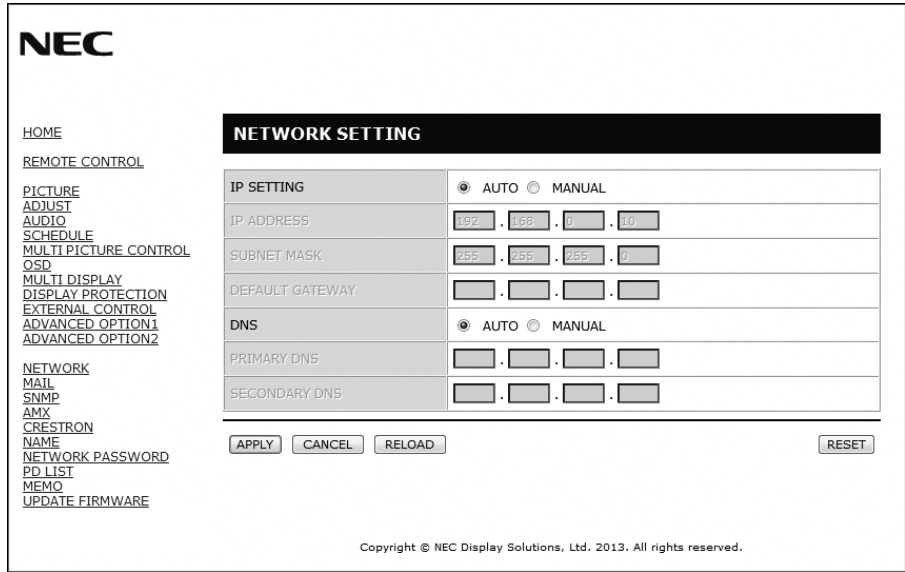


IP SETTING (AJUSTE IP)	Permite configurar la DIRECCIÓN IP. AUTO: Asigna automáticamente una dirección IP. MANUAL: Establezca la dirección IP del monitor conectado a la red. NOTA: Si selecciona "AUTO" en [AJUSTE IP], consulte la dirección IP al administrador de su red.
IP ADDRESS (DIRECCIÓN IP)	Si selecciona [MANUAL] en [AJUSTE IP], establezca la dirección IP del monitor conectado a la red.
SUBNET MASK (MÁSCARA DE SUBRED)	Si selecciona [MANUAL] en [AJUSTE IP], establezca los datos de la máscara de subred del monitor conectado a la red.
DEFAULT GATEWAY (GATEWAY PREDETERMINADA)	Si selecciona [MANUAL] en [AJUSTE IP], establezca la gateway predeterminada del monitor conectado a la red. NOTA: Para eliminar el ajuste, establézcalo como [0.0.0.0].
DNS	Ajuste de la DIRECCIÓN IP del servidor DNS. AUTO: El servidor DNS conectado al monitor asignará automáticamente su dirección IP. MANUAL: Introduzca manualmente la dirección IP del servidor DNS conectado al monitor.
PRIMARY DNS (DNS PRIMARIO)	Introduzca los ajustes del servidor DNS primario de la red conectada al monitor. NOTA: Introduzca [0.0.0.0] para eliminar el ajuste.
SECONDARY DNS (DNS SECUNDARIO)	Introduzca los ajustes del servidor DNS secundario de la red conectada al monitor. NOTA: Introduzca [0.0.0.0] para eliminar el ajuste.

NOTA: Los siguientes ajustes se restablecerán a sus valores de fábrica cuando un CONTROL EXTERNO del OSD seleccione REAJUST. DIRECCIÓN IP:
 [AJUSTE IP]: AUTO, [DIRECCIÓN IP]: 192.168.0.10, [MÁSCARA DE SUBRED]: 255.255.255.0, [DNS]: AUTO [GATEWAY PREDETERMINADA], [DNS PRIMARIO] y [DNS SECUNDARIO] quedan vacías.

Configuración del correo

Haga clic en "MAIL" en la columna izquierda debajo de INICIO.

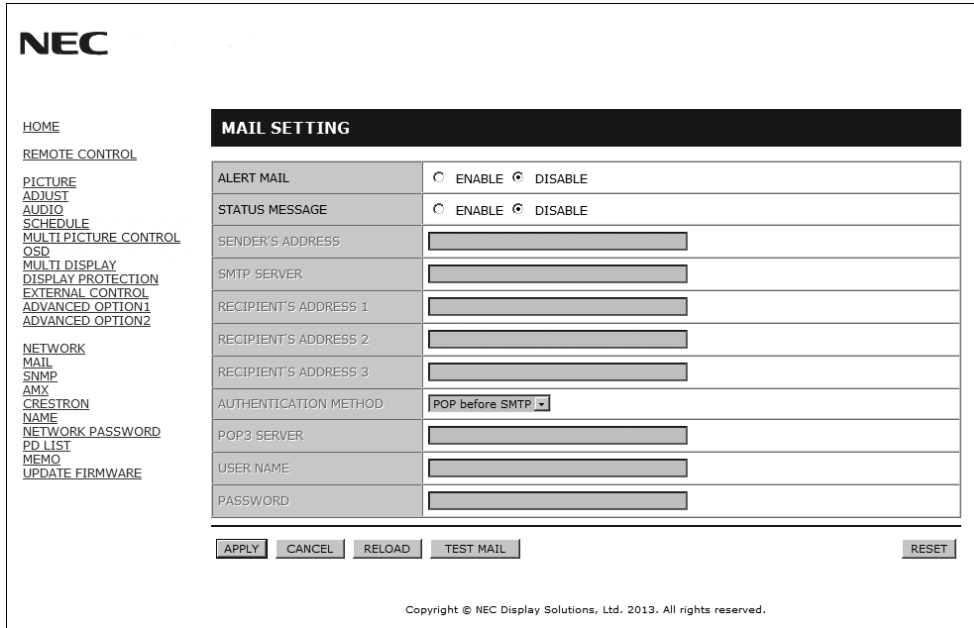

Esta opción envía por correo electrónico una notificación al ordenador para informar de un mensaje de error al utilizar la LAN alámbrica. Se enviará un mensaje de error cada vez que se produzca un error en el monitor.

ALERT MAIL (CORREO DE ALERTAS)	Si selecciona [ACTIVADO], se habilitará la función Correo de alertas. Si selecciona [DESACTIVADO], se deshabilitará la función Correo de alertas.
STATUS MESSAGE (MENSAJE DE ESTADO)	Si selecciona [ACTIVADO], se habilitará la función MENSAJE DE ESTADO. Si selecciona [DESACTIVADO], se deshabilitará la función MENSAJE DE ESTADO.
SENDER'S ADDRESS (DIRECCIÓN DEL REMITENTE)	Escriba la dirección del remitente. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres y símbolos alfanuméricos.
SMTP SERVER (SERVIDOR SMTP)	Escriba el nombre del servidor SMTP que se conectará al monitor. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.
RECIPIENT'S ADDRESS 1 TO 3 (DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO 1 A 3)	Escriba la dirección del destinatario. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres y símbolos alfanuméricos.
AUTHENTICATION METHOD (MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN)	Esta opción permite seleccionar el método de autenticación de la transmisión por correo electrónico.
POP3 SERVER (SERVIDOR POP3)	Esta opción especifica la dirección del servidor POP3 utilizado para autenticar el correo electrónico.
USER NAME (NOMBRE DE USUARIO)	Esta opción permite introducir el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor de autenticación cuando sea necesario para la transmisión de correos electrónicos. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.
PASSWORD (CONTRASEÑA)	Esta opción permite introducir la contraseña para iniciar sesión en el servidor de autenticación cuando sea necesario para la transmisión de correos electrónicos. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.
TEST MAIL (MAIL PRUB)	Haga clic en este botón para enviar un correo de prueba y comprobar si sus ajustes son correctos.

- NOTA:**
- Si realiza una prueba, es posible que no reciba un correo de alerta.
Si esto ocurre, compruebe que la configuración de la red es correcta.
 - Si introdujo una dirección incorrecta en la prueba, es posible que no reciba un correo de alerta.
Si esto ocurre, compruebe que la dirección del destinatario es correcta.

SUGERENCIA: Para obtener información sobre el esquema de comandos de control, consulte el archivo "External_Control.pdf" en el CD-ROM que se suministra con este monitor.

Lista de mensajes de errores de alerta

Número de error * Código de error	Mensaje del correo de alertas	Explicación	Medida
70h ~ 7Fh	La fuente de alimentación del monitor no está funcionando correctamente.	La alimentación en modo de espera no funciona correctamente	Póngase en contacto con su proveedor.
80h ~ Fh	Se ha detenido el ventilador.	El ventilador no funciona correctamente	Póngase en contacto con su proveedor.
90h ~ 9Fh	La luz de fondo del monitor no está funcionando correctamente.	La luz de fondo no funciona correctamente.	Póngase en contacto con su proveedor.
A0h ~ AFh	El monitor se ha recalentado.	Temperatura anómala.	Póngase en contacto con su proveedor.
A2h		En el OSD se ha especificado un sensor que ha alcanzado la temperatura límite. Condición: PROTECCIÓN PANTALLA-CONTROL VENTILADOR-VENTILADOR = AUTO	Vuelva a confirmar los ajustes del OSD (PROTECCIÓN PANTALLA-CONTROL VENTILADOR) o póngase en contacto con su proveedor.
B0h ~ BFh	El monitor no recibe una señal de entrada.	Sin señal.	Consulte "Sin imagen" en "Solución de problemas".
D0h	La capacidad restante del log de errores se reduce.	El tamaño de la memoria del registro Prueba de reproducción es de más de 1 hora.	Obtenga un log utilizando el comando externo PD. Véase la página 49.
E0h ~ EFh	Se ha producido un error de sistema en el monitor.	Error de sistema.	Póngase en contacto con su proveedor.

Ejemplo: Esta imagen muestra el contenido de un correo de alerta que informa de una temperatura anómala en el interior del monitor.

```

From: nec-tarou@jp.nec.com
To: nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Monitor Information

The monitor is overheated.
If this continues please contact NEC for support.
Code : <Error Code>

[Information]
Product Name : XXXX
Serial Number : 930PT012YA
Hours Running-ON : 108 [H]
Hours Running-Total : 262 [H]
    
```

Ejemplo: Esta imagen muestra el contenido de un correo de prueba a través de un navegador.

```

From: nec-tarou@jp.nec.com
To: nec-hanako@jp.nec.com
Subject: [Monitor] Test Mail

Alert Mail configurations are as follows:

Product Name : XXXX
Serial Number : 930PT012YA
Sender's Address : nec-tarou@jp.nec.com
SMTP Server Name : mail.nec.jp.com
Recipient's Address 1 : nec-hanako@jp.nec.com
Recipient's Address 2 :
Recipient's Address 3 :
    
```

Ajustes de SNMP

Haga clic en "SNMP" en la columna izquierda debajo de INICIO.

El protocolo SNMP permite obtener información de estado y controlar directamente un monitor a través de la red.

Versión:

- SNMP v1 Texto plano autenticado por un nombre de comunidad, no devuelve un mensaje de confirmación del trap.
- SNMP v2c Texto plano autenticado por un nombre de comunidad, devuelve un mensaje de confirmación del trap.

Nombre de comunidad:

El ajuste predeterminado del nombre de la comunidad es "público". Es de solo lectura. Puede configurar nombres de comunidad para un máximo de tres opciones.

Trap:

Envía una notificación a la dirección especificada cada vez que se produce un error en el monitor.

Casilla	Explicación	Código de error
Temperature (Temperatura)	Temperatura anómala	0xA0, 0xA1, 0xA2
Fan (Ventilador)	El ventilador no funciona correctamente	0x80, 0x81
Power (Alimentación)	Alimentación anómala	0x70, 0x71, 0x72, 0x78
Inverter/Backlight (Inversor/Luz de fondo)	Inversor o luz de fondo anómalos	0x90, 0x91
No Signal (Sin señal)	Sin señal	0xB0
PROOF OF PLAY (PRUEBA DE REPRODUCCIÓN)	Disminuya el almacenamiento de registros	0xD0
System Error (Error de sistema)	Error de sistema	0xE0

Ajustes de AMX

Haga clic en "AMX" en la columna izquierda debajo de INICIO.

AMX BEACON	<p>Enciéndalo o apáguelo para realizar la detección con AMX Device Discovery cuando se conecte a la red admitida por un sistema de control NetLinx de AMX.</p> <p>SUGERENCIA: <i>Cuando utilice un dispositivo compatible con AMX Device Discovery, todos los sistemas de control NetLinx de AMX reconocerán el dispositivo y descargará el módulo Device Discovery apropiado de un servidor AMX.</i> <i>Si selecciona [ACTIVADO] AMX Device Discovery detectará el dispositivo.</i> <i>Si selecciona [DESACTIVADO] AMX Device Discovery no detectará el dispositivo.</i></p>
------------	---

Ajustes de CRESTRON

Haga clic en "CRESTRON" en la columna izquierda debajo de INICIO.

Compatibilidad de CRESTRON ROOMVIEW

El proyector es compatible con CRESTRON ROOMVIEW, lo que significa que es posible conectar muchos dispositivos de la red para gestionarlos y controlarlos desde un ordenador o controlador.

Para más información, visite <http://www.crestron.com>

ROOMVIEW	ROOMVIEW para gestionar desde el ordenador. ACTIVADO: Activa ROOMVIEW. DESACTIVADO: Desactiva ROOMVIEW.
CRESTRON CONTROL	CRESTRON CONTROL para gestionar desde el controlador. ACTIVADO: Activa CRESTRON CONTROL. DESACTIVADO: Desactiva CRESTRON CONTROL.
CONTROLLER IP ADDRESS	Establezca la dirección IP del CRESTRON SERVER.
ID IP	Cree una ID de IP para CRESTRON SERVER.

SUGERENCIA: Los ajustes de CRESTRON solo se utilizan con CRESTRON ROOMVIEW.
Para más información, visite <http://www.crestron.com>

Ajustes de NOMBRE

Haga clic en "NOMBRE" en la columna izquierda debajo de INICIO.

The screenshot shows the NEC web interface with the 'NAME SETTING' menu highlighted. The menu items on the left include HOME, REMOTE CONTROL, PICTURE, ADJUST, AUDIO, SCHEDULE, MULTI PICTURE CONTROL, OSD, MULTI DISPLAY, DISPLAY PROTECTION, EXTERNAL CONTROL, ADVANCED OPTION1, ADVANCED OPTION2, NETWORK, MAIL, SNMP, AMX, CRESTRON, NAME, NETWORK PASSWORD, PD LIST, MEMO, and UPDATE FIRMWARE. The 'NAME SETTING' menu is active, showing three input fields: MONITOR NAME, HOST NAME, and DOMAIN NAME. Below the fields are buttons for APPLY, CANCEL, and RESET.

MONITOR NAME (NOMBRE DEL MONITOR)	Defina un nombre para el monitor. El nombre puede tener un máximo 16 caracteres. El predeterminado es el nombre del modelo.
HOST NAME (NOM. HOST)	Escriba el nombre del host del monitor conectado a la red. Pueden utilizarse hasta 15 caracteres alfanuméricos.
DOMAIN NAME (NOM DOMINIO)	Escriba el nombre de dominio de la red conectada al monitor. Pueden utilizarse hasta 60 caracteres alfanuméricos.

Ajustes de CONTRASEÑA DE RED

Haga clic en "CONTRASEÑA DE RED" en la columna izquierda debajo de INICIO.

The screenshot shows the NEC web interface with the 'NETWORK PASSWORD SETTING' menu highlighted. The menu items on the left are the same as in the previous screenshot. The 'NETWORK PASSWORD SETTING' menu is active, showing three fields: PJLink PASSWORD with an 'ENTER PASSWORD' button, HTTP PASSWORD with a 'CHANGE PASSWORD' button, and HTTP PASSWORD ENABLE with a checkbox. Below the fields are buttons for APPLY, CANCEL, and RESET.

PJLink PASSWORD (CONTRASEÑA de PJLink)	Cree una contraseña para PJLink*. La contraseña puede tener un máximo 32 caracteres. Procure no olvidarla, pero si lo hace, consulte a su proveedor.
HTTP PASSWORD (CONTRASEÑA DE HTTP)	Cree una contraseña para el servidor HTTP. La contraseña puede tener un máximo 10 caracteres.
HTTP PASSWORD ENABLE (CONTRASEÑA DE HTTP ACTIVADO)	La CONTRASEÑA HTTP es obligatoria para iniciar sesión en el servidor HTTP. Especifique el nombre del monitor como NOMBRE DE USUARIO al introducir la contraseña.

*¿Qué es PJLink?

PJLink es un protocolo estándar utilizado para controlar dispositivos de distintos fabricantes. Este protocolo estándar lo estableció en 2005 la Asociación Japonesa de Fabricantes de Máquinas de Oficina y Sistemas de Información (JBMIA). El dispositivo admite todos los comandos de PJLink Clase 1.

Información de LISTA PD

Haga clic en "LISTA PD" en la columna izquierda debajo de INICIO.

MONITOR ID	IP ADDRESS
1	192.168.0.1
2	192.168.0.2
3	192.168.0.3
4	192.168.0.4
5	192.168.0.5
6	192.168.0.6
7	192.168.0.7
8	192.168.0.8
9	192.168.0.9
10	192.168.0.10
11	192.168.0.11

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2013. All rights reserved.

Muestra la lista de direcciones ID e IP de varios monitores que están conectados en cadena.

NOTA: Solo el monitor maestro mostrará la lista.

Ajustes de MEMO



Haga clic en "MEMO" en la columna izquierda debajo de INICIO.

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2013. All rights reserved.

Especifique un título y un mensaje.

TITLE (TÍTULO)	El título puede tener un máximo 24 caracteres.
MESSAGE (MENSAJE)	El mensaje puede tener 240 caracteres como máximo.
MEMO PASSWORD (CONTRASEÑA DE MEMO)	La predeterminada es "0000".
MEMO PASSWORD ENABLE (HABILITAR CONTRASEÑA DE MEMO)	La CONTRASEÑA DE MEMO es obligatoria al seleccionar HABILITAR CONTRASEÑA DE MEMO.

POINT ZOOM

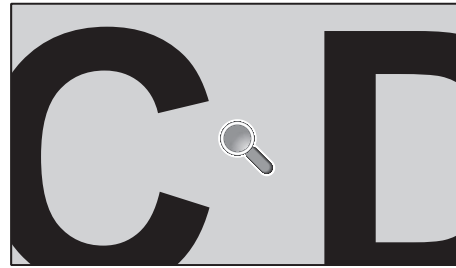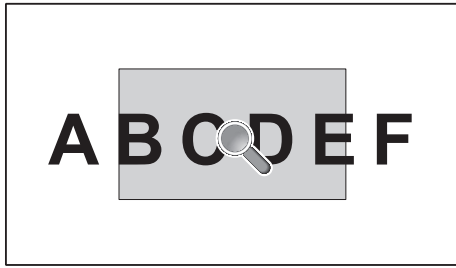

El botón SET/POINT ZOOM del mando a distancia permite aumentar un parte de la imagen. Pulse el botón CH+/- para aumentar o reducir el zoom. La imagen puede ampliarse hasta 10 veces.

- 1 Pulse el botón [SET/POINT ZOOM] del mando a distancia. El icono adquiere la forma de una lupa.
- 2 Mueva el icono de la lupa con los botones [▲] [▼] [+] [-].
- 3 Pulse [CH+] para aumentar el zoom in. Pulse [CH-] para reducir el zoom.
- 4 Pulse [SET/POINT ZOOM] para que desaparezca el icono.
- 5 Pulse [EXIT] para volver al tamaño de imagen normal.
- 6 Pulse [MENU] para abrir el menú OSD.

- NOTA:**
- POINT ZOOM no está disponible con la resolución de 3840 x 2160 a 60 Hz.
 - Si usa esta función la imagen puede mostrarse distorsionada.
 - Esta función no funciona cuando se establece INVERTIR IMAGEN (excepto NINGUNO), MODO IMAGEN MÚLTIPLE, PROTECTOR PANTALLA, SÚPER en CAMBIO ENTRADA, CONFIGURACIÓN ENTRADA, ROTAR, TEXT TICKER.
 - Si en ASPECT selecciona DYNAMIC o ZOOM, la imagen cambiará a FULL. A continuación, empiece con POINT ZOOM.
Después de salir de POINT ZOOM, se recuperará la configuración de ASPECT anterior. Cuando ASPECT cambie durante el funcionamiento de POINT ZOOM, DYNAMIC y ZOOM pasarán a imagen FULL.
 - El icono de la lupa no se mueve a ninguna zona de la imagen.
 - POINT ZOOM se desactivará después de cambiar la señal de entrada o apagar el monitor.
 - POINT ZOOM se desactivará si cambia el ajuste de ASPECT durante su funcionamiento.
 - Cuando POINT ZOOM está activo, la función STILL no está disponible.

PRUEBA DE REPRODUCCIÓN

Esta función permite realizar un diagnóstico automático y enviar mensajes sobre el estado actual del monitor.

Elemento comprobado	Mensaje
① ENTRADA	DVI1, DVI2, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*, PRESET1*1, PRESET2*1
② Resolución	P. ej.: (H)1920, (V)1080 , (H)1360, (V)768 o Ninguna señal o Señal no válida
③ ENTRADA DE AUDIO	LINE IN, DPORT, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, OPTION*
④ Señal de audio	Entrada de audio o No entrada de audio o N/A (LINE IN, OPTION*)
⑤ Imagen	Imagen normal o No hay imagen
⑥ LINE OUT	Audio normal o Sin audio
⑦ HORA	(año)/(mes)/(día)/(hora)/(minutos)/(segundo)

*: Esta función depende de la placa opcional que utilice.

*1: Esta función depende del ajuste CONFIGURACIÓN ENTRADA.

Ejemplo:

- ① HDMI
- ② 1920 x 1080
- ③ HDMI
- ④ Entrada de audio
- ⑤ Imagen normal
- ⑥ Audio normal
- ⑦ 2014/1/1/0h/0m/0s

NOTA: Para obtener información sobre la función PRUEBA DE REPRODUCCIÓN, consulte el archivo "External_Control.pdf" en el CD-ROM que se suministra con este monitor.

DATOS INALÁMBRICOS INTELIGENTES

Esta función permite obtener el estado del monitor mediante comunicación inalámbrica incluso si el monitor está apagado o todavía no se ha instalado.

También permite establecer algunos elementos del OSD.

NOTA: Para la posición: Véase la página 11.
Póngase en contacto con el proveedor para obtener información detallada.

Nombre de la función
Setting Copy (Ajuste de copia)
Setting read and write function (Configuración de la función de lectura y escritura)
Display information (Ver información)
Security Setting (Ajuste de seguridad)

Características

Superficie de apoyo reducida: Es la solución ideal para entornos que requieren una gran calidad de imagen.

SPECTRAVIEW ENGINE: Este sistema ha sido diseñado para mejorar la calidad visual del monitor. Cada monitor viene calibrado de fábrica. Haciendo los ajustes directamente en el hardware del monitor en tiempo real, se configuran los ajustes óptimos sin la interacción del usuario.

Control del color sRGB: Nuevo estándar de gestión del color que permite ajustar el color en los monitores de ordenador y de otros periféricos. El estándar sRGB, que está basado en el segmento de color calibrado, permite representar óptimamente el color y recuperar la compatibilidad con otros colores estándar comunes.

Controles OSD (On-Screen-Display): Permiten ajustar rápida y fácilmente todos los elementos de la imagen de la pantalla con sólo utilizar los menús que aparecen en ella.

Plug and Play: La solución de Microsoft® con el sistema operativo Windows® facilita la configuración y la instalación y permite que el monitor envíe directamente al ordenador sus características (por ejemplo, el tamaño de la pantalla y las resoluciones posibles) y optimiza automáticamente el rendimiento de la visualización.

Sistema IPM (Intelligent Power Manager): Favorece el ahorro de energía ya que, gracias a este innovador sistema, el monitor consume menos cuando está conectado y no se está utilizando, lo que supone un ahorro de dos tercios del coste de energía del monitor, una reducción de las emisiones y un menor gasto de aire acondicionado en el lugar de trabajo.

Función FullScan: Gracias a esta función, es posible utilizar toda la pantalla en la mayoría de resoluciones, aumentando significativamente el tamaño de la imagen.

Interfaz de montaje estándar VESA (FDMLv1): Le permite colocar el monitor en cualquier brazo o escuadra de montaje de otro fabricante compatible con la norma VESA (FDMLv1). NEC recomienda utilizar un equipo de montaje que cumpla con la norma TÜV-GS (Alemania) o con la norma UL1678 (Norteamérica).

DVI-D: Subconjunto exclusivamente digital de DVI aprobado por el Digital Display Working Group (DDWG) para conexiones digitales entre ordenadores y pantallas. Como conector digital único, sólo ofrece soporte analógico con conectores DVI-D. Como conexión digital única basada en DVI, sólo es necesario un adaptador simple para que DVI-D sea compatible con otros conectores digitales basados en DVI, como DFP y P&D. La interfaz DVI de este monitor admite HDCP y DVI Dual Link.

ZOOM: Amplía/reduce el tamaño de la imagen en sentido horizontal y vertical.

Auto-diagnóstico: Si se produce un error interno, se indica un estado de fallo.

Hub USB permite conectar cámaras digitales, escáneres, teclados y muchos más dispositivos.

HDCP (sistema de protección del contenido digital de banda ancha): HDCP es un sistema que impide la copia ilegal de los datos de vídeo que se envían a través de una señal digital. Si no logra ver material a través de la entrada digital, esto no significa necesariamente que el monitor esté funcionando mal. En ocasiones, la integración del sistema HDCP supone la protección de determinados contenidos y es posible que no se visualicen correctamente debido a la decisión o intención de la comunidad del sistema HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Ranura para placa opcional: Puede usar una placa opcional. Póngase en contacto con el proveedor para obtener información detallada.

Calibración DICOM: Curva de corrección de gamma DICOM real creada por la calibración individual del monitor. Aunque este monitor está calibrado de fábrica conforme a la norma DICOM, se recomienda realizar una recalibración periódica para mantener un rendimiento visual óptimo durante todo su ciclo de vida.

Solución de problemas

No hay imagen

- El cable de señal debería estar correctamente conectado al controlador de pantalla/ordenador.
- El controlador de pantalla debería estar completamente insertado en la ranura correspondiente.
- Compruebe el interruptor principal de encendido, debe estar en la posición ENCENDIDO.
- El interruptor de encendido y el del ordenador deberían estar en la posición ON.
- Asegúrese de que se ha seleccionado una resolución compatible en el controlador de pantalla o en el sistema que se está utilizando. En caso de duda, consulte el manual del controlador de pantalla o del sistema para cambiar a la resolución.
- Compruebe que el monitor y su controlador de pantalla son compatibles y la cadencia de las señales es la recomendada.
- Compruebe que el conector del cable de señal no está doblado ni tiene ninguna clavija hundida.
- El monitor se apaga automáticamente en el tiempo preestablecido cuando se pierde la señal. Pulse el botón de encendido.
- Compruebe los ajustes de MODO DVI si hay conectado un ordenador o un reproductor de DVD a la entrada DVI.
- Compruebe el ajuste SELECCIÓN HDMI/DVI.
- Compruebe el cable de DVI que usa. Si la resolución de entrada deseada es 1920 x 2160 o 3840 x 2160, es obligatorio usar un cable de DVI Dual Link.
- Compruebe los ajustes de OPCIÓN ALIM. si utiliza accesorios para la placa opcional.

Imagen con nieve, pantalla negra en entrada DVI

- Compruebe el ajuste MODO DVI cuando conecta un reproductor de DVD o un ordenador a la entrada de DVI.

El botón de encendido no responde

- Desconecte el cable de alimentación del monitor de la toma de corriente y reinicie el monitor.
- Compruebe el interruptor principal de encendido del monitor.

Persistencia de la imagen

- Tenga en cuenta que la tecnología LCD puede sufrir un fenómeno conocido como Persistencia de la imagen. La persistencia de la imagen se produce cuando en la pantalla permanece la "sombra" o el remanente de una imagen. A diferencia de los monitores CRT, la persistencia de la imagen de los monitores LCD no es permanente, pero se debe evitar visualizar patrones fijos en el monitor durante largos períodos de tiempo. Para eliminar la persistencia de la imagen, tenga apagado el monitor tanto tiempo como el que haya permanecido la imagen en la pantalla. Por ejemplo, si una imagen ha permanecido fija en el monitor durante una hora y aparece una "sombra" de esa imagen, debería tener el monitor apagado durante una hora para borrarla.

NOTA: Como en todos los dispositivos de visualización personales, NEC DISPLAY SOLUTIONS recomienda visualizar imágenes en movimiento y utilizar con regularidad un protector de pantalla con movimiento siempre que la pantalla esté inactiva o apagar el monitor si no se va a utilizar.

La imagen parpadea

- Si usa un distribuidor o repetidor de señal, o un cable largo, podrían provocar interferencias o parpadeo en algún caso. Si esto ocurre, utilice la función COMP. CABLE LARGO. Si el estado de la pantalla no mejora, conecte el cable al monitor directamente sin usar un repetidor o distribuidor, o sustituya el cable por uno de más calidad.

NOTA: La función COMP. CABLE LARGO no está disponible para la entrada de señal DisplayPort.

- Puede que algunos cables HDMI no muestren la imagen correctamente. Si la resolución de entrada es 1920 x 2160, 3840 x 2160 o 4096 x 2160, use un cable HDMI aprobado para admitir una resolución de 4K.

La imagen es inestable, está desenfocada o aparecen ondas

- El cable de señal tiene que estar bien conectado al ordenador.
- Compruebe que el monitor y su tarjeta de visualización son compatibles y la cadencia de las señales es la recomendada.
- Si el texto parece ininteligible, pase al modo de vídeo no entrelazado y utilice una velocidad de regeneración de la imagen de 60 Hz.
- Puede que la imagen se distorsione al activar la alimentación o al modificar los ajustes.

El diodo luminoso del monitor no está encendido (no aparece el color verde ni el ámbar)

- El interruptor de encendido debería estar en la posición ON y el cable de alimentación debería estar conectado.
- Compruebe el interruptor principal de encendido, debe estar en la posición ENCENDIDO.
- Asegúrese de que el ordenador no se encuentra en el modo de ahorro de energía (toque el teclado o mueva el ratón).
- Verifique en el OSD que la opción del indicador de alimentación está activada.

El LED ROJO del monitor parpadea

- Si se ha producido un fallo, póngase en contacto con su proveedor.
- Si se apaga el monitor debido a que la temperatura interna es mayor que la temperatura normal de funcionamiento, el LED parpadeará seis veces en color ROJO. Vuelva a encender el monitor tras confirmar que la temperatura interna se ha reducido a la temperatura normal de funcionamiento.

La imagen no se reproduce correctamente

- Asegúrese de que se ha seleccionado un modo disponible en la tarjeta de visualización o el sistema que se está utilizando. En caso de duda, consulte el manual del controlador de pantalla o del sistema para cambiar a la resolución.

No hay sonido

- Compruebe que el cable de audio está conectado correctamente.
- Compruebe si está activada la función SILENCIO. Use el mando a distancia para activar o desactivar la función SILENCIO.
- Compruebe si el VOLUMEN está al mínimo.
- Compruebe que el ordenador admita una señal de audio a través de DisplayPort.
En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.
- Si LINE OUT no está funcionando, compruebe si ENVOLVENTE está en ENCENDIDO.
- Compruebe el interruptor del altavoz interno/externo en la parte trasera del monitor.

El mando a distancia no funciona

- Compruebe el estado de las pilas del mando a distancia.
- Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el mando a distancia apunta hacia el sensor del mando a distancia del monitor.
- Compruebe el estado de los AJUSTES BLOQUEO IR.
- Puede que el sistema de control remoto no funcione cuando el sensor de control remoto del monitor recibe la luz directa del sol o está sometido a una fuerte iluminación o cuando hay algún objeto entre el mando a distancia y el sensor del monitor.

La función PROGRAMA/TIEMPO DESACTIV. no funciona correctamente

- La función PROGRAMA se desactiva al configurar TIEMPO DESACTIV.
- Si se activa la función TIEMPO DESACTIV. y la alimentación del monitor LCD está desconectada, si la fuente de alimentación se interrumpe inesperadamente, se restablecerá la función TIEMPO DESACTIV.

Imagen con nieve, sonido deficiente en el TV

- Compruebe la antena/conexión de cables. Si es necesario, utilice un cable nuevo.

El hub USB no funciona

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado. Consulte el manual de usuario de su dispositivo USB.
- Compruebe que el puerto USB upstream del monitor esté conectado al puerto USB downstream del ordenador y asegúrese de que este último esté encendido.

Interferencias en el televisor

- Compruebe que los componentes estén apantallados; si es necesario, aléjelos del monitor.

El control RS-232C o LAN no está disponible

- Compruebe RS-232C (de tipo inverso) o del cable de LAN. Debe utilizar un cable de LAN de categoría 5 o superior para la conexión.

Pueden aparecer líneas luminosas verticales u horizontales, según el patrón de imagen específico. No se trata de un error del producto ni de una degradación.

Especificaciones

Especificaciones del producto		MultiSync MDC551C8	
Módulo LCD	Tamaño del píxel: Resolución: Color: Brillo: Contraste: Ángulo de visión:	55"/138,78 cm diagonal Nota: Matriz activa; pantalla de cristal líquido (LCD) con transistor de película delgada (TFT). 0,105 mm 3840 x 2160 Más de 1073 millones de colores (dependiendo del controlador de pantalla utilizado) 400 cd/m ² de luminancia del blanco; 250 cd/m ² de luminancia calibrada. 4000:1 89° (típ.) a CR>10	
Frecuencia	Horizontal: Vertical:	31,5 kHz - 133,3 kHz (entrada digital) 24,0 - 85,0 Hz	
Frecuencia de píxel		25 MHz - 300 MHz (HDMI), 25 MHz - 330 MHz (enlace doble), 25 MHz - 540 MHz (DisplayPort)	
Tamaño visible		1209,6 x 680,4 mm	
Señal de entrada			
DVI	DVI-D de 24 clavijas (Enlace doble)	RGB digital	DVI (HDCP) VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 3840 x 2160 (30 Hz), 1080p, 1080i
DisplayPort	Conector DisplayPort	RGB digital	La entrada DisplayPort cumple el estándar 1.2, aplicable a HDCP V1.3 VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 3840 x 2160 (60 Hz (DisplayPort1.2)/30 Hz/24 Hz)
HDMI	Conector HDMI	Digital YUV Digital RGB	HDMI VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60, 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 2160 (60 Hz), 1080p, 1080i, 720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 480i@60Hz, 3840 x 2160 (30 Hz/24 Hz/25 Hz), 4096 x 2160 (24 Hz)*1. *3
AUDIO			
LINE IN	Conector mini estéreo	Audio analógico	Estéreo L/R 0,5 Vrms
	Conector HDMI	Audio digital	PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits)
	Conector DisplayPort	Audio digital	PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits)
LINE OUT	Conector mini estéreo	Audio analógico	Estéreo L/R 0,5 Vrms
Salida para altavoces			Conector para altavoz externo de 15 W + 15 W (8 ohmios) Altavoz interno 10 W + 10 W (estéreo)
Control	RS-232C Entrada: LAN: Remote IN:	D-sub de 9 clavijas RJ-45 10/100 BASE-T Conector mini estéreo 3.5 mm Ø	
Hub USB	I/F: Puerto: Corriente de carga:	Especificación USB Revisión 2.0 Upstream 1 Downstream 1 Máximo 0,5 A por puerto	
Puerto de servicio			Puerto de servicio USB para tareas de mantenimiento
Alimentación eléctrica			3,6 - 1,4 A @ 100-240 V de CA, 50/60 Hz
Entorno operativo	Temperatura*2: Humedad: Altitud: Presión atmosférica:	0 - 35°C / 32 - 95°F 20 - 80% (sin condensación) De 0 a 9.843 pies/de 0 a 3.000 m (el brillo puede disminuir con la altitud) De 710 hPa a 1013 hPa	
Entorno de almacenamiento/ transporte	Temperatura: Humedad: Altitud: Presión atmosférica:	-20 - 60 °C / -4 - 140 °F 10 - 90% (sin condensación) / 90% - 3,5% x (Temp - 40 °C) si la temperatura supera los 40°C De 0 a 40.000 pies/de 0 a 12.192 m De 200 hPa a 1013 hPa	
Dimensiones			1250,2 (An.) x 721 (Al.) x 78,1 (Pr.) mm / 49,2 (An.) x 28,4 (Al.) x 3,1 (Pr.) pulgadas
Peso			28,7 kg (63,3 libras)
Interfaz de montaje compatible con VESA			400 mm x 400 mm (M8, 4 orificios)
Gestión de alimentación			VESA DPM
Plug & Play			VESA DDC2Bi, DDC/CI, DisplayPort
Suministro de alimentación para la Ranura 2 tipo OPTION			16V/3,6 A
Accesorios			Guía de referencia rápida, cable de alimentación, cable de señal de vídeo, mando a distancia, 2 pilas AAA, 3 abrazaderas, 3 tornillos, CD-ROM, 2 tornillos de mariposa para soporte opcional, CD-ROM

NOTA: Reservado el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

El EUT (equipo bajo prueba) se reinicia durante las pruebas de huecos, pero este descenso del rendimiento no afecta a la seguridad básica ni al rendimiento esencial. Según las especificaciones del fabricante, el rendimiento es aceptable.

*1: Imagen comprimida.

*2: Si utiliza accesorios para la placa opcional, póngase en contacto con el proveedor para obtener información detallada.

*3: El texto reproducido puede parecer borroso.

Información del fabricante sobre reciclaje y energía

NEC DISPLAY SOLUTIONS está muy comprometida con la protección del medio ambiente y considera el reciclaje una de las máximas prioridades de la empresa para reducir los daños al medio ambiente. Nuestro objetivo es desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y poner nuestro máximo empeño en ayudar a definir y cumplir las últimas normativas de organismos independientes como ISO (Organización Internacional de Normalización) y TCO (Confederación Sueca de Trabajadores Profesionales).

Cómo reciclar su producto NEC

El objetivo del reciclado es mejorar el entorno mediante la reutilización, actualización, reacondicionamiento o recuperación de materiales. Los equipamientos dedicados al reciclaje garantizan que los componentes dañinos para el medio ambiente se manipulan y eliminan de la manera adecuada. Para asegurar que sus productos se reciclan de la forma más conveniente, **NEC DISPLAY SOLUTIONS ofrece una amplia variedad de procedimientos de reciclajes** y consejos sobre la mejor forma de manipular sus productos para proteger el medio ambiente una vez que llegan al final de su vida útil.

Puede encontrar toda la información necesaria para desechar un producto y la información específica de cada país sobre los equipamientos de reciclaje disponibles en los siguientes sitios web:

<https://www.nec-display-solutions.com/p/greenvision/en/greenvision.xhtml> (en Europa),

<http://www.nec-display.com> (en Japón) o

<http://www.necdisplay.com> (en EE.UU.).

Ahorro de energía

Este monitor dispone de una función avanzada de ahorro de energía. Cuando se envía al monitor una señal DPM (administración de potencia de pantallas), se activa el modo de ahorro de energía. El monitor sólo dispone de un modo de ahorro de energía.

Modo	Consumo de energía	Color de LED
Funcionamiento normal*1, *2	Aprox. 150 W	Verde
Modo de ahorro de energía*1 (AHORRO ENERGÍA AUTO)	Menos de 0,5 W	Ámbar
Apagado	Menos de 0,5 W	Apagado

*1: sin ninguna opción, con los valores de fábrica.

*2: depende del destino.

Para obtener más información, visite:

<http://www.necdisplay.com/> (en EE. UU.)

<http://www.nec-display-solutions.com/> (en Europa)

<http://www.nec-display.com/global/index.html> (internacional)

Marca de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva Europea 2012/19/UE y modificaciones)



Eliminación del producto usado: En la Unión europea

La transposición de esta directiva europea en cada estado miembro obliga a desechar el material eléctrico y electrónico que lleva la marca que se muestra a la izquierda por separado de los residuos domésticos comunes. En esta categoría se incluyen desde monitores hasta accesorios eléctricos, como cables de alimentación o de señal. Para desechar estos productos, siga las instrucciones de las autoridades locales, solicite información al respecto en el establecimiento donde haya adquirido el producto o, si corresponde, siga la normativa aplicable o los acuerdos que pudiera tener. Esta marca en productos eléctricos o electrónicos sólo se aplica a los estados miembros actuales de la Unión Europea.

Fuera de la Unión Europea

Para desechar productos eléctricos o electrónicos fuera de la Unión Europea, póngase en contacto con las autoridades locales o pregunte por el método de desecho adecuado.



Para la UE: El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que las pilas usadas no deben depositarse en el contenedor para residuos domésticos habitual. En el caso de las pilas usadas, existe un sistema de recogida selectiva que permite el tratamiento y el reciclaje adecuados según la legislación vigente.

La pila debe desecharse correctamente conforme a la directiva de la UE 2006/66/EC y ser objeto de recogida selectiva por parte del servicio local correspondiente.

NEC Display Solutions, Ltd.
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokio,
Japón

NEC Display Solutions of America, Inc.
500 Park Blvd. Suite 1100 Itasca,
Illinois 60143
EE.UU.
Teléfono: +1-630.467.3000
Fax: +1-630.467.3010

NEC Display Solutions Europe GmbH
Landshuter Allee 12-14
D-80637 Muenchen
Alemania
Teléfono: +49(0)89/99699-0
Fax: +49(0)89/99699-500

1.ª edición, febrero de 2017